



セルケア®ソフトウエハー Cellcare-Soft Wafer

種類	商品コードNo.	規格	1函入数	メーカー希望 小売価格(税込)
リング20	20351	20mmφ(穴径)×50mmφ(外径)×2.5mm(厚さ)	10枚	¥3,300
リング30	20352	30mmφ(穴径)×60mmφ(外径)×2.5mm(厚さ)	10枚	¥3,300
スティック	19781	10mm(縦)×100mm(横)×2.5mm(厚さ)	10本	¥2,200

皮膚保護剤:セラミド配合CPbe系

セルケア®ソフトウエハー Cellcare-Soft Wafer



わかりやすく、
つかいやすく。
ストーマケアを
もっとシンプルに。

セラミド配合用手成形皮膚保護剤
Moldable Skin Barrier



アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825
www.alcare.co.jp

お問い合わせ：コールセンター

フリーダイヤル **0120-770-863**


土・日・祝日を除く
午前9:00～午後5:00

●本カタログの内容は2021年3月現在のものです。
●商品の仕様、デザインおよび価格は、改良や経済状況の変動などにより予告なく変更することがあります。
●本カタログに掲載の写真は、実際の色とは多少異なる場合がありますので、ご了承ください。



この印刷物は、EPAのシムルバー基準に適合した
地球環境にやさしい印刷方法で作成されています
EPA:環境保護印刷推進協議会
<http://www.e3pa.com>

もう、セルフケアで迷わない。選ぶときも、使うときも、 だれでも簡単、わかりやすい。《セルケア・ソフトウエハー》

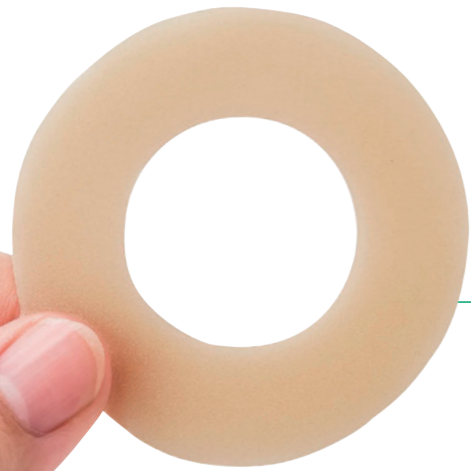

リング

ストーマの全周を補強・補正したいときに穴径をストーマサイズに広げて貼付します。



全周を補強するために

穴径をストーマサイズに広げて、そのまま貼付します。




部分的に補強するために

楕円ストーマなどに、1/4、1/2円状にカットし、貼付します。




スティック

ストーマ周囲を部分的に補正・補強したいときに必要量をカットし、成形して貼付または充填します。

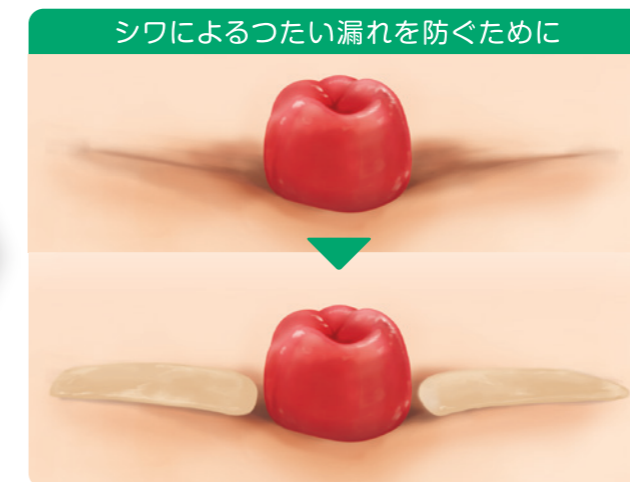

シワによるつたい漏れを防ぐために

シワの長さに合わせて必要量をカットし、平らになるように貼付します。

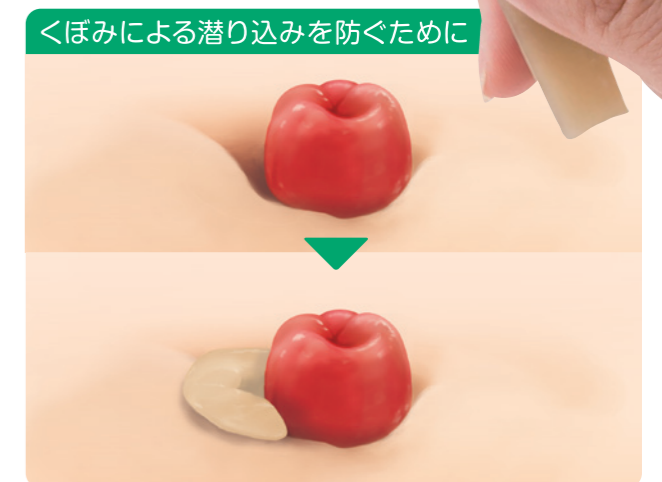


くぼみによる潜り込みを防ぐために

くぼみの大きさと深さに合わせて必要量をカットし、平らになるように充填します。

ストーマサイズに幅広く対応

ワンサイズで広い範囲のストーマサイズをカバーできるので、術後の急激なサイズ変化にも対応可能です。

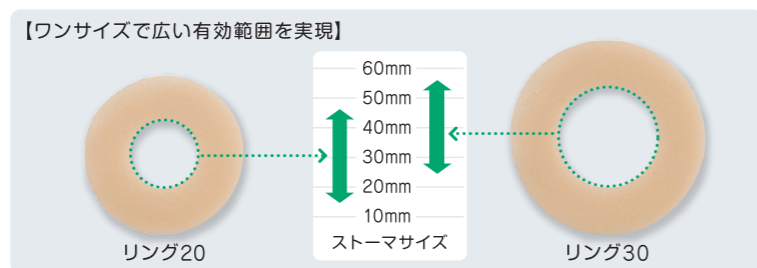


【ワンサイズで広い有効範囲を実現】

※上記の有効範囲は実測値です。目安としてご確認ください。



スケール付きで 使用量が覚えやすい

スケール付きの剥離紙はハサミで切るときに、使用量が把握できるので、使用方法の指導にも便利です。

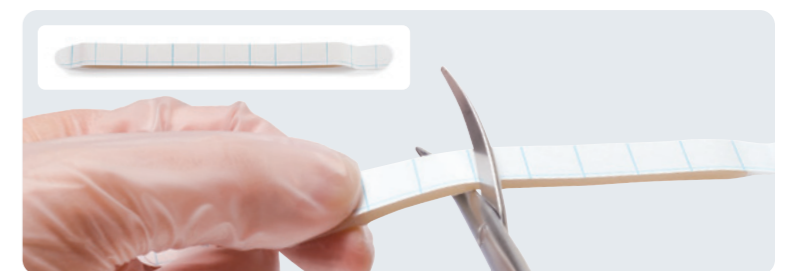


ベタつきが少なく やわらかく、伸ばしやすい

ベタつきが少なく、適度なやわらかさなので、巧緻性の低い方でも容易に伸ばすことができます。手袋をしたままでも扱いやすく、効率的かつ衛生的なケアが可能です。



色つきの剥離フィルムは全方向から剥離できます。

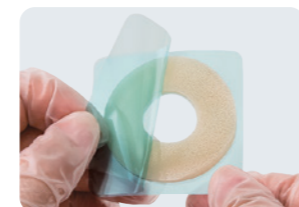

ベタつきが少なく やわらかく、加工しやすい

ベタつきが少なく、適度なやわらかさなので、ちぎる、練る、成形するなど容易に加工ができます。手袋をしたままでも扱いやすく、効率的かつ衛生的なケアが可能です。



耐久性に優れた皮膚保護剤を採用

適度な膨潤で、溶け崩れも少なく崩壊しにくいいため、排泄物の皮膚への潜り込みを防ぎます。