

きりっぱなし生地

グンゼの独自開発製法で
ほつれの悩みから解放!



自分で
カットOK
ほつれにくい



生地はし、生地なか、
どこでもカットできます



使用方法

- 1 本品を切る
- 2 ストーマ袋を通す穴を開ける
- 3 本品を着用し、ストーマ袋を通す

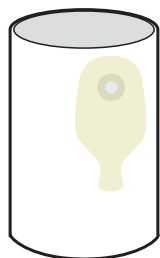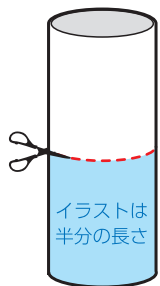

袋の支えをつくる

下端を折返し、ポケット状にして袋を支えることもできます。

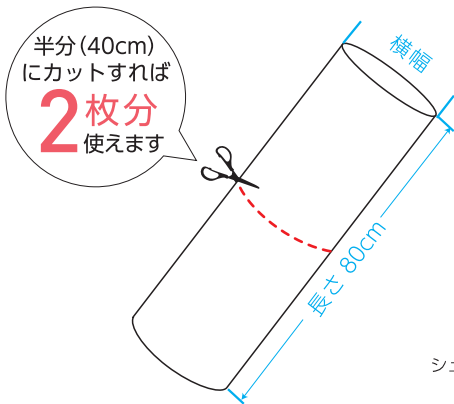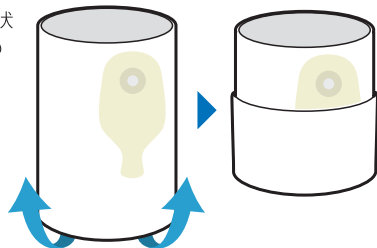

男女兼用

<色見本>



やわらかウエストチューブ ■素材 綿 65%、ポリウレタン 35% <日本製>

種類 色	商品コード サイズ	商品コード No.	規格 (cm)		着用目安 参考腹囲 (cm)	入数	メーカー希望 小売価格 (本体価格)
			横幅	長さ			
プッシュ アップ ワン	M	20711	28	80	70~ 85	1枚	¥2,640 (¥2,400)
	L	20712	30		80~ 95		
	LL	20713	33		90~105		
グレー モク	M	20721	28	80	70~ 85	1枚	¥2,640 (¥2,400)
	L	20722	30		80~ 95		
	LL	20723	33		90~105		

※着用感は個人差があります。参考腹囲は目安です。

販売元 **アルケア株式会社**
東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階
〒130-0013 www.alcare.co.jp

お問い合わせ：コールセンター
フリーダイヤル **0120-770-863**
土・日・祝日を除く午前9:00~午後5:00

製造元 **グンゼ株式会社**

日本製
made in Japan

男女兼用

オストメイトのために
肌着のグンゼができました。



やわらか ウエストチューブ

— オストメイト用腹帯 —

MediPro
Support
メディプロ サポート
by
MediCure
メディキュア

包み込むサポート力
ふんわり
やさしい
肌ざわり

肌にやさしい素材
装具や固定ベルトの
肌あたりを軽減

長さ 80cm
(各サイズ共通)

きりっぱなし生地
自分で
カットOK
ほつれにくい

ストーマ装具を通す穴は
切れ目を入れるだけ
※丸い穴を開ける必要
はありません。


洗濯して何度も使える
くり返し
使用OK

洗濯に強い
ほつれや縮みの
少ないグンゼ品質

洗濯による劣化が少なく、
何度も使えてとても経済的。
自分流にアレンジした1枚
を長く着用していただけます。



カットしても洗濯できる！
グンゼのきりっぱなし素材

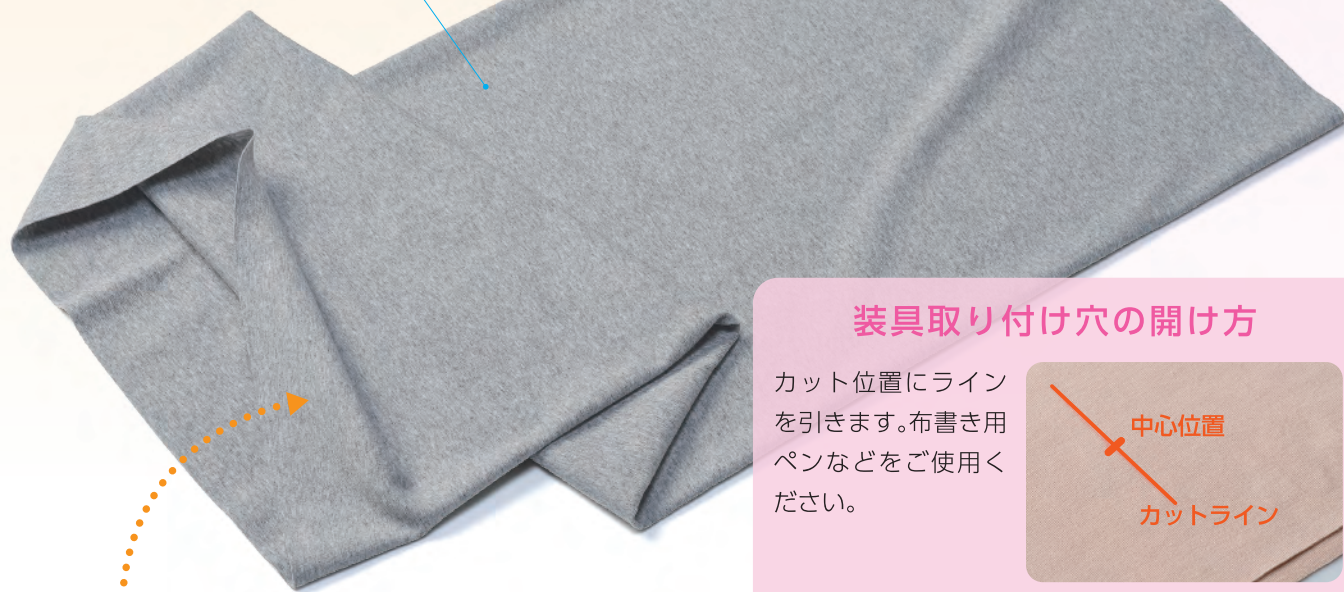

やわらかくフィット

肌ストレス軽減




ゴムを全く使わず、グンゼ独自開発の編み技術によって、まるで包み込むようなサポート力を実現しました。

凹凸の無いフラットな生地に仕立て、摩擦などによる肌への刺激を抑えています。

装具取り付け穴の開け方

カット位置にラインを引きます。布書き用ペンなどをご使用ください。

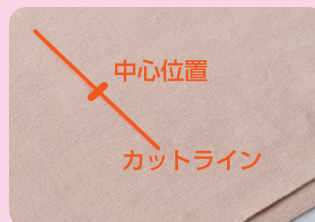

中心線の上で生地を二つ折りにし、ラインに沿ってハサミでカットします。



着用時イメージ



装具装着時のイメージ




洗濯によるほつれ実験(100回後)[※]

※グンゼ調べ(JIS L1930洗濯方法 No.C4G 準拠)
洗濯条件や使用状況によって異なります。


きりっぱなし加工なし

本品

カット直後

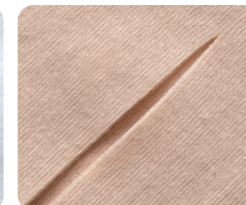

洗濯100回

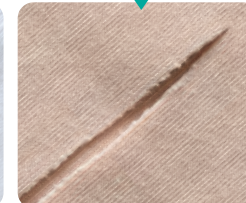

生地にハサミを入れると、端のほつれが心配？
グンゼ独自開発製法による「きりっぱなし」生地なら、100回洗濯してもほつれにくい！

メディキュア
なら！

ハサミを入れても洗濯OK！
長くご使用いただけます！