

やわらか ウエストチューブ



やわらかくフィットして
面板周囲の肌を保護


オストメイト向け

男女兼用

MediPro
Support

by
MediCure
メディキュア by GUNZE

GUNZE

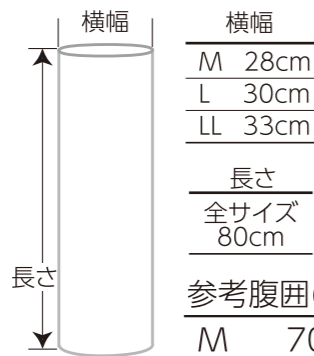

横幅	長さ
M 28cm	全サイズ 80cm
L 30cm	
LL 33cm	

MediPro
Support
by
MediCure
メディキュア by GUNZE

どこでも自由に
カットして使えます!



参考腹囲(着用の目安)

M	70~85cm
L	80~95cm
LL	90~105cm

※着用感は、個人差があります。
サイズは、目安です。

きりっぱなし生地
自分で
カットOK
ほつれにくい

包み込むサポート力
ふんわり
やさしい
肌ざわり

洗濯して何度も使える
くり返し
使用OK

お取り扱いの注意

- 取扱い表示記号を参考にして、お洗濯してください。
- 濃色物と白物との同時洗濯は、色移り、ケバ付着の原因となりますのでお避けください。
- 白物と色物との漬け置きは避け、洗濯後は速やかに形を整えて干してください。
- ポリウレタン繊維(腰ゴムなど)使用の場合は、塩素系漂白剤の使用はお避けください。劣化・変色をさせます。
- この製品は、生地端を裁ち切りで無縫製にしています。
- この無縫製の生地端は特殊加工でほつれにくい仕上げになっていますが、強く引っ張ったりしますと部分的にほつれた状態になることがあります。
- 着脱の際には生地端に強い力がかからないようご注意ください。

販売元 アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階
〒130-0013 www.alcare.co.jp

お客様相談室

☎ 0120-770-175

製造元 グンゼ株式会社

このコードは当社
管理用コードです。
携帯サイトでは
ありませんので、
ご注意ください。



(T)NP9008A-IN

日本製



外装:PP
クリップ:PS

※商品によっては包装にクリップを
使用していないものもございます。




中紙
台紙

取扱い説明書



やわらかウエストチューブ

使用方法


- 1.本品を切る。
- 2.ストーマ袋を
通す穴を開ける。
- 3.本品を着用し、
ストーマ袋を
通す。

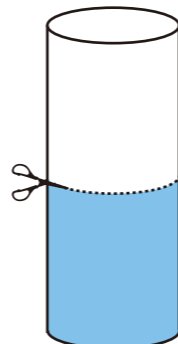

イラストは
半分の長さ

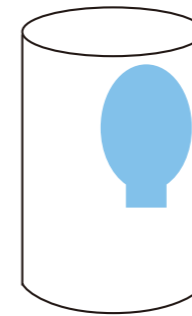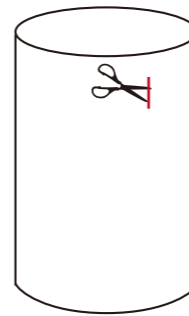

※下端を折返し、ポケット状にして、袋を支えることもできます。

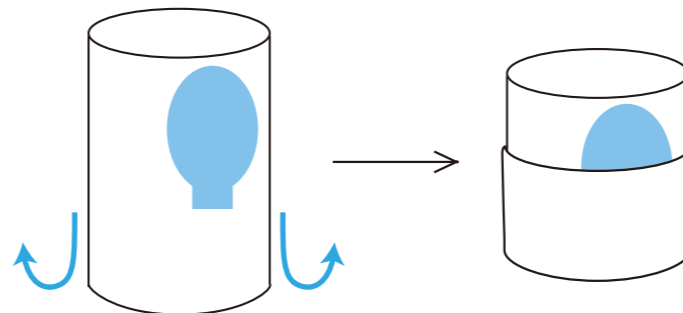

2018年7月作成

お取り扱いの注意

- 塩素系漂白剤の使用はお避けください。劣化、変色をさせます。
- この製品は、生地端を断ち切りにしてあります。
- 生地端は、特殊加工でほつれにくい仕上げになっていますが、強く引っ張ったりしますと部分的にほつれることがあります。

商品に関するお問い合わせ

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階
〒130-0013 www.alcare.co.jp

お客様相談室 ☎ 0120-770-175