

撥水力で肌をしっかり守る
うるおいのバリア

ウインドケアソリューション

リモイス[®]バリア

撥水性スキンケアクリーム ● REMOIS[®]BARRIER

肌にうるおいを与える撥水クリーム《リモイスバリア》。
撥水と**保湿** 2つの効果で肌をすこやかに保ちます。

汚れ・刺激から肌を守りたい

撥水性を持つ保護膜が、汚れや外的刺激から肌を保護。頻繁な刺激にも、優れた**撥水性**を発揮します。

排泄物の強い刺激が心配

pH緩衝能により、強い刺激から肌をやさしく保護します。また**保湿成分配合**で肌をしっとりなめらかに保ちます。


クリームのかたつき感が不快

撥水クリーム特有のかたつきが少なく、**皮膚によくなじみ**、なめらかで自然な使用感です。

強い刺激にさらされる **失禁部位に**


弱酸性のリモイスバリアは、**pH緩衝能**により排泄物などから受けるアルカリ性の強い刺激をやわらげ、皮膚を守ります。

【排泄物の刺激】

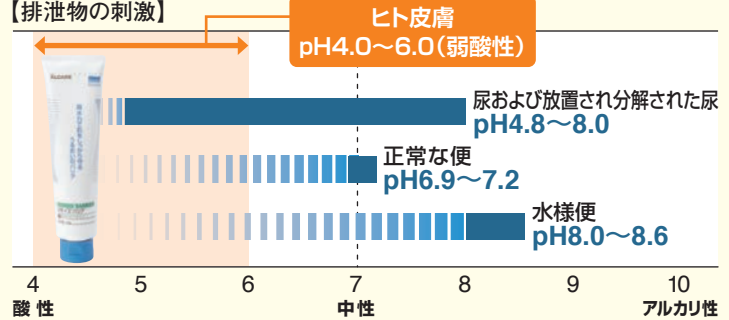


べたつかないのに、しっかり撥水。

使用方法

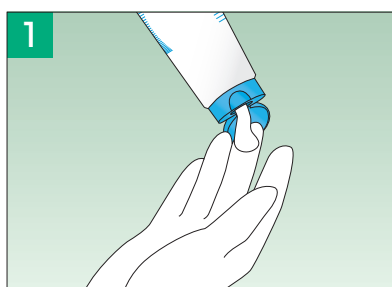

1 適量(100cm²に対してさくらんぼ小粒大/約2g)を指先に取ります。

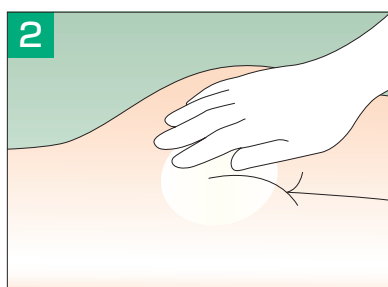

2 皮膚に塗り、クリームの乳白色が目立たなくなるよう均一に伸ばしてください。



撥水性の高い保護膜で、汚れや刺激から皮膚を守ります。

使用上のご注意

●傷・湿疹・皮膚炎等、皮膚にトラブルのある場合は使用しないでください。●発赤・はれ・かゆみ・刺激等の異常が生じた場合には、直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。使い続けると悪化するおそれがあります。●テープ等の粘着剤を貼付する部分には使用しないでください。テープ等の固定力を著しく低下させる可能性があります。●誤って飲み込んだ場合は、速やかに医師にご相談ください。●過度な摩擦や頻回な清拭等により保護効果が弱まる場合があります。必要に応じて塗り直してください。●直射日光を避け、室温で保管してください。●乳幼児、小児の手の届かない所に保管してください。




リモイス®バリア REMOIS®BARRIER

種類	商品コードNO.	規格(内容量)	1函入数	メーカー希望小売価格(本体価格)
レギュラー	18031	160g	1本	¥2,415(¥2,300)
ミニ	18032	50g	1本	¥1,365(¥1,300)



リモイス(Remois)とは、「皮膚への処置」に「保湿」をプラスしたアルケアが提案するスキンケアの新しいコンセプト。皮膚に必要な処置を行うと同時に、うるおいを捕うことでバリア機能を向上させ、皮膚をすこやかに保つことを目的としています。

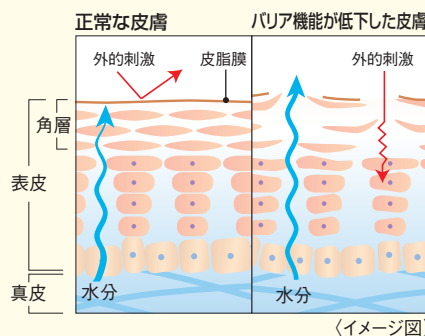

バリア機能が低下した皮膚は角層が傷んで水分が外へ逃げ出すため乾燥し、アレルギー*や微生物などの外的刺激の影響を受けやすくなります。正常な皮膚を維持するために、角層の保湿対策が重要です。

*アレルギー: アレルギーを引き起こす原因となるもの。花粉、ダニの死骸、ホルムアルデヒドなど、数多くの種類がある。

〈イメージ図〉

アルケア株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825 <http://www.alcare.co.jp>

東京営業所 TEL.03-5638-8161 名古屋営業所 TEL.052-222-3860
首都圏東営業所 TEL.048-834-5614 北陸営業所 TEL.076-243-5602
首都圏西営業所 TEL.045-472-7511 大阪営業所 TEL.06-6337-2985
札幌営業所 TEL.011-261-1721 広島営業所 TEL.082-831-8777
仙台営業所 TEL.022-715-2733 福岡営業所 TEL.092-441-8372

INTERNATIONAL SALES DIVISION TEL.81-3-5611-7819

■アルケア医工学研究所 ■千葉工場 ■オストメイトサービスセンター

●本カタログの内容は平成22年5月現在のものです。
●商品の仕様、デザインおよび価格は、改良や経済状況の変動などにより予告なく変更することがあります。
●本カタログに掲載の写真は、実際の色とは多少異なる場合がありますので、ご了承ください。



この印刷物は、EPAのシムラー基準に適合した地球環境にやさしい印刷方法で作成されています。EPA環境保護印刷推進協議会 <http://www.e3pa.com>