



肌を刺激や汚れから保護する
うるおいのバリア

ウインドケアソリューション

リモイス[®]コートハンディー

〈化粧液〉

ノンアルコール性保護膜形成剤 • REMOIS[®] COAT HANDY

肌にやさしい保護膜形成剤《リモイスコートハンディー》。


保護 と **保湿** 2つの効果で肌をすこやかに保ちます。

局所の肌だけに塗布したい

シート状なので、狭い範囲などの局所的な塗布に適しています。保護したい肌を的確に守ります。

膜で覆われた感じが苦手

透湿性と撥水性を両立する微粒子構造で、保護膜による**つぶ**り感や**ムレ**感を軽減します。

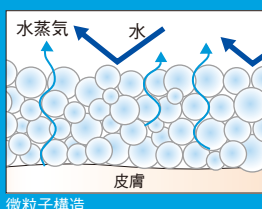

肌にしみるのが心配

肌への刺激が少ない**ノンアルコール性**。速乾性でべたつかず、上からテープ等の粘着材の貼付が可能※です。保湿成分配合で肌をしっとりとなめらかに保ちます。

※粘着力をご確認のうえご使用ください。

目や口の周囲に

微粒子からなる保護膜で、局所の肌を刺激や汚れなどから守ります。


テープ等の貼付部位に

失禁部位に


※粘膜などに塗布しないよう、ご使用ください。

保護膜が刺激、汚れから肌を守る。


使用方法

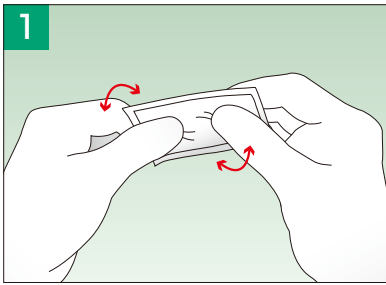

1 アルミ包装を開ける前に、指でつまんで4~5回揉むように押してください。

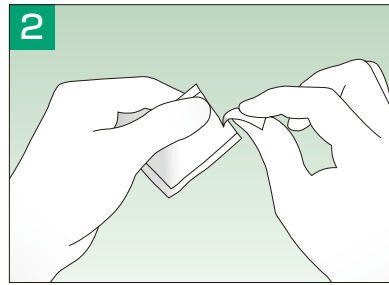

2 アルミ包装を開け、シートを引き出してください。
※アルミ包装開封後、開封部を下に向けてコート液が流れ出る場合がありますので、ご注意ください。

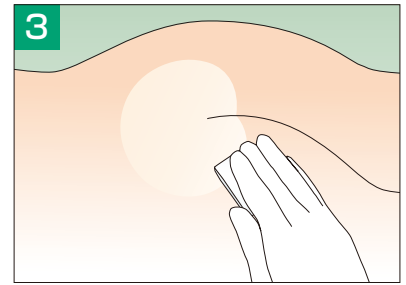

3 シートで適応部位にむらなく塗布してください。指やガーゼ等でこすらず、自然に乾燥させてください。
※粘膜などに塗布しないよう、ご使用ください。
※テープ等の粘着剤を使用する場合は、本品が完全に乾いてからご使用ください。

使用上のご注意

●傷や腫れ物、湿疹等、異常のある部位には使用しないでください。●発赤やかゆみ、刺激等の異常が生じた場合には、直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。使い続けると悪化することがあります。●目などの粘膜にコート液が付着しないように注意し、万が一付着してしまった場合は直ちに水またはぬるま湯でよく洗い流してください。●鼻や口から吸入しないように注意してください。●通気の良い場所で使用し、火気に近づけないでください(引火のおそれがあります)。●直射日光を避け、室温で保管してください。●乳幼児、小児の手の届かない所に保管してください。●お肌に合わないときは、ご使用をおやめください。●シートは水に溶けませんので、トイレには流さないでください。

成分

ジシロキサン、(アクリル酸アルキル/ジメチコン)コポリマー、エイコセン酸カプリリル、ジメチコン、(ジメチコン/(PEG-10/15))クロスポリマー、香料




リモイス®コートハンディー REMOIS®COAT HANDY

種類	商品コードNO.	規格(内容量)	1函入数	メーカー希望小売価格(本体価格)
—	17712	1.7ml/枚	20枚	¥2,520(¥2,400)



リモイス(Remois)とは、「皮膚への処置」に「保湿」をプラスしたアルケアが提案するスキンケアの新しいコンセプト。皮膚に必要な処置を行うと同時に、うるおいを補うことでバリア機能を向上させ、皮膚をすこやかに保つことを目的としています。

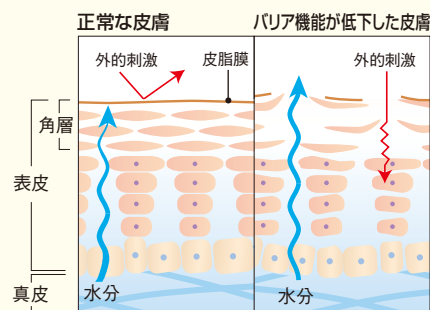

バリア機能が低下した皮膚は角層が傷んで水分が外へ逃げ出すため乾燥し、アレルギーや微生物などの外的刺激の影響を受けやすくなっています。正常な皮膚を維持するために、角層の保湿対策が重要です。

*アレルギー: アレルギーを引き起こす原因となるもの。花粉、ダニの死骸、ホルムアルデヒドなど、数多くの種類がある。

(イメージ図)

アルケア株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825 <http://www.alcare.co.jp>

東京営業所 TEL.03-5638-8161 名古屋営業所 TEL.052-222-3860
首都圏東営業所 TEL.048-834-5614 大阪営業所 TEL.06-6337-2985
首都圏西営業所 TEL.045-472-7511 広島営業所 TEL.082-831-8777
札幌営業所 TEL.011-261-1721 福岡営業所 TEL.092-441-8372
仙台営業所 TEL.022-715-2733

INTERNATIONAL SALES DIVISION TEL.81-3-5611-7819

■ アルケア医学研究所 ■ 千葉工場 ■ オストメイトサービスセンター

●本カタログの内容は平成22年8月現在のものです。
●商品の仕様、デザインおよび価格は、改良や経済状況の変動などにより予告なく変更することがあります。
●本カタログに掲載の写真は、実際の色とは多少異なる場合がありますので、ご了承ください。



この印刷物は、EPAのシール基準に適合した地球環境にやさしい印刷方法で作成されています。EPAの環境保護印刷推進協議会 <http://www.e3p.jp/>