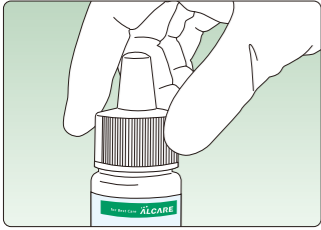
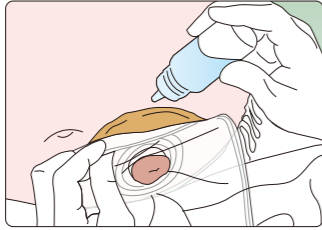
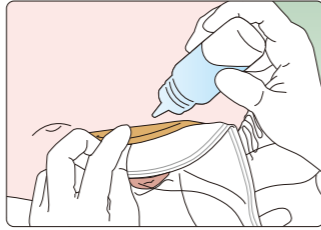
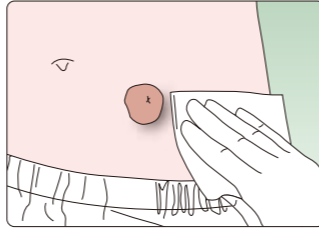


使用手順

1  キャップを外します。

2  ストーマ袋の上部をめくり、面板の上部から剥離剤を滴下します。
※ボトルを傾けるだけで押す必要はありません。

3  剥離剤を滴下しながら、面板を皮膚から少しずつ剥がしていき、ストーマ装具を外します。
※面板を軽く引っ張るだけで剥がれていきます。強く引っ張る必要はありません。

4  皮膚に剥離剤が残っている場合は、ティッシュペーパーなどで拭き取ってから、新しい装具を貼付してください。

使用上の注意

警告

- 本品は可燃性の液体です。ご使用の際は、通気の良い場所で使用し、火気に近づけないでください。引火のおそれがあります。
- 傷や腫れ物、湿疹等、皮膚に異常のある部位には使用しないでください。
- 発赤やかゆみ、刺激等の異常が生じた場合には、直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。使い続けると悪化することがあります。
- 目、鼻、口等に入らないように注意してください。万一入った場合は直ちに多量の水でよく洗い流してください。
- 廃棄の際は、中身を使い切ってから廃棄してください。

注意

- 本品は揮発性が高いため、使用後はキャップをしっかり閉めてください。

火気厳禁 第4類第一石油類 危険等級II



スムーズリムーバー® Smooth Remover

種類	商品コードNo.	規格 (内容量)	1函入数	メーカー希望 小売価格(税抜き)
—	19811	30mL	1本	¥1,100



アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825
www.alcare.co.jp

お問い合わせ：コールセンター

フリーダイヤル **0120-770-863** 土・日・祝日を除く
午前9：00～午後5：00

●本カタログの内容は2017年2月現在のものです。
●商品の仕様、デザインおよび価格は、改良や経済状況の変動などにより予告なく変更することがあります。
●本カタログに掲載の写真は、実際の色とは多少異なる場合がありますので、ご了承ください。



この印刷物は、EPAのシムルバー基準に適合した地球環境にやさしい印刷方法で作成されています。EPA「環境保護印刷推進協議会」
http://www.e3pa.com

スムーズリムーバー®
Smooth Remover



粘着剥離剤(非アルコール性)
Adhesive Remover (Alcohol Free)

スルスルスル剥がせて、使いやすい
ストーマ装具剥離剤

オストメイトの装具交換による 刺激やストレスを低減します。

《スムーズリムーバー》は、
ストーマ装具を皮膚から剥がしやすくする剥離剤です。
非アルコール性の剥離剤で、皮膚にやさしく、
優れた操作性により、スムーズな装具交換をサポート。
オストメイトが日常的に行う装具交換時の
皮膚刺激や心理的ストレスを低減します。



原寸大


剥離刺激を抑えて、スルスル剥がせる

皮膚への刺激が少ない、非アルコール性の剥離剤です。
剥離成分が皮膚と皮膚保護剤の隙間にすばやく浸透し、面板を浮かせるこ
とでスルスルと簡単に剥がすことができます。
速乾性で、皮膚保護剤の糊残りも少ないため、ストーマ周囲を何度も拭き取
る必要がありません。装具交換に伴う皮膚への刺激を低減するだけでなく、
手間も削減します。

■剥がれ方の比較




■角質剥離の比較(当社比)

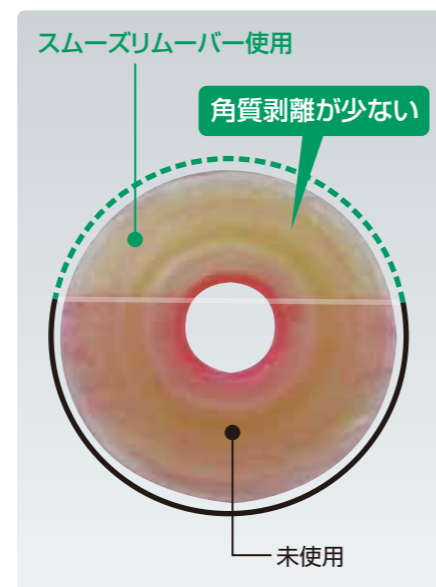

〈試験方法〉 面板を貼付4時間後に剥離し、エオジン染色を
実施。

ノズルが細長く、差し込みやすい

ストーマ装具と皮膚の狭い隙間にも差し込みやすい細長い
ノズル形状です。ノズルが面板と皮膚の接着面付近まで届く
ため、狙った箇所への滴下が容易です。

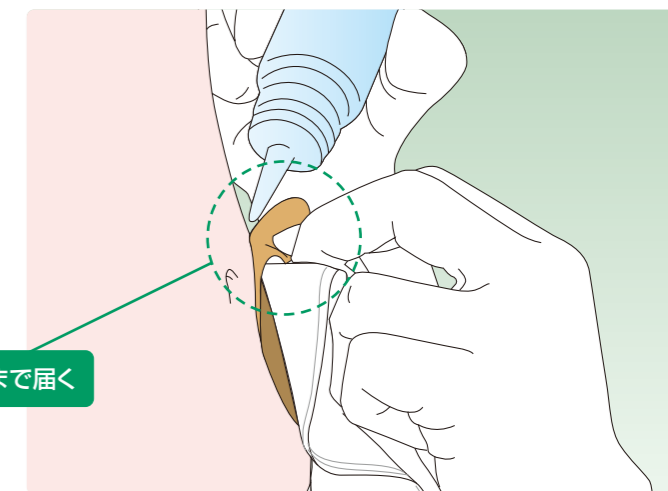

細長いノズルで奥まで届く

滴下のタイミングがわかりやすい

青みがかった色の剥離液が、半透明のボトルに入っています。
ボトル内の剥離液の動きが見えるため、滴下のタイミングが
わかりやすくなっています。



誰でも開け閉めしやすい

キャップの表面に凹凸があるため、すべりにくく、誰でもストレス
なくキャップを開け閉めできます。

