

使用上のご注意

*【使用上のご注意】では、その危険度に応じて次の区分をしております。

⚠ 警告……人身事故につながるおそれのある注意事項

注 意……物損事故につながるおそれのある注意事項

⚠ 警 告

- 本品の使用に際しては、取扱説明書をよくお読みになった上、必ず医師、看護師、義肢装具士等、医療従事者の指示に従ってください。
- 下記内容に関しましては、必ず医師、看護師、義肢装具士等、医療従事者の指示に従ってください。
 - ・装着時間および装着期間、就寝時の装着について
 - ・本品の使用中に痛み、しびれ、かぶれの不具合等の異常が発生した場合
 - ・面ファスナーの締め具合(過度に圧迫しないでください)
 - ・付属品のサイドパッドの使用
 - ・洗濯時の本体からのステアの着脱
 - ・長期間の使用による面ファスナー接着力の低下
- 本体および各部品が破損した場合は、直ちに使用を中止してください。
- 使用中ズレやゆるみが生じた場合は、正しく装着し直してください。ズレやゆるみがあると確実な支持性が得られません。
- 装着中、特に麻酔中、麻酔直後や就寝中は過度に圧迫しないようにご注意ください。血行障害やしびれ(神経障害)など異常が生じた場合は直ちに使用を中止してください。
- 面ファスナー部分との接触により、怪我をする場合がありますので、ご使用中は十分ご注意ください。
- 面ファスナー、およびステアカバーの蓋はそれぞれしっかりと押しとめてください。きちんととめていない場合、面ファスナーが外れたり、ステアが飛び出るおそれがあります。

注 意

- 本品装着時に違和感等を覚えた場合、ご自分では決して修正をせず、医師、看護師、義肢装具士等、医療従事者の指示に従ってください。
- 面ファスナーが衣服に付かないように本品を装着してください。
- 保管に関しては、水濡れに注意し、直射日光および高温多湿を避けて室温保管してください。

サイズ表

	サイズ	適用範囲(大腿周囲)
ニーブレース・FX	3L	68~75cm
	LL	61~68cm
	L	54~61cm
	M	47~54cm
	S	40~47cm

※大腿周径は膝蓋骨中心から25cm上となります。

	サイズ	適用範囲(大腿周囲)
ニーブレース	LL	54~61cm
	L	47~54cm
ニーブレース・ショート	M	40~47cm
	S	33~40cm

※大腿周囲は膝中心から15cm上となります。

品質表示

素材(ニーブレース・FX)	
アルミニウム	: サイドステア、バックステア
ポリウレタン	: 本体、サイドパッド
綿	: 本体
ポリエステル	: サイズ札
ナイロン	: 本体、面ファスナー、蓋フレンチ
ポリプロピレン	: ステアカバー(背部)
塩化ビニル	: ステアカバー(側部)
POM	: コカン
ポリエチレン(PE)	: 内袋
ポリエチレンテレフタレート(PET)	: 内袋

素材(ニーブレース、ニーブレース・ショート)	
アルミニウム	: サイドステア、バックステア
鉄	: コカン(ニーブレース)
ポリウレタン	: 本体、サイドパッド
綿	: 本体
ポリエステル	: 本体、サイズ札
ナイロン	: 面ファスナー、蓋フレンチ
ポリプロピレン	: ステアカバー
POM	: コカン(ニーブレース・ショート)
ポリエチレン(PE)	: 内袋
ポリエチレンテレフタレート(PET)	: 内袋

※お願い…本品を廃棄する際は、各地方自治体の廃棄区分に従ってください

保守・保全

⚠ 警 告

- 必ずステアを本体から取り出してから洗濯してください(ステアの取り出し方については、「ステアの着脱について」の項をお読みください)。

注 意

- 本品の面ファスナーが他の衣服に付くと、他の衣服のほつれや伝線の原因となりますので別々に洗濯してください。
- 洗濯は水温30℃以下とし、中性洗剤で軽く押し洗いしてください(この時にサイドパッドが剥がれることがあります)。塩素系漂白剤、ドライクリーニングで洗濯すると、サイドパッドが剥がれやすくなったり、面ファスナーの接着力が低下する等、本品を傷めるおそれがあります。
- 乾燥は陰干しで行ってください。乾燥機の使用は本品を傷める原因となります。
- 本品が完全に乾いたことをご確認のうえ、ご使用ください。面ファスナーが濡れた状態での装着は、面ファスナーの接着力低下の原因となります。

ÄLCARE

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825
www.alcare.co.jp

1206-1

for Best Care

ÄLCARE

ニーブレースシリーズ Kneebrace Series

ニーブレース・FX Kneebrace-FX

軽度屈曲位膝関節支持帯

ニーブレース Kneebrace

ニーブレース・ショート Kneebrace-Short

伸展位膝関節支持帯

取扱説明書

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、商品の特性を十分に理解してからご使用ください。
- 常に、この取扱説明書はお手元に置き、必要に応じてお読みください。

お客様相談室 ☎ 0120-770175

www.alcare.co.jp

はじめに……

《ニーブレース・FX》《ニーブレース》《ニーブレース・ショート》は、膝関節をサポートするように設計されています。本品は膝関節のサポートを目的としていますが、完全に保護できるものではありません。支持帯に過度のストレスがかかる場合、または長期間の装着では破損するケースがあります。ご使用に際しては必ず医師、看護師、義肢装具士等、医療従事者の指導に従ってください。安全にお使いいただくため、上記用途以外の使用はせずこの取扱説明書に従いご使用ください。商品について不明な点は当社お客様相談室までご連絡ください。

ご使用にあたって

本品は滅菌不可製品となります

●オートクレーブ滅菌、EOG滅菌、プラズマ滅菌等、いずれの滅菌にも対応不可となっております。


本品は一症例一使用となります

●本品を他の症例、本人以外の方へ使用することはおやめください。

MRI時の使用は不可となります

●金属パーツを使用しております。

各部の名称と付属品

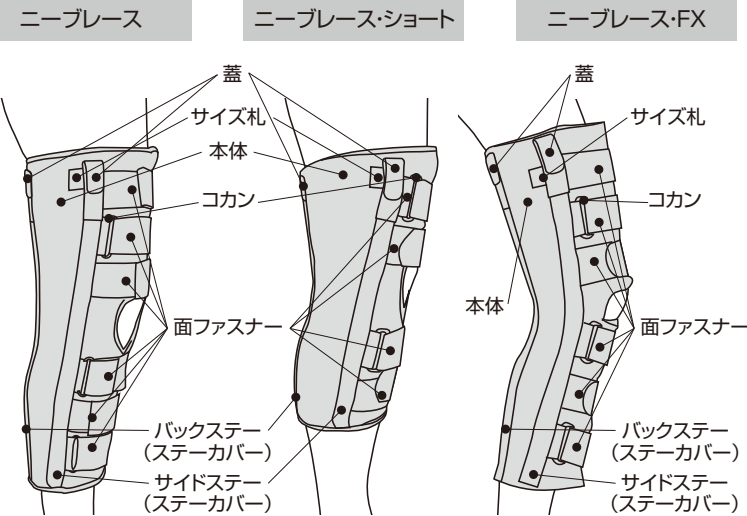

製品仕様およびデザインは、品質改良にともない変更する場合がございます。それにより、イラストと実際の製品とで若干の違いが生じる場合がございますことをご了承ください。

■付属品



サイドパッド 2枚


※ サイドパッドの装着は医療従事者の指示のもと行ってください。

装着方法

【装着の前に】
汗等により装着感が気になる場合は、必要に応じてタオル、ストッキングを着けてください。


- 1** 全ての面ファスナーを外しておきます。
- 2** 椅子等に浅く腰かけます。
- 3** 装具を広げ、膝の裏側から当てます。この時、サイズ札の付いている方が上部となります。脚の中心(膝蓋骨)の中心と本体窓部を合わせます。
- 4** 面ファスナーを図の順番にコカンに通し、折り返します。

4 面ファスナーの通し方(ニーブレース・ショートの場合)

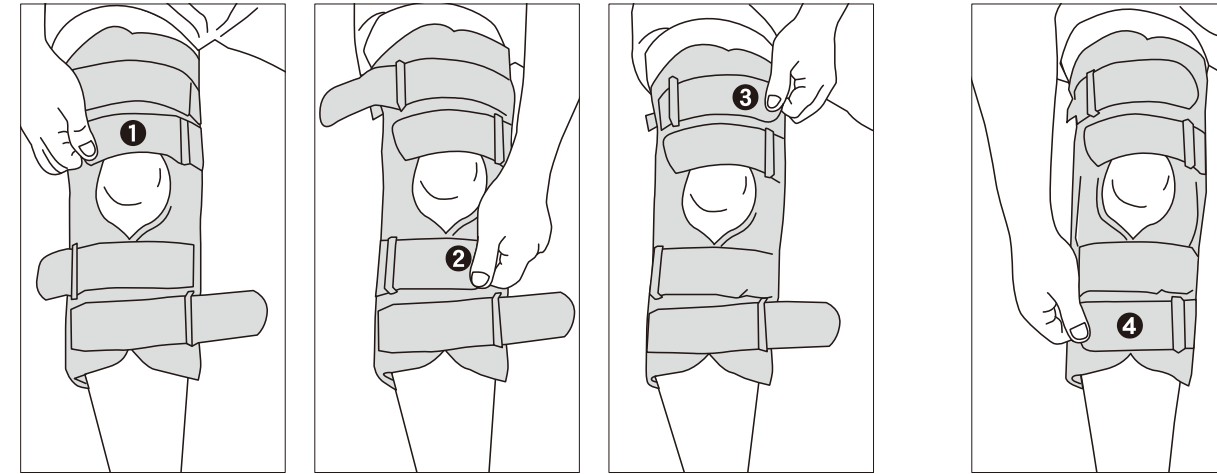

- 5** 装着位置が正しいか、ゆるみがないかを確認してください。
- 6** 装着後、面ファスナーが過度に余るような場合、医療従事者の指示に従い切りすぎに注意をしながら切り取ってください。

4 面ファスナーの通し方(ニーブレース・FX、ニーブレースの場合)

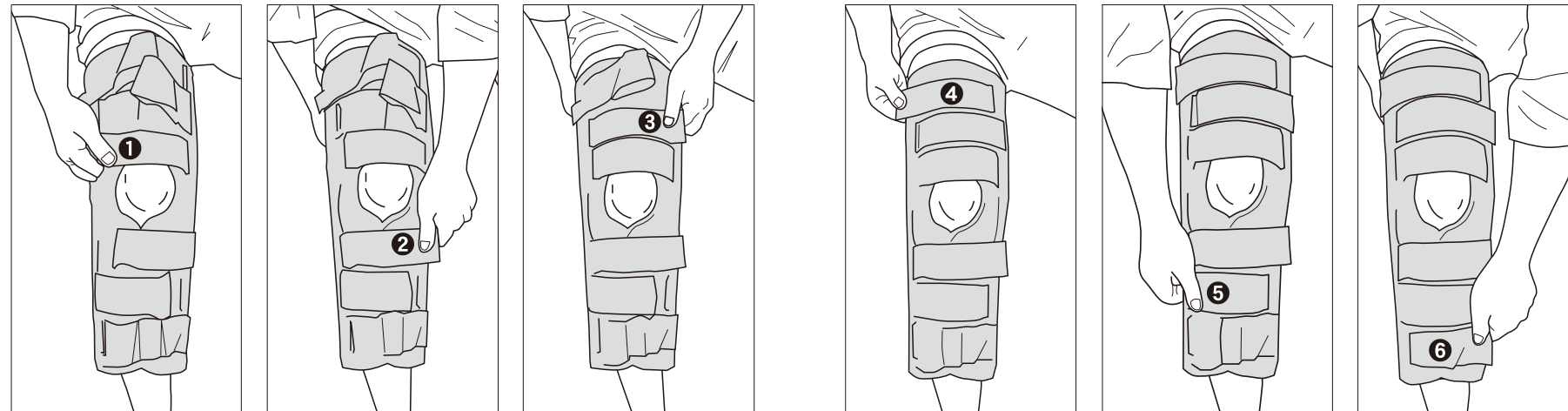

ステーの着脱について

本品のステーカーバーには、バックステー(3箇所・各2枚)とサイドステー(2箇所・各2枚)のステーが内蔵されています。

ステーの取り出し、挿入方法

- ステーカーバーの蓋を外し、ステーを取り出してください。
- 洗濯後の再使用時には必ず全てのステーをステーカーバーの奥まで確実に戻した後、ステーカーバーの蓋を閉め、装着を行なってください。
- バックステーには上下と裏表があります。必ず図に従って挿入してください。

