

ÄLCARE

取扱説明書

- この取扱説明書を熟読の上、商品の特性を十分に理解してからご使用ください。
- 常に、この説明書はお手元に置き、必要に応じてお読みください。

PEG CARE
ペグ ケアー

PEG後用皮膚保護剤
SKIN BARRIER FOR PEG

はじめに

《ペグ ケアー》は、
PEG（経皮内視鏡的胃瘻造設術）後の
周囲皮膚の保護を目的とした、皮膚にやさしい皮膚保護剤です。
安全にお使いいただくために、用途以外のご使用は避け、
この取扱説明書に従ってご使用ください。
なお、商品についてのご不明な点は、下記宛までご連絡ください。


アルケア株式会社 商品相談室

フリーダイヤル 0120-770175

■使用手順

1 必要な《ペグ ケアー》を取り出します。

乳白色のふたを開け、必要な《ペグ ケアー》を取り出します。


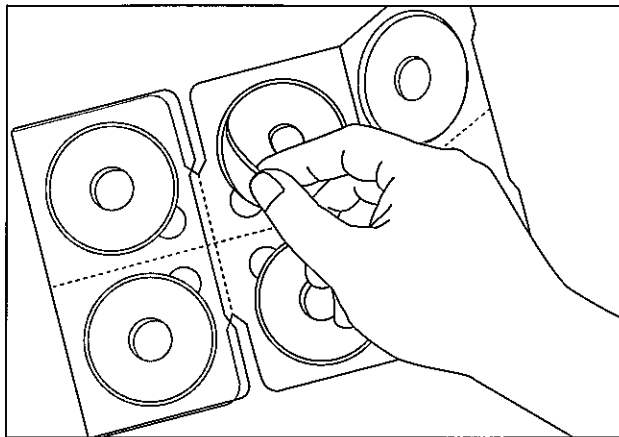


2 皮膚に貼る前に、必要に応じて《ペグ ケアー》にハサミで切れ目を入れてからご使用ください。

必要に応じて切れ目を入れた後、つまみのついた紙を剥がして貼ります。切れ目から体液が漏れるのを防ぐために、切れ目は体の上の方にくるように位置し、十分に押し当てて貼りつけてください。

※取扱いの際は、手に油などが付いていない状態で行ってください。油分の付着は、粘着力低下によるモシの原因となります。

※製品の特性上、貼りつくまで時間がかかります。十分に押し当てて貼りつけてください。特に切れ目を入れたところはしっかりと押し当ててください。

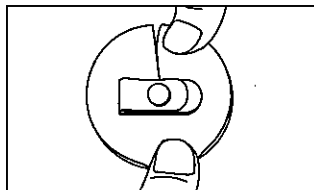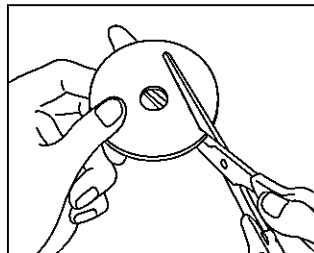

ペグ ケアー交換の際は・・・

万一剥がれにくいときや皮膚に糊が残ったときは、微温湯で十分に湿らせてから、ゆっくり、やさしく取り除いてください。

【使用上のご注意】や【保管上のご注意】では、危険度に応じて次の区分をしています。

⚠警告……誤った取扱いをすると、中程度以上の人身事故が想定される内容を示します。

注意……誤った取扱いをすると、人が軽度の障害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

ご使用前には、専門医の指導を受けた上、注意事項を熟読し、本製品の特性を十分理解してください。誤った取扱いをすると体液のモレが発生し、モレによる皮膚炎の原因ともなります。それらをご注意の上でも、万一肌に合わないときは、ただちにご使用を中止してください。

■使用上のご注意

注意

- 取扱いの際には、手などに油が付いていない状態で行ってください。粘着力低下による剥がれの原因となります。
- 一度剥がしたペグ ケアーを、再使用することはお止めください。粘着力低下による剥がれの原因となります。
- 万一剥がれにくいときや皮膚に糊が残ったときは、微温湯で十分に湿らせてから、ゆっくり、やさしく取り除いてください。
- 万一肌に合わないときは、使用を中止してください。

■保管上のご注意

使用後は、よくフタを閉めて室温で保管してください。保管の際は、次の点を避けてください。

注意

- 高温(40℃以上)・多湿の場所での保管
- 直射日光のあたる場所での保管
- 圧迫がかかる場所での保管
- 縦積みによる保管

■規格

品名	商品コードNO.	規格		1 函入数
		内径	外径	
ペグ ケアー	16261	10mmφ	50mmφ	20枚

アルケア株式会社 〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階

■東京第一営業所 TEL.03-5638-8161 ■札幌営業所 TEL.011-261-1721 ■大阪営業所 TEL.06-6337-2985
■東京第二営業所 TEL.03-5638-8162 ■仙台営業所 TEL.022-715-2733 ■神戸営業所 TEL.06-6337-2985
■首都圏営業所 TEL.048-834-5614 ■名古屋営業所 TEL.052-222-3860 ■広島営業所 TEL.082-831-8777
■首都圏西営業所 TEL.045-472-7511 ■北陸営業所 TEL.076-243-5602 ■福岡営業所 TEL.092-441-8372