

# クイックカバー Quick Cover

シャワー用保護カバー  
Shower Cover

ALCARE

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1  
アルカセントラル19階 〒130-0013  
[www.alcare.co.jp](http://www.alcare.co.jp)

お客様相談室 ☎ 0120-770-175

ALCARE Co., Ltd.

19F, Arcacentral Bldg., 1-2-1 Kinshi,  
Sumida-ku, Tokyo, 130-0013, Japan

MADE IN JAPAN

《クイックカバー》は、シャワー時に末梢カテーテル刺入部およびルート接続部へ直接水がかからないようにカバーする商品です。安全にお使いいただくため用途以外の使用はせず、この取扱説明書に従いご使用ください。商品についてご不明な点は当社お客様相談室までご連絡ください。

## 使用上のご注意

\*[使用上のご注意]では、その危険度に応じて区分をしております。

### 警告 人身事故につながるおそれのある注意事項


- この製品は口ゴムの部分に天然ゴムを使用しています。天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがあります。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、適切な措置を施してください。
- 装着する部位に、傷、発疹等の皮膚疾患のある方はご使用にならないでください。また、血行障害を起こしたことのある方、皮膚の弱い方は使用前に医師にご相談ください。
- 使用中、または使用後に発疹、かゆみ、痛み、うっ血などの異常を感じたときは、速やかに使用を中止し、医師にご相談ください。
- シャワー時以外はカバーを外し、長時間に渡る使用は避けてください。(20分以内が目安)長時間の使用は、うっ血を招くおそれがあります。
- 使用中にカテーテル刺入部やルート接続部が濡れてしまう場合は直ちに使用を中止してください。
- 小児の手の届かない場所に保管してください。
- 高齢者など介助が必要な方は、必ず付き添いの方のもとでご使用ください。

### 注意 物損事故につながるおそれのある注意事項

- カバー内に水が入るおそれがありますので、浴槽につかったり、カバー口周辺にシャワーを直接かけないようにしてください。
- 上腕部側のカバー口が肘関節よりも10cm以上の位置になるように装着してください。
- カバーの内側に汗や結露、カバー口からの伝い水滴が溜まる場合があります。使用の際にはフェイスタオル等の吸水体を腕に巻き、刺入部が水が直接かからないようにご使用ください。
- 万一破損してしまった場合には直ちに使用を中止してください。

## 使用手順

- 1 輸液セットを外し、ヘパリンや生理食塩水によるカテーテルロックの後、テープでカテーテルを腕に固定します。
- 2 固定したカテーテルの上からタオルを巻きます。
- 3 ゴム2本の側を手首側にして、タオルがカバーの内側に収まるようにタオルの上からカバーをかぶせます。

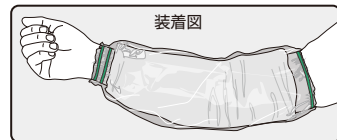

## 取扱上のご注意

- 組成・成分表示**
- 本体カバー：エチレン-メチルアクリレート共重合体
  - 口ゴム：天然ゴム
- 廃棄方法**
- 上記組成・成分に関する各自自治体の廃棄区分に従ってください。
- 取扱方法**
- 繰り返し使用する場合はカバーについた汚れや石けん、水、汗等をよく拭き取り、乾燥させてからご使用ください。
  - 乾燥は、屋内で陰干ししてください。
  - 高温によりカバーが劣化するおそれがあります。暖房器具やアイロン、ドライヤーなど高温になるものの近くに置かないでください。
- 保管方法**
- 水濡れに注意し、直射日光および高温多湿を避けて、室温保管してください。

このパッケージは再生紙を使用しています This package is made of recycled paper.

