

クイックフィックス®・N

Quickfix-N

カテーテル固定補助テープ
Catheter Fixation Assisted Tape

取扱説明書

- ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みの上、商品の特性を十分に理解してからご使用ください。
- 常にこの取扱説明書をお手元に置き、必要に応じてお読みください。

▶ お客様相談室 ☎ 0120-770-175
www.alcare.co.jp

はじめに

《クイックフィックス・N》は、カテーテル・チューブ(以下カテーテル)管理において、従来、粘着テープで行われてきた準備・加工・操作にかかる時間を軽減するため、鼻挿入部のライン部固定補助を目的に設計された加工済みテープです。安全にお使いいただくために上記用途以外には使用せず、この取扱説明書に従いご使用ください。

使用上のご注意

*[使用上のご注意]では、その危険度に応じて次の区分をしております。

警告 人身事故につながるおそれのある注意事項

- 固定したカテーテルが継続的に皮膚に接触・圧迫していると潰瘍となるおそれがあります(特に鼻腔周辺部など)。よく観察を行い、固定の位置や方向を適宜変更してください。
- 体動や体位変換などによりカテーテルに強い負荷がかかった場合、本品の剥がれおよびカテーテルが抜ける危険があります。カテーテルに負荷がかからないように注意してください。

適応上の注意 製品特性上の注意事項

- 本品はアクリル系粘着剤を使用しており、シリコーン素材に対しては十分な固定力が得られないおそれがありますので、シリコーン製カテーテルの固定の際には十分ご注意ください。
- 本品には別記(種類と規格参照)の通り「適応カテーテルサイズ」がありますので、それに従いご使用ください。

一般的な注意 使用方法を含む注意事項

- 本品をハガレ・浮き上がり・シワがないように貼付してください。また、貼付や患者の状態(意識の有無、治療の必要性の理解度、安静度、体動の有無や程度、留置部位など)を適宜観察し、剥がれなどが発見された場合には、直ちに新しい本品に貼りかえてください。

- 皮膚に障害が発生する可能性がありますので、同一品の長期貼付は避け、適宜新しい本品と交換してください。
- 十分な固定力が得られないおそれがありますので、著しく乾燥している皮膚にはご使用にならないでください。
- 汗・皮脂分・汚れなどにより粘着力が低下するおそれがありますので、貼付部は清潔に保ってください。また、清拭剤が使われる際は、テープ剥がれの原因にならないことをご確認のうえ、ご使用ください。
- 本品は、水に濡れた状態および湿度の高い環境下では粘着力が低下するおそれがありますのでご使用にならないでください。
- 本品にベンジン・エタノールなどの有機溶剤が付着すると粘着剤が溶解することがありますので、有機溶剤の取り扱いには十分ご注意ください。
- 皮膚障害の原因となりますので、貼付の際は本品を引っ張って貼付しないでください。
- 本品の使用により、発疹・発赤・かゆみなどが生じた場合には使用を中止し、適切な処置を行ってください。
- 本品を皮膚から剥離する際は、皮膚が変形しないように皮膚を押さえながらゆっくりと剥がしてください。
- 本品の表面にはポリエチレンネットを使用しておりますので、高圧蒸気滅菌は避けてください。

ALCARE

廃棄上のご注意

- 使用方法により、適切な廃棄を行ってください。

保管上のご注意

- 水濡れに注意し、直射日光および高温・多湿を避けて、室温保管してください。

種類と規格

種類	商品コードNo.	規格	
		サイズ	適応カテーテルサイズ
N2号	20361	2.5cm×8.5cm	18Fr以下

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825

www.alcare.co.jp

