

# SACRO MESH-EX サクロメッシュ・EX

パッケージの裏面に記載されている内容です。

“サクロシリーズ”は、腰部固定帯として開発されています。ご使用にあたっては、必ず医師にご相談のうえ正しくお使いください。また、安全にお使いいただくため用途以外の使用はせず、この取扱説明書に従いご使用ください。この取扱説明書はお手元に置き、必要に応じてお読みください。なお、商品についてご不明な点はお客相談室までご連絡ください。

## 取扱上のご注意

<ご使用前に>

●本品の適応範囲は、右記の表の通りとなっています。装着者本人のサイズをご確認のうえ、ご使用ください。

<ご使用中に>

- 何らかの原因により、本体および各部品が破損した場合は、直ちに使用を中止してください。
- ズレやゆるみ、過度の圧迫などが無いよう装着してください。使用中、ズレやゆるみ、過度の圧迫などが発生したら直ちに正しく装着し直してください。ズレやゆるみ、過度の圧迫などがあると確実な保持性が得られず、症状を悪化させる危険性がありますので十分ご注意ください。

種類	商品コードNO.	規格		1袋入数
		腰回	ウエスト回	
3L	18141	105~120cm	95~115cm	1コ
LL	18142	95~110cm	85~105cm	1コ
L	18143	85~100cm	75~95cm	1コ
M	18144	75~90cm	65~80cm	1コ
S	18145	65~80cm	55~70cm	1コ

**採寸の仕方**


●腰回（腸骨の周囲）を計測してください。  
●サイズの選定は腰回を基準とし、ウエスト回は目安としてください。  
※2つのサイズにまたがる場合は、大きいサイズをお選びください。

## 使用手順

<ご使用前に>

●腰部を支持するステーは、腰のラインにフィットするようあらかじめ曲線形状となっています。無理に曲げようとすると破損するおそれがありますのでご注意ください。

- 1 本体ベルトから補助ベルト面ファスナーを外しておきます。サイズ札の付いている部分が内側上方となるよう、本体ベルトを腰部にあてます。
- 2 中央2本のステーで背骨を挟み、また腰部を十分に覆えるよう位置を調整した後、本体ベルトを腹部側に回し、下腹部を持ち上げるように本体面ファスナーでとめます。
- 3 同様に2本の補助ベルトを腹部側に回し、十分引張りながら下腹部を持ち上げるように補助ベルト面ファスナーでとめます。  
※面ファスナーはそれぞれしっかりと押しとめてください。きちんととめていない場合は外れるおそれがあります。

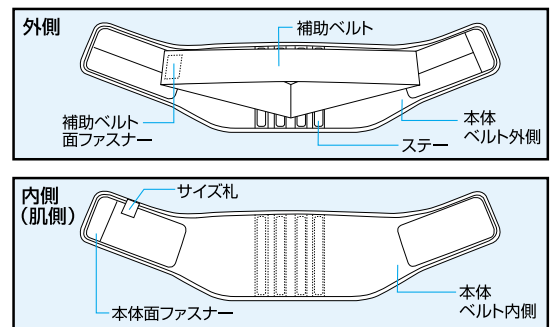

## 組成・成分表示

●ナイロン・ポリウレタン・ポリエステル・ポリプロピレン

## 廃棄方法

●上記組成・成分に関する各自治体の判別方法に従ってください（プラスチックを分別する必要がある場合は本体ベルトをハサミなどで切り、背面のステーを取り出してください）。

## 保管上のご注意

●水濡れに注意し、直射日光および高温多湿を避けて、室温保管してください。

## 洗濯時のご注意

- 30℃以下の水で中性洗剤を使用し、手洗いしてください。
- 漂白剤、洗濯機、乾燥機の使用、アイロン、ドライクリーニングは避けてください。
- 洗濯後は陰干しし、十分乾燥させてください。



MADE IN JAPAN

アルケア株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階

ALCARE Co.,Ltd.

19F, Arcacentral Bldg. 1-2-1 Kinshi, Sumida-ku Tokyo 130-0013, Japan <http://www.alcare.co.jp>

お客様相談室 ☎0120-770175

## 使用上のご注意

**警告** 人身事故につながるおそれのある注意事項

- 本品の使用に際しては、必ず上記使用手順および医師の指示に従ってください。
- 本品は単回使用製品です。1名に使用した本品は、再使用しないでください。
- 上記使用手順を参考に、必ず正しい位置に装着してください。
- 本品の使用により、しびれ、痛みなどの異常を感じたときは、速やかに使用を中止し、医師に相談のうえ指示に従ってください。
- 本品は化繊を使用しておりますので、本品のご使用によりかぶれなど何らかの異常が生じた場合には、使用を中止してください。
- 使用中、本体からステーが飛び出す場合があります。その際は直ちに使用を中止してください。
- 面ファスナーは表面が鋭利なため、柔らかい物などに傷を付けるおそれがあります。
- 本品をご使用の際は必ず下着などの上から装着してください。
- 長期間の使用や使用状況によっては破損する場合があります。破損した場合は速やかに使用を中止してください。
- 本体ベルトや補助ベルトで体を過度に圧迫しないようにしてください。強く締めすぎると血行障害やしびれ、ムレなどを生じる場合があります（本品は多種の部品を縫製して作られており、長時間の使用や使用状況によっては、ムレや圧迫感、かゆみなどを感じる場合があります）。
- 装着部に傷、腫れ、湿疹などがある場合には使用しないでください。
- 夜間就寝時の使用は、医師の指示に従って装着してください。
- 本品は改造しないでください。

**注意** 物損事故につながるおそれのある注意事項

- 面ファスナーやステーを着衣に引っ掛けないようご注意ください。
- 硬質のステーを使用しておりますので、洗濯機や乾燥機などを使用せず、手洗いしてください（洗濯機や乾燥機の使用によって本品が破損したり、洗濯機、乾燥機が故障する場合があります）。