


取扱上のご注意(その1)

ご使用前に

- 本品の適用範囲は、下記の表の通りとなっています。装着するサイズを確認の上で使用ください。サイズは胸囲を基準とし、図の位置を計測して選択してください。

※2つのサイズにまたがる場合には、大きいサイズをお選びください。

サイズ	適用範囲 胸囲
L~LL	95~133cm
M~L	77~115cm

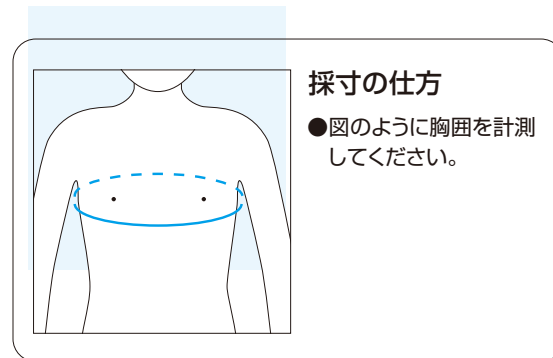

採寸の仕方

- 図のように胸囲を計測してください。

ご使用中に

- 長期の使用により本体およびベルト等の各部品が破損する場合があります。破損した場合は使用を中止してください。そのまま使用すると確実な保持性が得られないだけでなく、装着者本人や他の人を傷つける可能性があります。
- 使用中ズレ、ゆるみが発生したら正しく装着し直してください。ズレ、ゆるみがあると確実な保持性が得られません。

取扱上のご注意(その2)

洗濯方法

- 30℃以下の水で中性洗剤を使用し、手洗いしてください。
- 漂白剤、乾燥機の使用、アイロン、ドライクリーニングは避けてください。
- 洗濯後は陰干してください。

廃棄方法

- 本品は布製品です。通常可燃物として廃棄してください。(地域により異なる場合もありますので、詳しくは各自治体へご確認ください。)

アルケア株式会社 〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825 http://www.alcare.co.jp

東京第一営業所 TEL.03-5638-8161 札幌営業所 TEL.011-261-1721 大阪営業所 TEL.06-6337-2985
東京第二営業所 TEL.03-5638-8162 仙台営業所 TEL.022-715-2733 神戸営業所 TEL.06-6337-2985
首都圏東営業所 TEL.048-834-5614 名古屋営業所 TEL.052-222-3860 広島営業所 TEL.082-233-8777
首都圏西営業所 TEL.045-472-7511 北陸営業所 TEL.076-243-5602 福岡営業所 TEL.092-441-8372

INTERNATIONAL SALES DIVISION TEL.81-3-5611-7819 ■アルケア医工学研究所 ■千葉工場 ■オストメイトサービスセンター

0804

ÄLCARE

取扱説明書

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、商品の特性を十分に理解してからご使用ください。
- 常に、この取扱説明書はお手元に置き、必要に応じてお読みください。

SHOULDER BRACE-IR ショルダーブレース・IR

 内旋位肩関節保持具
SHOULDER IMMOBILIZER IN INTERNAL ROTATION

はじめに……

《ショルダーブレース・IR》は、肩関節内旋用に開発された肩関節保持具です。腕つりと胴ベルトの組み合わせにより、肩関節の内旋保持を高め、安全にお使いいただくため、用途以外の使用はせずこの取扱説明書に従いご使用ください。尚、商品についてご不明な点は下記までご連絡ください。

●アルケア株式会社 商品相談室
フリーダイヤル0120-770175

使用上のご注意

*【使用上のご注意】では、その危険度に応じて次の区分をしております。


警告 人身事故につながる恐れのある注意事項

- 本品の使用に際しては、必ず取扱説明書の使用手順および医師の指示に従ってください。
- 本品は単回使用製品です。1名に使用した本品は、再使用しないでください。
- 本品は化繊を使用しておりますので、本品の使用によりかぶれなど何らかの異常が生じた場合には、使用を中止してください。
- 長期間の使用や使用状況によっては破損する場合があります。破損した場合は速やかに使用を中止してください。
- 胴ベルト、肩ベルトで体を過度に圧迫しないようにしてください。強く締めすぎると血行障害やしびれなどを生じる場合があります。
- 使用中ズレやゆるみが生じた場合は、正しく装着し直してください。
- 装着部に傷、腫れ、湿疹などがある場合には使用しないでください。
- 夜間就寝時および入浴時の使用は、医師の指示に従って装着してください。

注意 物損事故につながる恐れのある注意事項

- 使用後は、風通しのよい場所に保管してください。
- 面ファスナーを着衣に引っかかないようご注意ください。
- 保管に際しては、車の中など高温になる場所には置かないでください。

各部の名称

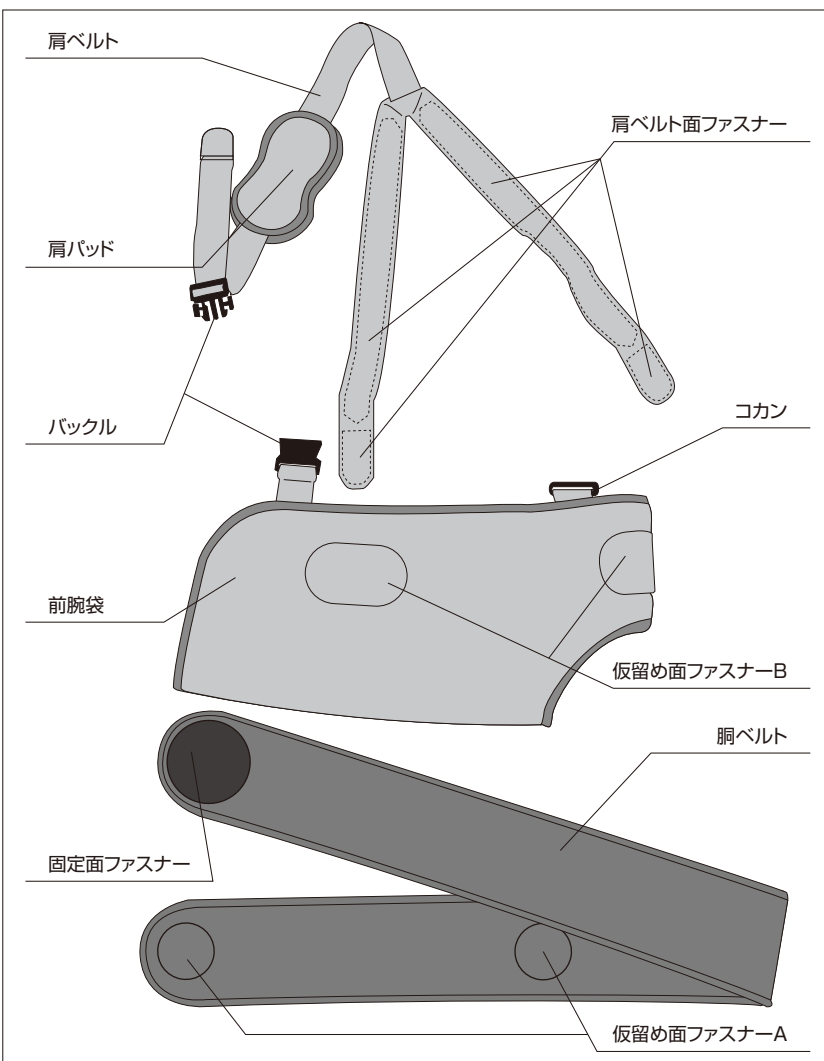


製品仕様およびデザインは、品質改良にともない変更する場合がございます。それにより、イラストと実際の製品とで若干の違いが生じる場合がございますことをご了承ください。


使用手順

装着の準備をします。


1 肩ベルト面ファスナーを前腕袋のコカンにそれぞれ通し、仮留めをします。

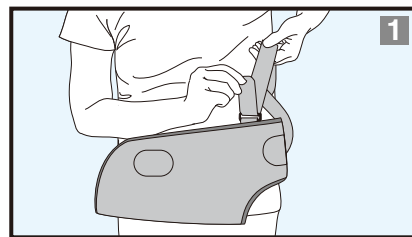


2 肩ベルトと前腕袋のバックル同士をはめ合わせます。

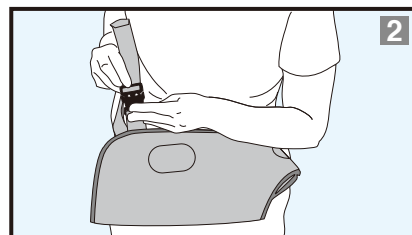

3 胸ベルトの仮留め面ファスナーAを前腕袋の仮留め面ファスナーBにとめます。

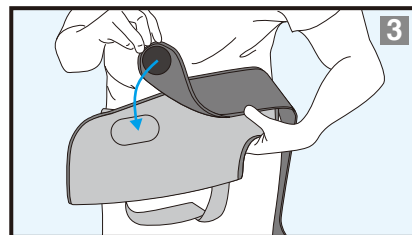

4 各部が一体になれば、準備は完了です。各ベルトは長めに調整しておきます。

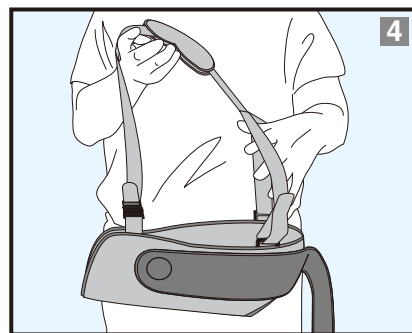


保持具を装着します。

1 イラストのように前腕袋に前腕を入れます。このとき、肩ベルトのY字部分の間に上腕を入れ、肩部に肩ベルトの交差している部分が当たるようにします。






2 前腕袋に前腕を確実に入れ、肘部を前腕袋の孔から出したら、肩ベルトを首にかけます。
●肩ベルトを首に掛けづらい場合は、バックルをはずして掛け直してください。

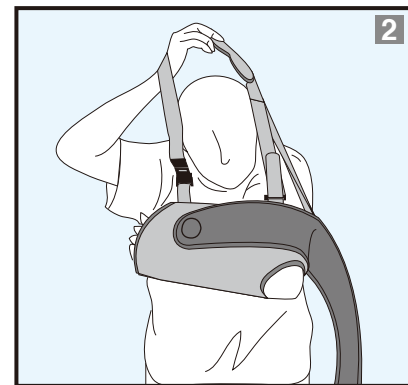



3 バックルから出た肩ベルトを上につっぱりながら、肘が90°程度に曲がるように調整します。

4 コカンに通した前面の肩ベルト面ファスナーをとめ直し、肩ベルトを肩にフィットさせます。



5 頸部で肩ベルトの当たりが気になる部分に肩パッドの位置を調整します。

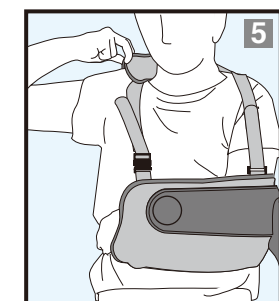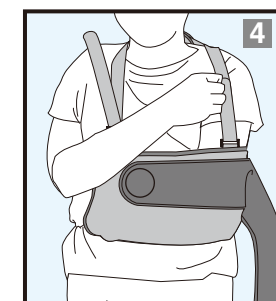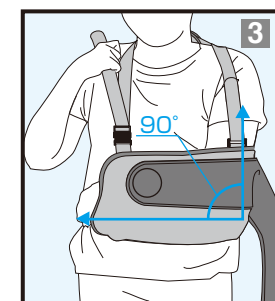

6 胸ベルトを背面から前面に回して固定面ファスナーでとめ、腕を体幹に固定します。

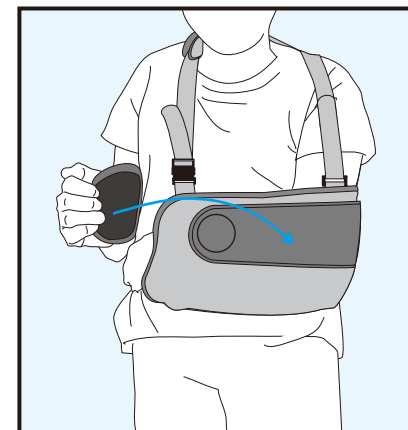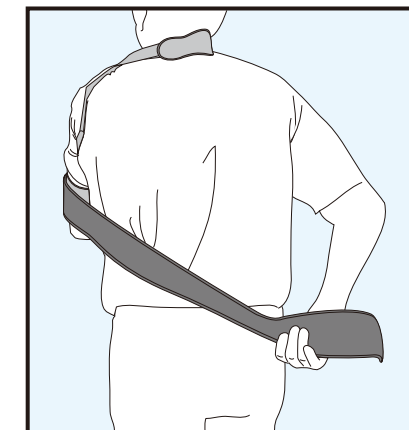

装着完了

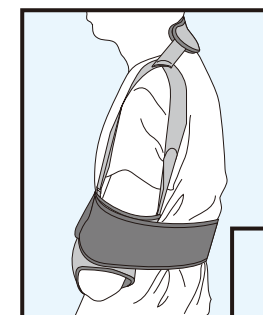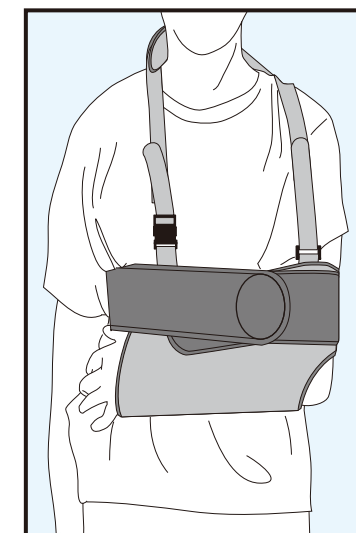

●肩ベルト、胸ベルトの締め付けすぎにご注意ください。

