

\*\*2008年12月12日(第3版)  
\*2007年6月22日(第2版)

医療用品 5 副木  
一般医療機器 35357000 単回使用パッド入り副木

## ジェンテック スプリント

再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

#### 1. 使用方法

再使用禁止

#### \*2. 併用医療機器【相互作用の項参照】

磁気共鳴画像診断装置 (MRI装置)


### 【形状・構造及び原理等】

#### 1. 種類・規格

種類	規格
LL	30mm × 120mm × 1,130mm
L	25mm × 100mm × 830mm
M	20mm × 90mm × 720mm
S	20mm × 80mm × 630mm
SS	20mm × 70mm × 510mm
3S	20mm × 60mm × 410mm
4S	20mm × 45mm × 320mm
5S	20mm × 45mm × 215mm
6S	20mm × 60mm × 200mm

#### 2. 構造

< 模式図 >

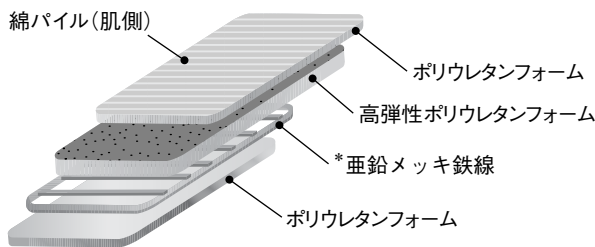

#### 3. 原理

鉄線フレームが患部形状に合わせる為の成形加工性と患部を固定する為の剛性および強度を有し、鉄線フレームがポリウレタンフォームで被覆されている事により、単回使用パッド入り副木として機能する。

### 【使用目的、効能又は効果】

骨折や挫傷等の固定に用いられる。

### \*\*【品目仕様等】

患部を固定できる剛性と強度を有する。

### 【操作方法又は使用方法等】

#### 1. 適応サイズの選定

患部に応じて適切なサイズの本品を選定します。

#### 2. 装着方法

\*1) 本品を曲げ、患部の形状に合うように成形します。その際綿パイル面が肌側に当たるようにしてください。また固定部位の形状に合わせて曲げ加工を行う際は、健肢で行ってください。

2) 本品が患部にフィットしていることを確認し、弾力包帯等を使用して患部に固定します。

#### 3. 使用方法に関連する使用上の注意

\*1) 同一箇所を繰り返し(概ね10回以上)曲げないでください。副子を構成している鉄線が破損するおそれがあります。

2) 本品はディスポーザブル製品なので、装着中に本品の破損及び著しい汚損が認められる場合には、新しい本品と交換してください。

3) 弾力包帯等で本品を固定する際は、きつく巻きすぎないでください。(血流障害や神経障害が起こる可能性があります。)

### 【使用上の注意】

#### 1. 使用注意(次の患者には慎重に適用すること)

患部に皮膚障害(感染創、潰瘍、発疹、腫脹等)がある患者。本品を使用する場合は、局所管理を十分に行い、慎重に使用してください。

[症状を悪化させるおそれがあります。]

#### 2. 重要な基本的注意

1) 必ず綿パイル面を肌側に当ててください。

2) 本品使用中に、痛み、しびれ等の症状がありましたら、直ちに医師に連絡するよう患者に指導ください。

3) 本品使用中に皮膚障害と思われる症状が認められた場合は、直ちに使用を中止し、適切な処置をしてください。

#### \*3. 相互作用【併用禁忌・禁止】(併用しないこと)

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
磁気共鳴画像診断装置 (MRI装置)	MRI検査を行うときは、患者から取り外すこと	本品の金属部がMRI装置から発生する無線高周波による誘導電流で発熱し、火傷のおそれがある。また磁力による影響による引き付けにより、怪我のおそれがある。

#### 4. その他の注意

\*1) 開封後、著しく黄変が進んだ本品は、使用しないでください。

[クッション性が低下し、痛み等を起こす可能性があります。]

2) 本品装着中に破損、変形、汚染等がある場合は使用しないでください。

3) 装着中の本品に直接水がかからないようご注意ください。[皮膚の表面が長時間ぬれた状態になると、皮膚かぶれ等を起こす可能性があります。]

### 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

#### 1. 貯蔵・保管方法

水ぬれを避けてください。直射日光及び高温多湿を避けて、室温保管してください。

#### 2. 使用期限

パッケージに表示。(自己認証データによる)

### 【包装】

1箱に6本入り。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

#### 1. 製造販売業者

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階

#### 2. 連絡先

アルケア株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階

お客様相談室 : ☎ 0120-770175