


คู่มือการใช้งาน


ชื่อเครื่องมือแพทย์ : ท่อเชื่อมต่อสำหรับปากระบบทางเดินปัสสาวะ

คำอธิบายเครื่องมือแพทย์ : ใช้ในการเชื่อมต่อถุงทวารเทียมสำหรับระบบทางเดินปัสสาวะไปยังถุงเก็บปัสสาวะ

[รูปโฉมภายนอก]

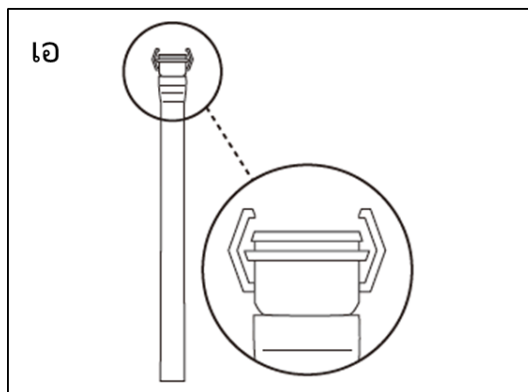

(คอนเนคเตอร์ ทิวปี-เอ)

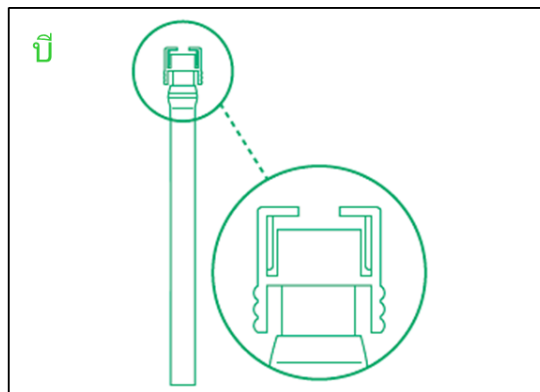

(คอนเนคเตอร์ ทิวปี-บี)

[ขนาดสินค้า]

รหัสสินค้า	ชนิด (ขนาด ฯลฯ)	เพิ่มความยาว	จำนวนต่อกล่อง
19451	คอนเนคเตอร์ ทิวปี-เอ	135mm	10 ชิ้น
19452	คอนเนคเตอร์ ทิวปี-บี	140mm	

[สีของสินค้า] คอนเนคเตอร์ ทิวปี-เอ

	สี
ตัวเชื่อมต่อ	สีขาว
หลอด	เคลือบด้านใส


[สีของสินค้า] คอนเนคเตอร์ ทิวปี-บี

	สี
ตัวเชื่อมต่อ	สีขาว
หลอด	เคลือบด้านใส

วัตถุประสงค์การใช้งาน : ท่อเชื่อมต่อที่ใช้ในการเชื่อมต่อถุงทวารเทียมสำหรับระบบทางเดินปัสสาวะไปยังถุงเก็บปัสสาวะ


1. ขั้นตอนการใช้งาน [คอนเนคเตอร์ ทิวปี-เอ]

(1) เสียบหัวต่อ

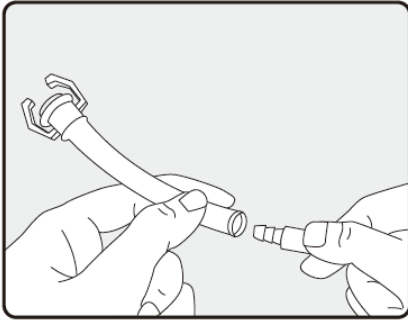


- เสียบหัวต่อของถุงเก็บปัสสาวะเข้ากับท่อเชื่อมทางด้านปลายท่อ

(2) เสียบท่อเชื่อม

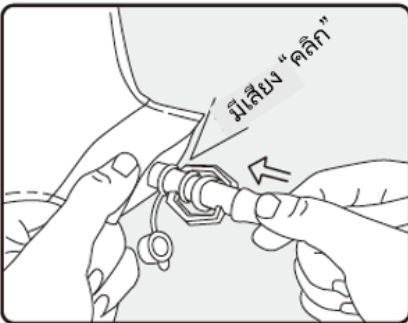

- นำท่อเชื่อมเสียบกับถุงทวารเทียมที่ถอดเฉพาะฝาครอบออกให้แน่นจนกว่าจะมีเสียง "คลิก"

(3) ถอดท่อเชื่อม

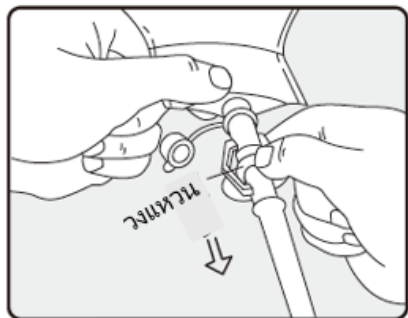


- เมื่อถอดท่อเชื่อม กดส่วนที่เป็นห่วงลงไว้และดึงท่อเชื่อมออก

[คอนเนคเตอร์ ทิวปี-บี]


(1) วิธีต่อท่อเชื่อม

1) เสียบหัวต่อ

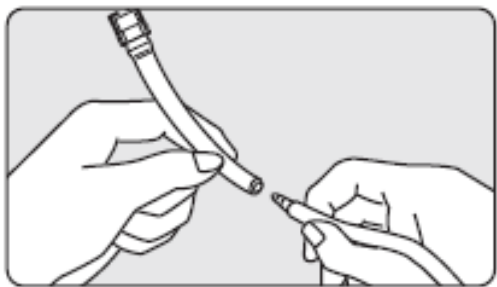


- เสียบหัวต่อของกึ่งเก็บปัสสาวะเข้ากับท่อเชื่อมทางด้านปลายท่อ

2) เสียบท่อเชื่อม

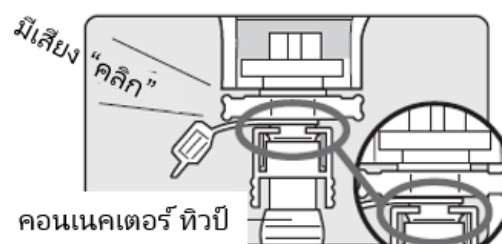

- นำท่อเชื่อมเสียบกับกึ่งทวารเทียมที่ถอดเฉพาะฝาครอบออกให้แน่นจนกว่าจะมีเสียง "คลิก"
- เมื่อเสียบเสร็จตรวจสอบว่าเขี้ยวของท่อเชื่อมเกี่ยวเข้ากับขั้วลวดกึ่งทวารเทียมอย่างสมบูรณ์หรือไม่


3) หมุนก้านเปิดปิด

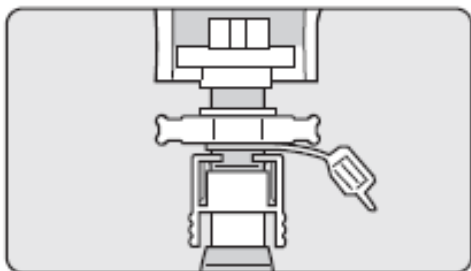

- หมุนก้านเปิดปิด 180 องศา (ตามเข็มนาฬิกาเมื่อดูจากด้านบน)
- ระบายปัสสาวะออกจากกึ่งทวารเทียมผ่านท่อเชื่อมเข้าไปยังกึ่งเก็บปัสสาวะ


(2) วิธีถอดท่อเชื่อม

1) หยุดการระบายปัสสาวะ

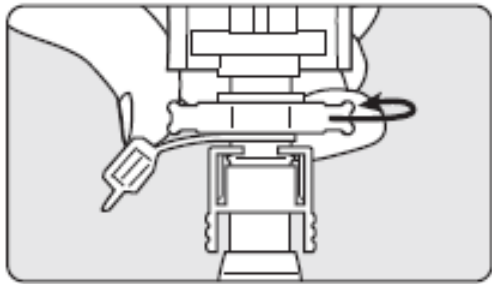


- หมุนก้านเปิดปิด 180 องศา (ทวนเข็มนาฬิกาเมื่อดูจากด้านบน)
- หยุดการระบายปัสสาวะออกจากถุงทวารเทียมผ่านท่อเชื่อมเข้าไปยังถุงเก็บปัสสาวะ

2) ดึงท่อเชื่อมออก

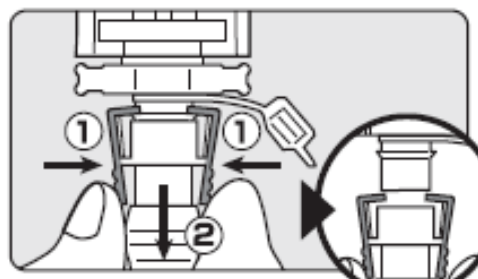

- ใช้นิ้วบีบปีกของท่อเชื่อม
- ให้เขี่ยวาล์วคลายล็อก
- ค่อย ๆ ดึงท่อเชื่อมออก

3) ใส่ฝาครอบ

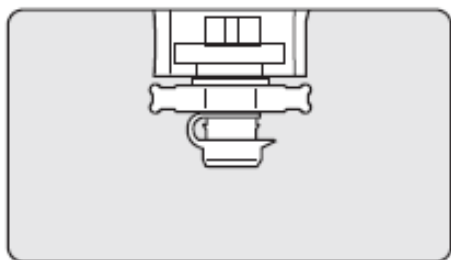

- ใส่ฝาครอบปิดช่องระบายของถุงทวารเทียม

2. ข้อควรระวังในการใช้งาน

- ไม่ควรใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์การใช้งาน
- ควรใช้ตามคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ทวารเทียมที่จะใช้กับผลิตภัณฑ์นี้
- กำจัดตามข้อบ่งชี้ห้องทิ้งที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
- ไม่ใช่แบบใช้แล้วทิ้ง แต่โปรดแทนที่ด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ก่อนที่มันจะแตก

3. เงื่อนไขการเก็บรักษา

- ไม่ควรเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูง
- ไม่ควรเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิต่ำ (เช่น ตู้เย็น)
- ไม่ควรเก็บในที่ที่มีแสงแดดส่องถึง
- ไม่ควรเก็บเป็นเวลานาน

4. เครื่องหมาย (สัญลักษณ์)

SYMBOLS	
	Expiry Date ... (1)
	Lot number ... (2)

(1) วันหมดอายุ : ห้ามใช้งานหากเกินวันหมดอายุนี้

(2) ล็อตการผลิต : เลขที่แสดงครั้งที่ผลิต

[ข้อมูลผู้นำเข้า]

ผู้นำเข้า : บริษัท มารูเบน (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ : เลขที่ 548 อาคารวัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ ชั้น 32-33 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 02 256 6900

[ข้อมูลผู้ผลิต]

ผู้ผลิต : บริษัท อัลแคร่ จำกัด

ที่อยู่ : ชั้น19 อาคาร อาร์คาเซ็นทรัล ,1-2-1 คินซี , ซิมิตะ-คู,โตเกียว,130-0013,เจแปน

- อ่านคู่มือการใช้งานนี้และทำความเข้าใจคุณสมบัติของสินค้าให้ดีก่อนใช้งาน
- โปรดเก็บคู่มือการใช้งานนี้ไว้ในบริเวณที่หยิบได้ง่ายตลอดเวลาเพื่อใช้อ้างอิงได้ตามความจำเป็น