

คู่มือการใช้งาน

ชื่อเครื่องมือแพทย์ : ออสโตมี คลิป

คำอธิบายเครื่องมือแพทย์ : คลิปปิดปลายเปิดกระดูกทวารเทียมสำหรับระบบทางเดินอาหาร

[รูปโฉมภายนอก]



[ขนาดสินค้า]

รหัสสินค้า	ชนิด (ขนาด ฯลฯ)	เต็มความยาว	จำนวนต่อกล่อง
19461	<ไม่มี>	103mm	10 ชิ้น

[สีของสินค้า]



* ธรรมชาติ (สีขาวใส)

วัตถุประสงค์การใช้งาน : ใช้ปิดปลายเปิดกระดูกทวารเทียมสำหรับระบบทางเดินอาหาร


1. ขั้นตอนการใช้งาน

(1) วิธีใช้คลิป

1) เปิดคลิปโดยกดสตอปเปอร์ (ส่วนที่เกี่ยว) ไว้และดึงขึ้น
เมื่อเปิดคลิปแล้วควรระมัดระวังไม่ให้ส่วนที่เป็นจุดพับบิดงอ

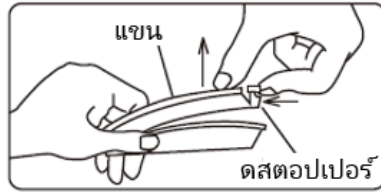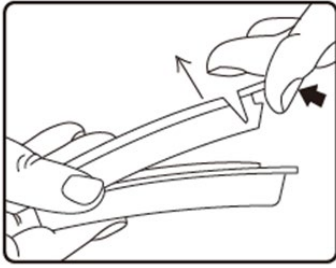


2) พันปลายถุงหาวารเทียบกับแขนของคลิป (ส่วนที่ดึงขึ้น) 1 รอบ
หันคลิปให้ส่วนโค้งของคลิปเข้ากับร่างกาย

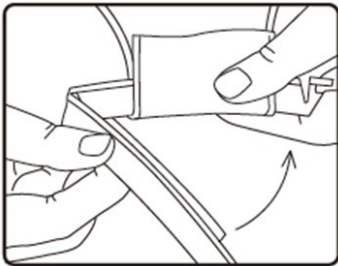


3) กดสตอปเปอร์ไว้และปิดคลิป

สุดท้ายตรวจสอบคลิปว่าปิดสนิทอยู่หรือไม่

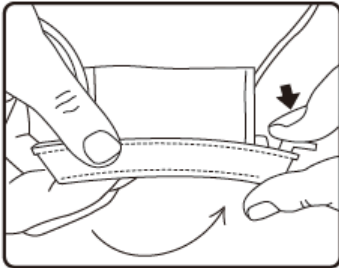


(2) วิธีจัดการอุจจาระ

1) ถอดคลิปโดยกดสตอปเปอร์และดึงคลิปลง


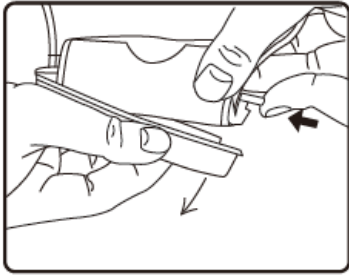


2) พับปลายถุงทวารเทียมขึ้นไว้ด้านนอกและระบายอุจจาระออก

*ป้องกันไม่ให้มือเปื้อนและกลิ่นเหม็นรั่วออกได้เนื่องจากปลายถุงทวารเทียมไม่สัมผัสกับอุจจาระ

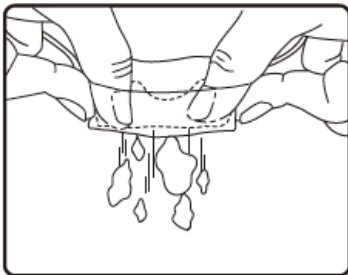

3) ดึงปลายถุงทวารเทียมที่พับขึ้นไว้ลงมาให้เป็นสภาพเดิมและปิดคลิป

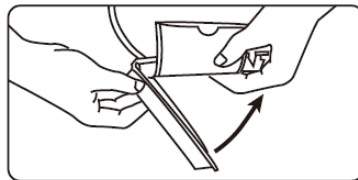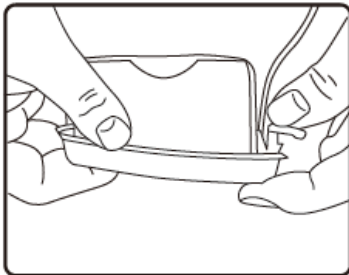

2. ข้อควรระวังในการใช้งาน

- ไม่ควรใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์การใช้งาน
- ควรใช้ตามคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์สโตมาที่จะใช้กับผลิตภัณฑ์นี้
- กำจัดตามข้อบังคับท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
- ไม่ใช่แบบใช้แล้วทิ้ง แต่โปรดแทนที่ด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ก่อนที่มันจะแตก

3. เงื่อนไขการเก็บรักษา

- ไม่ควรเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูง
- ไม่ควรเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิต่ำ (เช่น ตู้เย็น)
- ไม่ควรเก็บในที่ที่มีแสงแดดส่องถึง

4. เครื่องหมาย (สัญลักษณ์)

SYMBOLS	
	Expiry Date
	Lot number

...(1)

...(2)

(1) วันหมดอายุ : ห้ามใช้งานหากเกินวันหมดอายุนี้

(2) ล็อตการผลิต : เลขที่แสดงครั้งที่ผลิต

[ข้อมูลผู้นำเข้า]

ผู้นำเข้า : บริษัท มารูเบน (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ : เลขที่ 548 อาคารวัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ ชั้น 32-33 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 02 256 6900

[ข้อมูลผู้ผลิต]

ผู้ผลิต : บริษัท อัลแคร่ จำกัด

ที่อยู่ : ชั้น19 อาคาร อาร์คาเซ็นทรัล ,1-2-1 คินซี , ซิมิตะ-คู,โตเกียว,130-0013,เจแปน

●อ่านคู่มือการใช้งานนี้และทำความเข้าใจคุณสมบัติของสินค้าให้ดีขึ้นก่อนใช้งาน

●โปรดเก็บคู่มือการใช้งานนี้ไว้ในบริเวณที่หยิบได้ง่ายตลอดเวลาเพื่อใช้อ้างอิงได้ตามความจำเป็น