

คู่มือการใช้งาน

ชื่อเครื่องมือแพทย์: โพรแคร่เพสท์

คำอธิบายเครื่องมือแพทย์: ผลิตภัณฑ์ปกป้องผิวหนังชนิดครีม

[รูปโฉมภายนอก]



[ขนาดสินค้า]

รหัสสินค้า	มาตรฐาน (น้ำหนัก)	จำนวนต่อกล่อง
14431	50g ต่อขวด	1 ชิ้น


[สีของสินค้า]

	สี
ผสมผสาน	สีน้ำตาล
องหมด	สีขาว

วัตถุประสงค์การใช้งาน : เพิ่มการติดแน่นระหว่างผลิตภัณฑ์ปกป้องผิวหนังชนิดต่าง ๆ กับผิวหนังให้สูงขึ้น
รวมทั้งลดปัญหาผิวหนังที่เกิดจากการรื้อออกของสิ่งขับถ่าย


1. ขั้นตอนการใช้งาน

(1) ก่อนใช้

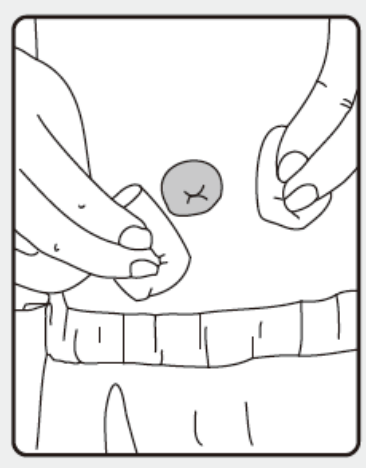


- ใช้กระดาษหิซซูเช็ดสิ่งขับถ่ายที่ติดอยู่ที่บริเวณรอบทวารเทียมออกให้เรียบร้อย
 - ทำให้ผ้าก๊อชเปียกชื้นและถูสบู่ให้เกิดฟองเพียงพอ
ใช้ผ้าก๊อชข้างต้นเช็ดบริเวณรอบทวารเทียมให้สะอาดเรียบร้อย
 - ใช้ผ้าก๊อชผืนใหม่ที่ได้แช่ในน้ำอุ่นล้างสบู่ออกให้เรียบร้อย
หิ้งไว้ให้แห้งเอง
- *ไม่ควรใช้เครื่องเป่าผมเนื่องจากทวารเทียมมีความละเอียดอ่อนต่อการกระตุ้นจากลมร้อนของเครื่องเป่าผม

(2) เปิดซีลของหลอด

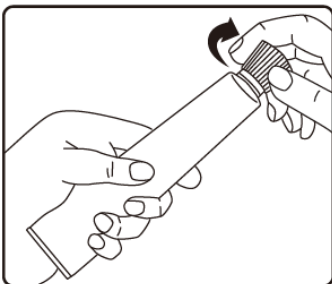


ฝา (องหลอด)

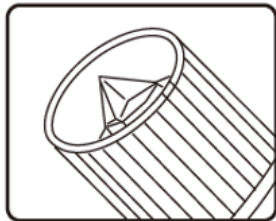

- ใช้ส่วนแหลมของปลายฝาหลอดเจาะนีกซีลตรงรูระบายของหลอด
*นำส่วนแหลมเสียบตรงรูระบายไว้และหมุนหลายรอบเพื่อให้รูเจาะเรียบเนียน
- กรณีที่ส่วนที่ถูกเจาะของซีลตรงรูระบายนั้นเกินออกมาด้านนอก :
*หากใช้ในสภาพแบบนี้อาจบาดเจ็บได้
*ควรกำจัดออกโดยใช้กรรไกรหรือสิ่งอื่น ๆ ที่เหมาะสมโดยไม่ควรใช้มือกำจัดออกโดยตรง

(3) ทำโปรแคร์ เพสท์บนแป้นด้านที่ติดกับผิวหนัง

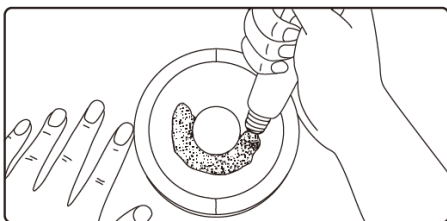


- ทำโปรแคร์ เพสท์ตรงบริเวณรอบรูที่ตัดตามขนาดทวารเทียมในปริมาณพอเหมาะ

(4) ทำให้โปรแคร์ เพสท์แห้ง


- เมื่อทาโปรแคร์ เพสท์บนแป้นแล้วปล่อยให้แห้งประมาณ 1 นาทีเพื่อให้พื้นผิวแห้ง
- หากใช้นิ้วจับแล้วไม่ติดนิ้วถือว่าแห้งแล้ว

(5) ใช้นิ้วกระจายโปรแคร์ เพสท์

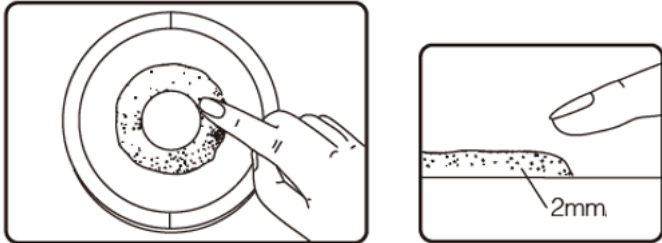

- เช็คสภาพพื้นผิวของโปรแคร์ เพสท์แห้งแล้ว จากนั้นใช้นิ้วลูบเนื้อครีมเบา ๆ เพื่อให้มีความหนาประมาณ 2 mm
- หากโปรแคร์ เพสท์ติดนิ้วไม่ควรฝืนลอกออกแต่ควรใช้น้ำอุ่นทำให้เนื้อครีมเปื่อยขึ้นและค่อย ๆ ลอกออก

(6) ติดแป้น

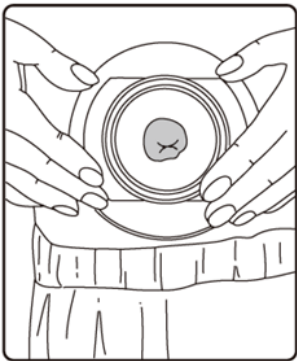

- เช็คอีกครั้งว่าสภาพโปรแคร์ เพสท์แห้งอยู่ จากนั้นค่อยติดแป้น
- ขณะเปลี่ยนอุปกรณ์ไม่ควรฝืนลอกโปรแคร์ เพสท์ที่ยังเหลืออยู่บนผิวหน้าออก
- หากต้องการลอกออกควรใช้น้ำอุ่นทำให้เนื้อครีมเปื่อยขึ้นและค่อย ๆ ลอกออก

(7) หลังใช้

- เช็ดโปรแคร์ เพสท์ที่ติดบริเวณรอบรูระบายของหลอดออกให้สะอาด

*หากยังมีครีมติดอยู่ :

อาจไม่สามารถปิดฝาให้สนิทได้จึงทำให้เนื้อครีมภายในหลอดแข็งและไม่สามารถใช้หมดหลอดได้

2. ข้อควรระวังในการใช้งาน

[คำเตือน]

- ควรหลีกเลี่ยงใช้หรือเก็บบริเวณใกล้ไฟ
 - * เนื่องจากอาจติดไฟได้
- ควรเก็บให้พ้นมือเด็กเล็ก
 - * หากกลืนเข้าไปไม่ควรทำให้อาเจียน ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาทันที
- หากเข้าตาควรล้างด้วยน้ำให้เพียงพอทันที จากนั้นควรไปพบแพทย์เฉพาะทางเพื่อรับการรักษา
- ผลิตภัณฑ์นี้มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ด้วย
 - * สำหรับผู้ที่ไวต่อแอลกอฮอล์ไม่ควรใช้
 - * ไม่ควรใช้กับส่วนของผิวหนังที่มีแผล, บวม, เป็นผื่น เป็นต้น
- ไม่ควรทาผลิตภัณฑ์นี้ที่ผิวหนังโดยตรง
 - * เนื่องจากแอลกอฮอล์อาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังได้
- หากมีความผิดปกติเกิดขึ้นกับผิวหนังควรหยุดใช้และปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง
- ควรหลีกเลี่ยงใช้ในที่ปิดไม่มีอากาศถ่ายเท
 - * เนื่องจากหากสูดดมกลิ่นแอลกอฮอล์แล้วอาจส่งผลเสียต่อร่างกายได้
- ส่วนแหลมของปลายฉาหลอดนั้นมีไว้เพื่อเปิดซิลของหลอด
 - * ขณะใช้หรือขณะเก็บควรระมัดระวังให้ดีเพื่อไม่ให้บาดเจ็บหรือส่วนอื่น

[ข้อควรระวัง]

- หลังใช้ควรปิดฝาหลอดให้สนิท
 - * เนื่องจากอาจทำให้เนื้อครีมภายในหลอดแข็งและไม่สามารถใช้หมดหลอดได้
- กำจัดตามข้อบังคับท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
- ใช้ครั้งเดียว

3. เงื่อนไขการเก็บรักษา

[คำเตือน]

- ห้ามเก็บไว้ใกล้ไฟ
(เนื่องจากการติดไฟ)

[ข้อควรระวัง]

- ไม่ควรเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูง
 - * หากเก็บผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ใช้ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูง :
อาจทำให้หลอดพองตัวขึ้นและแตกหรือเนื้อครีมพุ่งออกมาขณะเปิดซิลของหลอดได้

4. เครื่องหมาย (สัญลักษณ์)

SYMBOLS	
	Expiry Date ... (1)
LOT	Lot number ... (2)

(1) วันหมดอายุ : ห้ามใช้งานหากเกินวันหมดอายุนี้

(2) ล็อตการผลิต : เลขที่แสดงครั้งที่ผลิต

[ข้อมูลผู้นำเข้า]

ผู้นำเข้า : บริษัท มารูเบนิ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ : เลขที่ 548 อาคารวัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ ชั้น 32-33 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 02 256 6900

[ข้อมูลผู้ผลิต]

ผู้ผลิต : บริษัท อัลแคร์ จำกัด

ที่อยู่ : ชั้น19 อาคาร อาร์คาเซ็นทรัล ,1-2-1 คินซึ , ซิมิตะ-คุ,โตเกียว,130-0013,ญี่ปุ่น

- อ่านคู่มือการใช้งานนี้และทำความเข้าใจคุณสมบัติของสินค้าให้ดีก่อนใช้งาน
- โปรดเก็บคู่มือการใช้งานนี้ไว้ในบริเวณที่หยิบได้ง่ายตลอดเวลาเพื่อใช้อ้างอิงได้ตามความจำเป็น