

【警告】
明らかな臨床的創感染を有する患者には慎重に使用すること。[感染を悪化
するおそれがある。臨床的感染を有する患者であっても感染に対する薬剤治
療や全身・局所管理をしながら創傷被覆材を併用することが有益と医師が判
断する場合には、局所の観察を充分に行ない、慎重に使用すること。]

【禁忌・禁止】
1. 使用方法
再使用禁止
2. 適用対象
1) 筋肉、腱又は骨に達している潰瘍
2) 結核、梅毒及び真菌類の感染による潰瘍
3) 悪性腫瘍による潰瘍
4) 寒性グロブリン血症、結節性動脈周囲炎、全身性エリテマトーデスのよ
うな脈管炎を伴う患者の外傷
5) Ⅲ度熱傷
[1)～5)への適用は安全性・有効性が確立されていないので本品の使
用は避けること。]

使用目的(効能又は効果)

皮下脂肪組織までの創傷(Ⅲ度熱傷を除く)に対する「創の保護」、「湿潤環境の保
護」、「治癒の促進」、「疼痛の軽減」を目的とする。

使用上の注意

1. 重要な基本的注意
1) 本品の使用中に、創に本品が原因と推察される臨床的感染が起きた場合に
は、使用を中止し、適切な治療を行なう。また、患者の全身状態の悪化、全身
管理の不足等によっても、創に感染症状が現れることがある。感染の兆候に
十分注意し、臨床的感染が認められた場合には、原則として使用を中止し、
適切な治療を行なうこと。
2) 本品使用中に皮膚障害と思われる症状が現れた場合には、使用を中止し、
適切な治療を行なうこと。
3) 著しく乾燥した創傷または硬く黒い壊死組織で完全に覆われている創傷へ
の使用は避けること。
2. 相互作用
抗生物質及び抗真菌剤等の軟膏は本品の吸収性を阻害するので併用は避け
ること。
3. その他の注意
1) 本品は滅菌済みで、包装の破損等がない限り無菌性は保証されているが、
使用時に包装が破損又は汚損している場合には使用しないこと。
2) 本品は開封後、直ちに使用すること。
3) 本品を再滅菌しないこと。
4. 貯蔵・保管方法
高温・多湿の場所は避け、室温で保存すること。

保険適用
特定保険医療材料：皮膚欠損用創傷被覆材
適用：皮下組織に至る創傷用/標準型
適用期間：2週間を標準とし、特に必要と認められる場合につい
ては3週間を限度とする。

※ご使用の際は、必ず添付文書をお読みください。



ソーブサン Sorbsan						
種類	商品コードNo.	規格	保険算定面積	1箱入数	メーカー希望小売価格(税抜き)	
フラット	1号	13481	5.0cm× 5.0cm	25cm ²	10枚	¥3,000
	3号	13482	10.0cm×10.0cm	100cm ²	10枚	¥12,000
	5号	13483	10.0cm×20.0cm	200cm ²	5枚	¥12,000
プラス	2号	13491	7.5cm×10.0cm	75cm ²	5枚	¥4,500
	4号	13492	10.0cm×15.0cm	150cm ²	5枚	¥9,000
リボン	1号	13501	長さ30.0cm(太)	200cm ²	5本	¥12,000

Y線滅菌済
STERILE

▶ 保険適用

高度管理医療機器／医療機器承認番号:20700BZY00179000



アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825
www.alcare.co.jp

●本カタログの内容は2015年9月現在のものです。
●商品の仕様、デザインおよび価格は、改良や経済状況の変動などにより予告なく変更することがあります。
●本カタログに掲載の写真は、実際の色とは多少異なる場合がありますので、ご了承ください。

お問い合わせ：コールセンター

フリーダイヤル **0120-770-863** 土・日・祝日を除く
午前9：00～午後5：00



この印刷物は、E3PAのシルバー基準に適合した
地球環境にやさしい印刷方法で作成されています
E3PA:環境保護印刷推進協議会
<http://www.e3pa.com>

303-0804-0119/8

ソーブサン
Sorbsan




アルギネート創傷被覆材
Alginate Wound Dressing

ソーブサン フラット
ソーブサン プラス
ソーブサン リボン

滲出液を吸収しゲル化する、 アルギネート創傷被覆材《ソープサン》。

ソープサンは、主成分のアルギン酸カルシウムを柔らかい不織布状にした創傷被覆材です。
滲出液中のナトリウムイオンと接触することでゲル化し、創傷治癒に最適な湿潤環境をつくり出します。

アルギン酸からソープサンへ

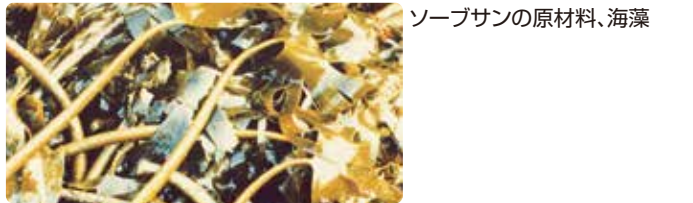


海藻から抽出したアルギン酸ナトリウム塩
※アルギン酸は、天然には主として水に可溶性なナトリウム塩として存在しています。

ナトリウム塩をカルシウムイオンとイオン置換

アルギン酸カルシウム塩
※水に不溶となります。

柔らかい不織布状に加工

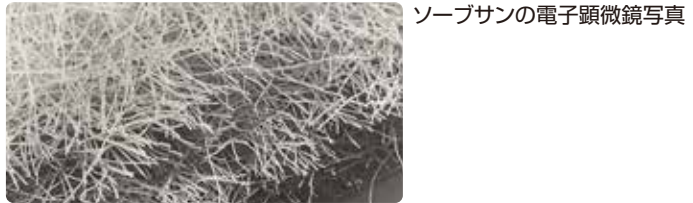


滲出液中のナトリウムイオンと接触すると素早くゲル化



アルギン酸は原材料として幅広く使用されています。

- 食品／アイスクリーム、あん、ミートソース、チョコレートなどの安定剤や増粘剤など
- 医薬品／止血剤、親水性軟膏基材、錠剤コーティング剤、歯科印象剤など
- 化粧品／ローション、乳液、クリーム、ファンデーションなど

DESIGN (デザイン)分類におけるソープサンの適用対象と特徴

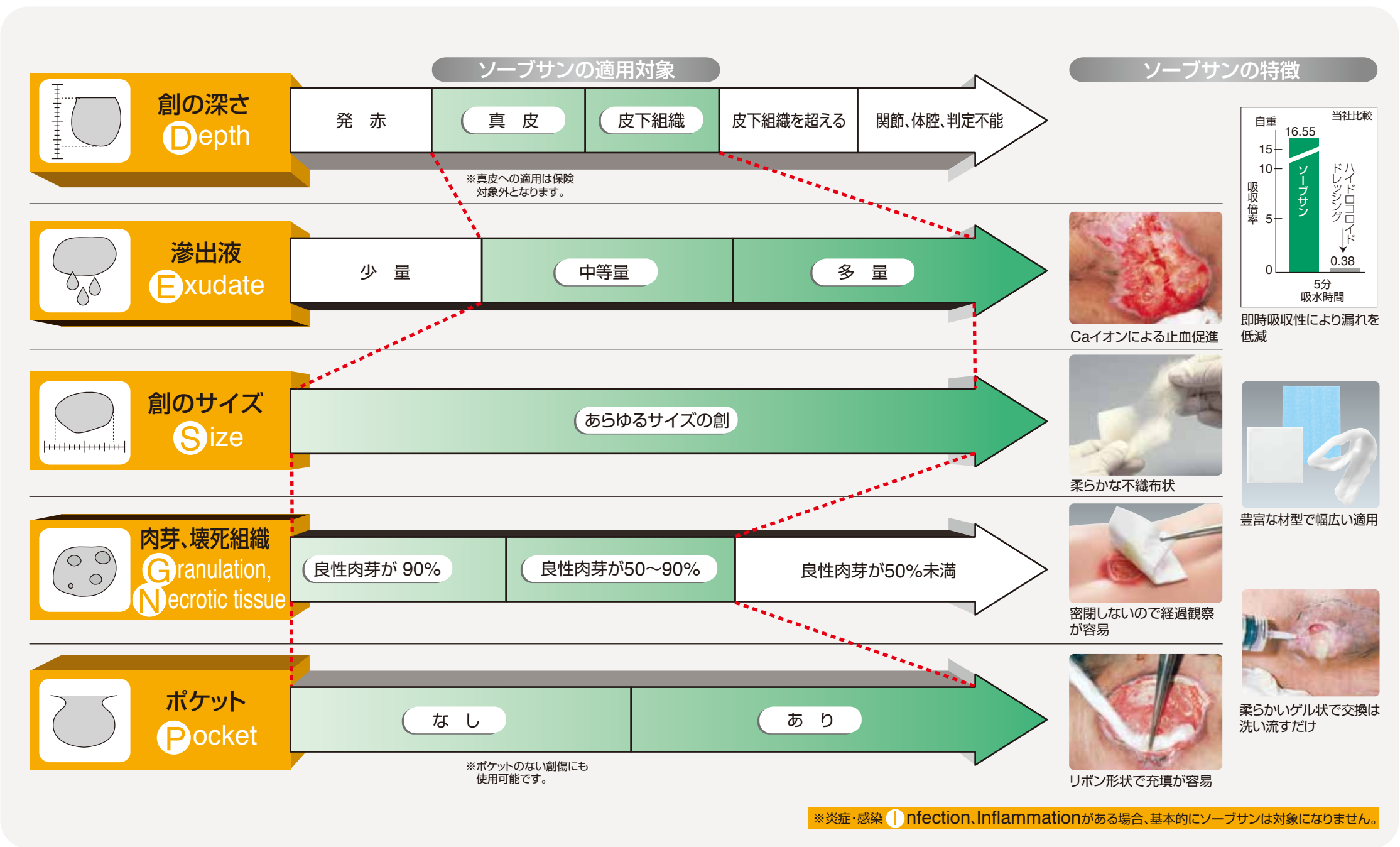

《ソープサン》は創傷管理を効率化し、 快適な創傷治癒環境を提供します。

ソープサンは、その機能特徴により、創傷管理の手間を削減するとともに、健常皮膚の浸軟や漏れを防ぎ、交換時の疼痛を軽減するなど、患者さんにとっても安心できる創傷治癒環境を提供します。

ソープサンの特徴と利点

特徴

1

柔らかな不織布状

利点

- 創傷への充填や、創傷のさまざまな形状、深さ、滲出液の量に対応します。
- ちぎって使用すれば、ソープサンの量や形状を自由に調整できます。



ポケット形成した褥瘡には、ソープサンリボンを充填



創傷の形状に合わせてちぎって使用


特徴

2


即時吸収／高吸収性

利点

- スポット吸収するので、滲出液による健常皮膚の浸軟を軽減します。
- 自重の20倍の吸収力により、多量の滲出液も漏れにくく交換頻度を軽減します。

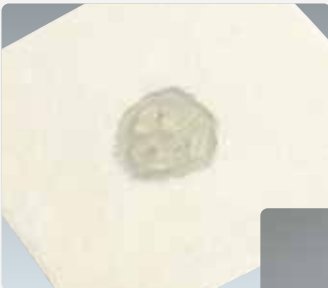

スポット吸収のイメージ

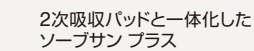

2次吸収パッドと一体化したソープサン プラス



特徴

3

素早いゲル化(柔らかいゲル)

利点

- 吸収速度が速いので、素早くゲル化し創傷にやさしい湿潤環境をつくり出します。
- 柔らかいゲルは、創傷面に固着せず、交換の際に簡単に洗い流せます。
- 柔らかいゲルは、充填した際も創傷に圧迫をかけにくくなっています。



創傷面に付着したソープサンのゲル



生理食塩水で簡単にゲルを洗浄可能


特徴

4

Caイオンによる止血促進

利点

- カルシウムイオンによる止血効果により、デブリードメント後の創傷面に使用可能です。
- 外傷などの出血時にも使用できます。

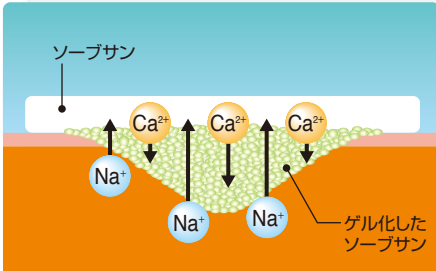

ソープサンがゲル化する時に放出されるカルシウムイオンが、血液凝固因子Ⅳとして作用する



デブリードメント後の出血した創傷

一般的な使用方法

1



創傷面を生理食塩水で洗浄します。

2



創傷の周囲の水分を拭き取ります。

3




創傷面にソープサンを貼付します。(創傷よりやや大きめのサイズのソープサンを使用)

4



ガーゼやデルマエイドなどで被覆し、テープ類で固定します。

5

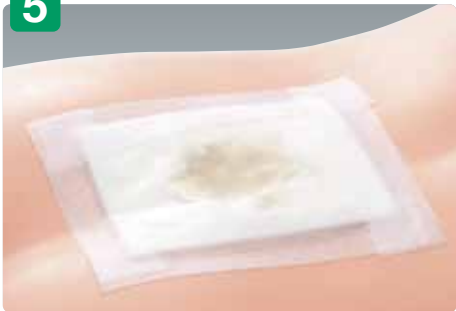

2次ドレッシングに滲出液が染み出てきたらソープサンを交換します。(ソープサン交換の目安です)

6



ゲル化したソープサンを生理食塩水で洗浄します。

《ソープサン》の多彩な材型が、 創傷の状態に合わせた適切なケアを実現します。

ソープサンの特徴と利点

特徴

5

多彩な材型

利点

●シート状、2次吸収パッド付き、リボンなど、多彩な材型で創傷の状態に合わせた選択が可能です。

深い(腔・ポケット)

創傷の深さ

浅い

リボン(ひも状)

滲出液の量が多い状態から、中程度の深い創傷やポケット状の創傷に適しています。

フラット(シート状)

滲出液の多い、平坦な創傷に適しています。

プラス(2次吸収パッド付き)

特に滲出液の多い、平坦な創傷に適しています。

多い

少ない

治癒

上皮化

材型別の適用例と特徴

適用例	特徴
 左踵部の血管障害性潰瘍	ソープサン フラット スタンダードな平面形状 / 3サイズ ●形状を変えるのが容易で、創傷の大きさ、形、深さを選びません。 ・大きい創傷……重ね貼り、または軽く引っ張り、伸ばして貼付。 ・不規則な形状の創傷……創傷よりやや大きめのソープサンを創傷全体に貼付(スポット吸収するので健康皮膚の浸軟が起こりにくい)。また伸ばす、ちぎるなど形を変えて貼付。 ・深い創傷・ポケット……ちぎって充填。 ●自在な使用方法により、準備する被覆材の種類低減が可能です。
 壊死組織が残っている褥瘡	ソープサン プラス 薄いレーヨンの2次吸収パッド付き / 2サイズ ●2次ドレッシングの吸収パッドと一体化しているので、薄く漏れにくい被覆が可能となります。 ●固定にフィルムドレッシングを使用すれば、薄くてずれにくく、外部からの汚染も防止できますので、仙骨部褥瘡などにも適しています。 ●2次ドレッシング選択の手間とコストが省けます。
 右腰部のポケット状の褥瘡	ソープサン リボン 細長いひも状 / 1サイズ ●加工が不要なひも状で、手間なく狭いポケット(腔)の創傷に充填できます。(ゲル化したソープサンは柔らかく、創傷へ圧迫をかけにくくなっています。)