

## フィットキュア・スパイン装着例



まえ

うしろ

よこ

患者さんと医師にうれしい、キャストイングの新しいカタチ

# Fit Cure [フィットキュア]

カバー付きキャストイングシステム

Wearable Cast ~ ギブス固定のストレスフリーを目指して ~


独自形状のキャストステー + 専用のステーカバー

Fit: ぴったり合う、適合する + Cure: 治療する、硬化する

**Speedy** 即時固定

**Simple** 簡単操作

**Comfortable** 装着快適性

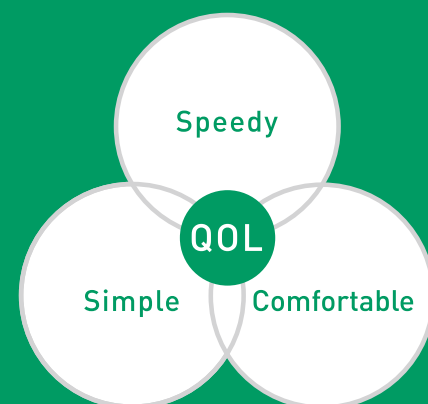

## フィットキュア®・スパイン Fit Cure-Spine

<セット内容> キャストステー:1枚 ステーカバー:1コ

キャストステー




ステーカバー



### ●種類と規格

種類	商品コード No.	規格		セット内容	1箱入数	メーカー希望 小売価格(税抜き)
		腰回	胸囲			
LL	19921	103~124cm	84~106cm	キャストステー:1枚	1セット	¥15,000
L	19922	92~108cm	80~100cm	キャストステー:1枚	1セット	¥15,000
M	19923	82~97cm	74~92cm	ステーカバー:1コ	1セット	¥15,000
S	19924	71~84cm	66~83cm	ステーカバー:1コ	1セット	¥15,000

一般医療機器/医療機器届出番号:13B1X00207000065

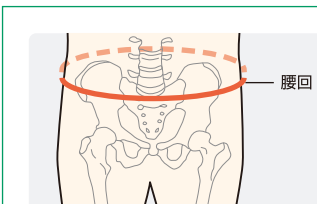

### サイズの選定方法

- 腰回(腸骨の周囲)を測ってください。
- サイズの選定は腰回を基準とし、胸囲は目安としてください。
- ※2つのサイズにまたがる場合は、大きいサイズをお選びください。

for Best Care **ALCARE**

## フィットキュア®・スパイン Fit Cure-Spine



「その場でつくれる」が  
一番うれしい。

カバー付きキャストイングシステム  
Casting System with Cover

**ALCARE**

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013  
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825  
www.alcare.co.jp

●本カタログの内容は2019年3月現在のものです。  
●商品の仕様、デザインおよび価格は、改良や経済状況の変動などにより予告なく変更することがあります。  
●本カタログに掲載の写真は、実際の色とは多少異なる場合がありますので、ご了承ください。

お問い合わせ: コールセンター

フリーダイヤル **0120-770-863** 土・日・祝日を除く  
午前 9:00 ~ 午後 5:00



この印刷物は、EPAのグリーン基準に適合した  
地球環境にやさしい印刷方法で作られています  
EPA: 環境省資源循環政策課  
http://www.e3pa.com

## 《フィットキュア®・スパイン》カバー付きキャストシステム


椎体支持のための快適な固定が  
医師の手技の範囲で可能になりました。

キャストだから、その場で、その人にフィットした  
外固定が、その日のうちにできます。

その場で、医師が簡単にキャストを成形できます。



その人の背部形状にフィットした  
固定肢位が得られます。

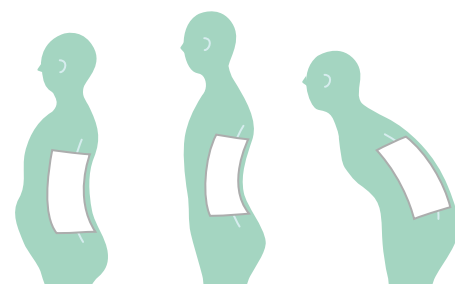

その日のうちに外固定が始めます。

フィットキュア・スパイン装着

受診日 → 離床 → リハビリ → 退院 → 社会復帰

## 2つの ( ① ② ) 3点支持による固定で、体幹を保持します。

体幹保持機能

1

背部のキャストステーの面と  
胸部ベルト、腰部ベルトの3点で支持します。



体幹保持機能

2

肩部ベルトの「たすき掛け構造」により体幹の前傾を抑えます。



## 快適だから装着し続けられます。

肩から引き上げ、体幹全体で保持するから  
前方への当たりが少なく  
過圧迫を低減します。

前傾の制限

+

保持

↓

当たりが少ない



新開発の特殊生地は吸水・速乾・通気性に優れています。

肌側は接触面積を多くし  
吸水性を高め、  
外側はメッシュ形状により  
水を拡散させやすい  
特殊な生地の構造です。

