

# フィットキュア<sup>®</sup>・スパイン

## Fit Cure-Spine



簡単なギプス治療で、  
ギプス生活に笑顔を。

カバー付きキャストシステム  
Casting System with Cover

# 《フィットキュア®・スパイン》 カバー付きキャストシステム

椎体支持のための快適な固定が  
医師の手技の範囲で可能になりました。

キャストだから、その場で、その人にフィットした  
外固定が、その日のうちにできます。

キャストステー



ステーカバー



その場で、医師が簡単にキャストを成形できます。



水袋が内蔵されているため  
水を用意する必要がありません。  
手のひらで全体に水袋の  
水を行き渡らせます。



キャストステーを背部の形状に合わせて  
成形します。モルディング時間は約10分です。



キャストステーをステーカバーのポケットに  
入れて完成です。

その日のうちに外固定が始められます。

フィットキュア・スパイン装着

受診日

➡ 離床 ➡ リハビリ ➡ 退院 ➡ 社会復帰

# 2つの ( ① ② ) 3点支持による固定で、体幹を

体幹保持機能

1

背部のキャストステーの面と  
胸部ベルト、腰部ベルトの3点で支持します。



背中にジャストフィットする  
5層のキャストステーが  
背部をしっかり固定し  
体幹の伸展を抑えます。



腰部の補助ベルトが腹圧を高め、  
体幹の保持状態をサポートします。



## 快適だから装着し続けられます。

肩から引き上げ、体幹全体で保持するから  
前方への当たりが少なく  
過圧迫を低減します。

前傾の制限

+

保持

↓

当たりが少ない




を保持します。

体幹保持機能

2

肩部ベルトの「たすき掛け構造」により体幹の前傾を抑えます。

胸部と連動した肩部ベルトを引っ張ることで後方へ引き上げる力がはたらきます。

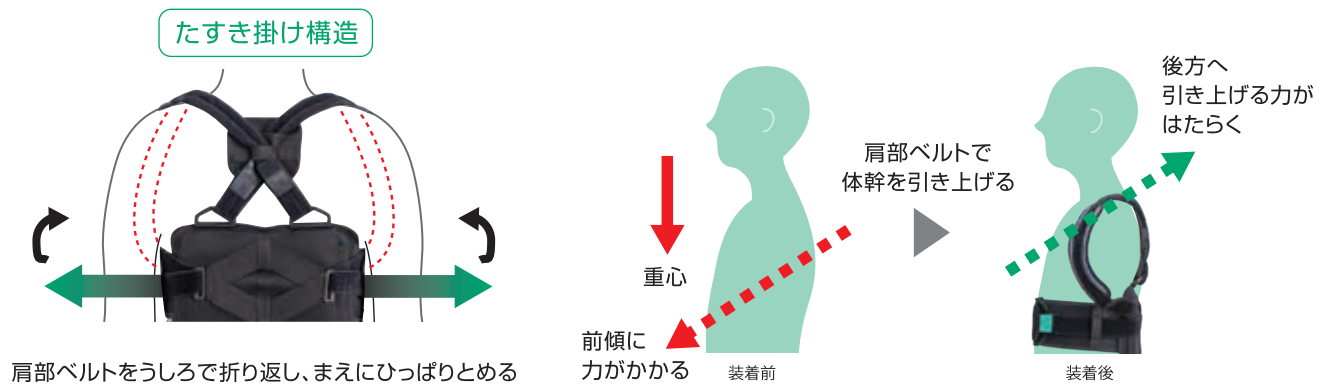

操作性の改良をおこないました。



胸・腰の補助ベルト通しを追加



カンのサイズ幅を拡大




肩部ベルトの素材変更




胸部、腰部ベルトの長さを調整

「水濡れ」「蒸れ」のストレス低減に向けて、高速乾・高通気の生地を使用しています。


ステーカバーの肌側は吸水性が高く、外側は水分を拡散しやすい、特殊構造の吸水・速乾・通気性素材を採用。患者さんの装着時の水濡れや蒸れのストレス低減に寄与します。

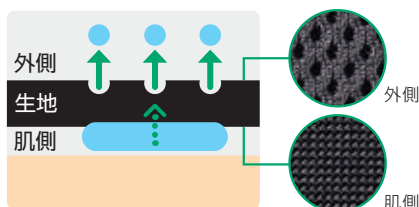

■フィットキュア・スパイン生地と弾力包帯(エラスコット)の性能比較

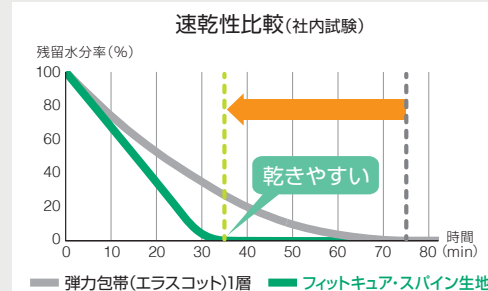

〈試験方法〉直径8cmサンプルを平行にシャーレに置いた状態で0.5mL量の水分を含ませ20℃ 20%の環境にて乾くまでの経過を残留水分率にて測定

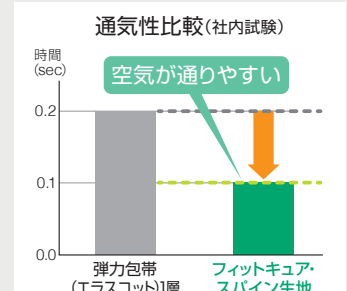

〈試験方法〉JIS L 1096に準拠 ガー形通気性試験機により300mLの空気が通過するのにかかる時間を測定

## フィットキュア・スパイン装着例



まえ



うしろ



よこ

簡単なギプス治療でギプス生活に笑顔を

# Fit Cure [フィットキュア]

カバー付きキャストリングシステム

Wearable Cast～ギプス固定のストレスフリーを目指して～


独自形状のキャストステー + 専用のステーカバー

Fit: ぴったり合う、適合する + Cure: 治療する、硬化する

**Speedy** 即時固定

**Simple** 簡単操作

**Comfortable** 装着快適性

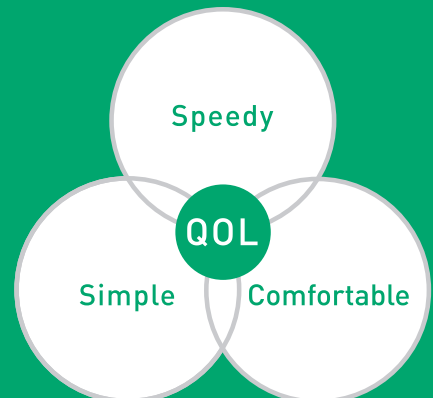

<セット内容> キャストステー:1枚 ステーカバー:1コ

キャストステー




ステーカバー



●種類と規格

種類	商品コード No.	規格		セット内容	1箱入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
		腰回	胸回			
LL	21111	103~124cm	95~115cm	キャストステー:1枚	1セット	¥18,700 (¥17,000)
L	21112	92~108cm	91~110cm	キャストステー:1枚	1セット	¥18,700 (¥17,000)
M	21113	82~97cm	85~103cm	ステーカバー:1コ	1セット	¥18,700 (¥17,000)
S	21114	71~84cm	71~88cm	ステーカバー:1コ	1セット	¥18,700 (¥17,000)

一般医療機器/医療機器届出番号:13B1X00207000065

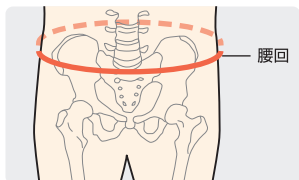

サイズの選定方法

- 腰回(腸骨の周囲)を測ってください。
  - サイズの選定は腰回を基準とし、胸回は目安としてください。
- ※2つのサイズにまたがる場合は、大きいサイズをお選びください。



アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013  
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825  
[www.alcare.co.jp](http://www.alcare.co.jp)

お問い合わせ：コールセンター

フリーダイヤル **0120-770-863**

土・日・祝日を除く  
午前 9:00~午後 5:00

●本カタログの内容は2021年3月現在のものです。  
●商品の仕様、デザインおよび価格は、改良や経済状況の変動などにより予告なく変更することがあります。  
●本カタログに掲載の写真は、実際の色とは多少異なる場合がありますので、ご了承ください。



この印刷物は、E3PAのシルバー基準に適合した地球環境にやさしい印刷方法で作成されています  
E3PA:環境保護印刷推進協議会  
<http://www.e3pa.com>