


# クイックカバー Quick Cover



手間を省き、時間をつくる  
「これがほしかった！」を  
カタチにしました。

## シャワー用保護カバー Shower Cover

### 使用手順

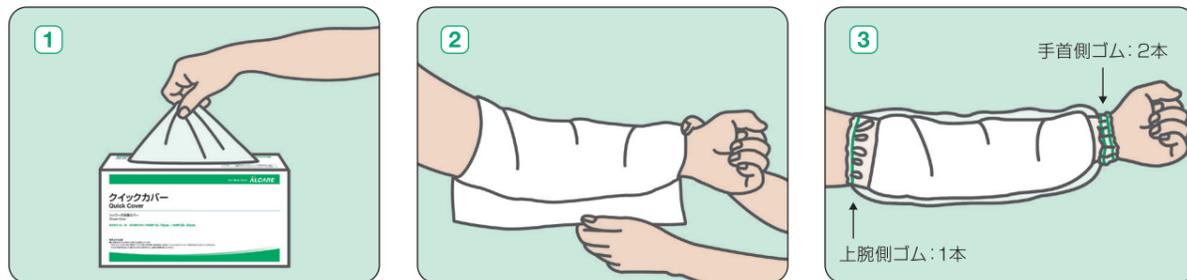

1 準備の手間なく  
グローブ感覚で取り出します。

2 カテーテルの上から  
タオルを巻きます。

3 カバーをかぶせるだけの  
ワンタッチで装着完了。



### クイックカバー Quick Cover

種類	商品コードNo.	規格		1箱入数
		適応部位	適応範囲(目安)	
—	20181	成人 腕	手首周囲14~19cm 上腕周囲20~35cm	30枚


※完全防水を保障するものではありません。安全にお使いいただくため用途以外の使用はせず、取扱説明書に従ってください。

## 《クイックカバー》 シャワー時の末梢カテーテル保護カバー

# 看護師さんと患者さんの快適をつくるシャワー専用品。



これまでシャワー時に看護師さんの大きな手間となっていた防水の対応。

現場看護師さんの声から生まれた、患者さんにも優しい、簡単に快適にシャワー浴ができる初めての専用品です。

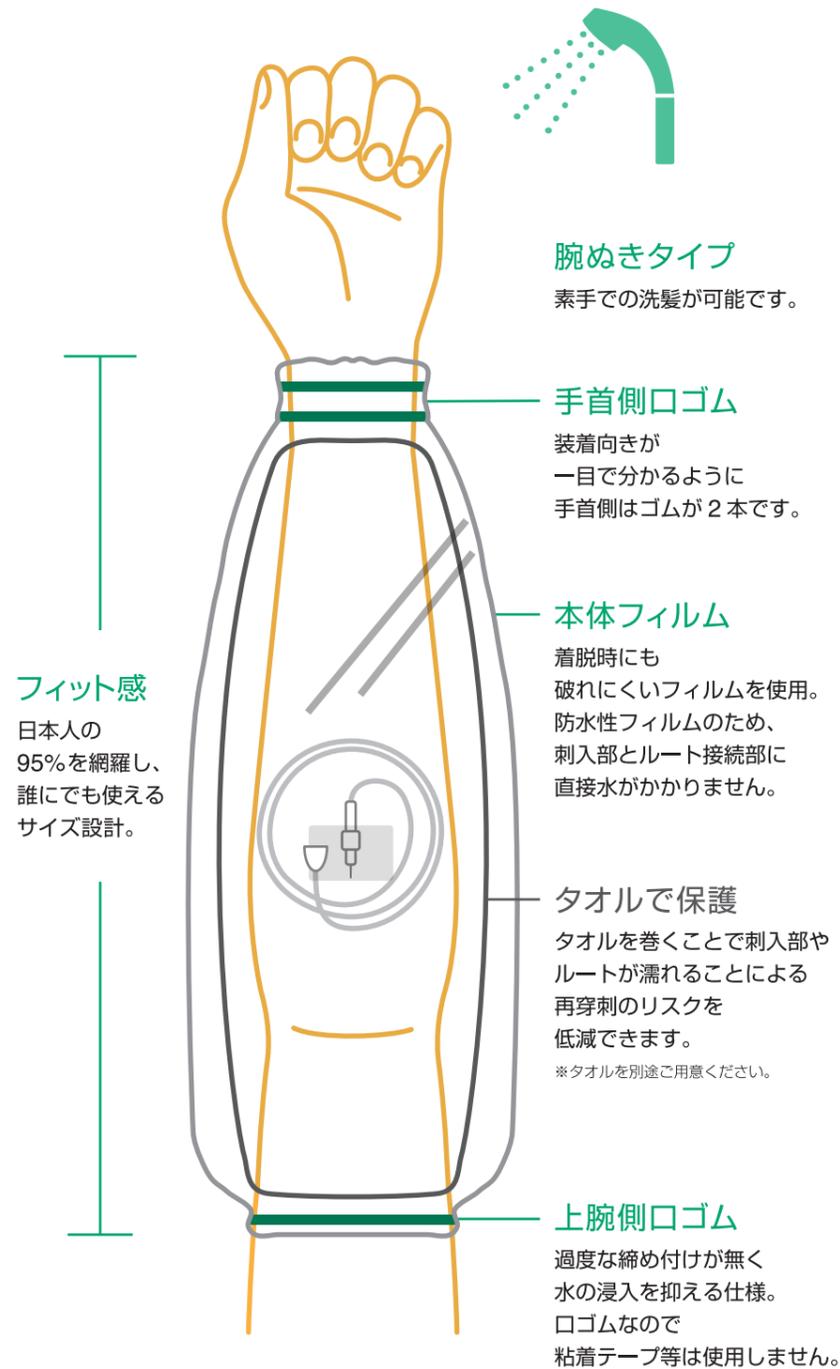


### こんな経験ありませんか？

#### あるある 1

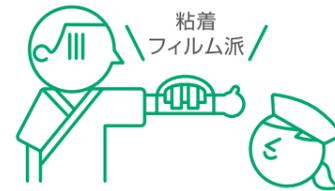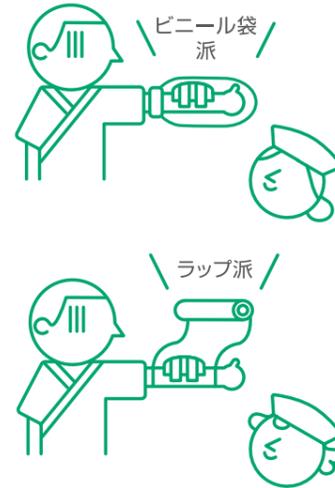

#### あるある 2

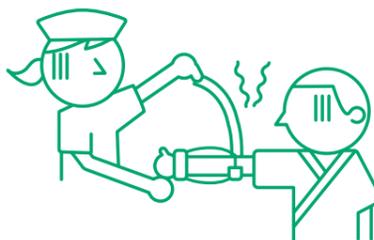


## ワンタッチで着脱可能

もうハサミやビニールはいりません。

毎回工夫して作る必要がなくなります。シャワー後はカバーを外すだけ。ワンタッチだから、誰でも1分程度で着脱可能。看護師さんの“手間”を省きます。



準備から完了まで6分ほど要していた作業が誰でも1分程度で簡単に！

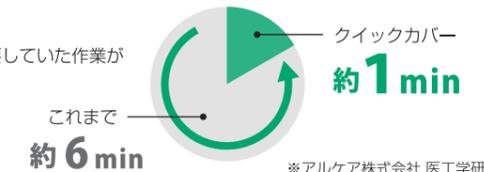

## 患者さんの負担低減

### 非粘着の腕ぬきタイプ

テープやフィルムドレッシング等を使用しないのでシャワー後に粘着物を剥がすことが無く、患者さんの皮膚に負担をかけません。また、腕ぬきタイプで素手での洗髪ができます。気持ちよくシャワーを浴びていただき、ストレスフリーのシャワー浴を提供できます。

