



※必ずカット対象のキャスト材の添付文書をご確認のうえ、ご使用ください。

キャストカッター 匠・II Cast Cutter Takumi-II

種類	商品コードNo.	規格(セット内容)	1函入数	メーカー希望 小売価格(税抜き)
—	17281	本体、ACアダプタ、着脱電源コード、 カッターブレード匠、六角レンチ	1セット	¥250,000

一般医療機器/医療機器届出番号：13B1X00306N10298



カッターブレード 匠 Cutter Blade Takumi

種類	商品コードNo.	規格(直径)	1函入数	メーカー希望 小売価格(税抜き)
—	17282	61.0mm	1枚	¥7,000

一般医療機器/医療機器届出番号：13B1X00306G10972

キャストカッター 匠・II

Cast Cutter Takumi-II



ギプス生活を応援するサポートグッズのご紹介

快適ギプス生活

何かと不自由なギプス固定中の生活が少しでも快適であるために。アルケアでは、一人ひとりの快適なギプス生活を応援する、サポートグッズを揃えています。

快適ギプス生活

検索




<http://www.alcare.co.jp/castsupport/>



キャストサスペンダー

上肢全体を良肢位に保持できるギプス専用の腕つり。

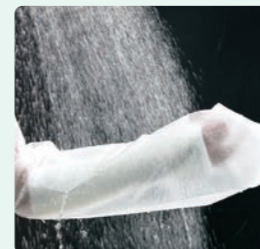

シャワーカバー

ギプスにかぶせてシャワーの水をガード。面倒な準備は一切不要な防水カバー。



キャストサンダル

簡単装着でスムーズな歩行をサポートする歩行用キャストサンダル。

ほか

快適な操作から、
笑顔が生まれる。

製造販売元

ミズホ株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷3-30-13

販売元

ALCARE

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825
www.alcare.co.jp

お問い合わせ：コールセンター

フリーダイヤル **0120-770-863**

土・日・祝日を除く
午前9:00~午後5:00

●本カタログの内容は2017年10月現在のものです。
●商品の仕様、デザインおよび価格は、改良や経済状況の変動などにより予告なく変更することがあります。
●本カタログに掲載の写真は、実際の色とは多少異なる場合がありますので、ご了承ください。



この印刷物は、EPAのフロンフリー基準に適合した
地球環境にやさしい印刷方法で作成されています
EPA：環境保護印刷推進協議会
<http://www.e3pa.com>

キャストカッター
Cast Cutter

www.alcare.co.jp

施術者も患者さんも、 ストレスのないギプスカッターを。

《キャストカッター 匠・II》は、ハイパワーの切削力と、高い操作性による使いやすさを実現。キャストの素材を問わず、簡単にスピーディーな除去が可能です。



高振動サイクルだから、 キャスト素材を容易にカット

高振動サイクル(15700サイクル/分：無負荷時)のハイパワーモデルで、キャスト素材を容易にカットできる優れた切削力です。患者様が不安を感じやすいキャストカット時の、心理的ストレスの軽減に貢献します。




静音設計で、 不快音を抑制

静音小型モーターが、操作時に発生する機械音を最小限にとどめます。キャストカット時の音による患者様の不安を軽減します。



安定性に優れ、 使いやすい設計

重量は約1kg。力を入れなくてもキャストに刃が入りやすい適度な重量設計です。また、グリップは握りやすくフィット性に優れたウェーブ形状。グリップと刃の位置が近く、さらに重心を中心より前(刃)側にすることで、ブレにくく、しっかり安定した無理のないカットが可能です。

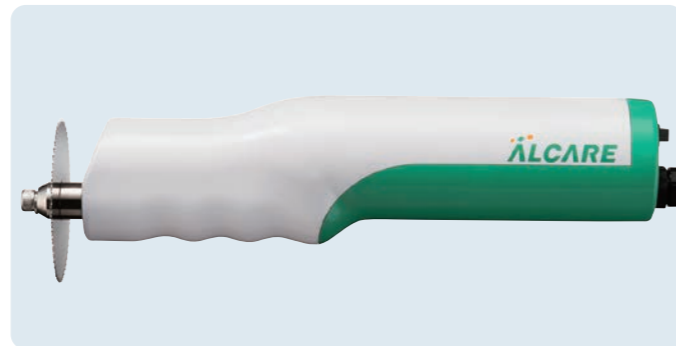

取り扱いのご注意 カット時における、刃とキャストの摩擦熱にご注意ください。

キャスト除去の際は、刃を一カ所にとどめずカットしてください。一カ所にとどめると、キャストとの摩擦で高温の熱が発生し、熱傷のおそれがあります。



替刃

カッターブレード 匠
キャストカッター 匠・II専用
の交換用替刃を別売でご
用意しております。
製造販売届出番号
13B1X00306G10972

仕様一覧表

販売名	キャストカッター 匠・II
製造販売届出番号	13B1X00306N10298
商品コード	17281
JANコード	4946329172812
類別	機械器具 40 医療用のこぎり
医療機器のクラス分類	一般医療機器
一般的名称	電動式ギプスカッター
JMDNコード	16340000
作動環境	周囲温度：10～35℃、相対湿度：30～75%、 気圧：700～1060hPa
輸送および 保管環境	周囲温度：0～50℃、相対湿度：10～85% (結露なきこと)、 気圧：700～1060hPa
電源	AC100V 50-60Hz
電源入力	130VA
電撃に対する保護	クラスI B形装着部
作動モード	非連続作動(最大作動時間8分、最小休止時間120分)
振動サイクル	15700サイクル / 分 ±15%(無負荷時)
電源コード	着脱式 3m
外形寸法	本体：46mm×288mm×55mm ACアダプタ：90mm×189mm×46mm
質量	本体(コントロールケーブル含む)：約0.8kg、 ACアダプタ：約0.7kg、着脱電源コード：約0.4kg
付属品	ACアダプタ：1台、カッターブレード 匠：1枚、六角レンチ(サイズ4)：1本、 着脱電源コード：1本、取扱説明書：1部、医療機器添付文書：1部

規格適合情報

製品規格への適合

本製品は、JIS T 0601-1：2017 医用電気機器-第1部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項に適合しております。

EMC規格への適合

本製品は、JIS T 0601-1-2：2012 医用電気機器-第1-2部：安全に関する一般要求事項-電磁両立性-要求事項及び試験(CISPR11による分類：グループ1 クラスB)に適合しております。