



※必ずカット対象のキャスト材に関する、注意事項等情報をご確認のうえご使用ください。

#### キャストカッター 匠・II Cast Cutter Takumi-II

| 種類 | 商品コードNo. | 規格(セット内容)                                | 1函入数 |
|----|----------|------------------------------------------|------|
| —  | 17281    | 本体、ACアダプタII、着脱電源コード、<br>カッターブレード 匠、六角レンチ | 1セット |

一般医療機器/電動式ギブスカッター/  
製造販売届出番号：13B1X00306N10298



#### カッターブレード 匠 Cutter Blade Takumi

| 種類 | 商品コードNo. | 規格(直径) | 1函入数 |
|----|----------|--------|------|
| —  | 17282    | 61.0mm | 1枚   |

一般医療機器/ギブスカッター用刃/  
製造販売届出番号：13B1X00306G10972

ギブス生活を応援する  
サポートグッズのご紹介

快適ギブス生活

何かと不自由なギブス固定中の生活が  
少しでも快適であるために。アルケアでは、  
一人ひとりの快適なギブス生活を応援  
する、サポートグッズを揃えています。

快適ギブス生活

検索

<http://www.alcare.co.jp/castsupport/>



製造販売元

ミズホ株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷3-30-13

販売元

**ALCARE**

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013  
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825  
[www.alcare.co.jp](http://www.alcare.co.jp)

お問い合わせ：コールセンター

フリーダイヤル **0120-770-863**

土・日・祝日を除く  
午前9:00～午後5:00

- 本カタログの内容は2025年6月現在のものです。
- 商品の仕様、デザインおよび価格は、改良や経済状況の変動などにより予告なく変更することがあります。
- 本カタログに掲載の写真は、実際の色とは多少異なる場合がありますので、ご了承ください。



この印刷物は、E3PAのシルバー基準に適合した  
地球環境にやさしい印刷方法で作成されています  
E3PA:環境保護印刷推進協議会  
<http://www.e3pa.com>

459-1017-0625/2

**ALCARE**

つなぐ手あて、ひらくケア。

## キャストカッター 匠・II Cast Cutter Takumi-II



快適な操作から、  
笑顔が生まれる。

キャストカッター  
Cast Cutter

[www.alcare.co.jp](http://www.alcare.co.jp)

# 施術者も患者さんも、 ストレスのないギブスカッターを。

《キャストカッター 匠・Ⅱ》は、ハイパワーの切削力と、高い操作性による  
使いやすさを実現。キャストの素材を問わず、簡単にスピーディーな除去が可能です。

## 高振動サイクルだから、 キャスト素材を容易にカット

高振動サイクル(14400サイクル/分：無負荷時)のハイパワー  
モデルで、キャスト素材を容易にカットできる優れた切削力  
です。患者様が不安を感じやすいキャストカット時の、心理的  
ストレスの軽減に貢献します。




## 静音設計で、 不快音を抑制

静音小型モーターが、操作時に発生する機械音を最小限に  
とどめます。キャストカット時の音による患者様の不安を軽減  
します。

## 安定性に優れ、 使いやすい設計

重量は約1kg。力を入れなくてもキャストに刃が入りやすい  
適度な重量設計です。また、グリップは握りやすくフィット性に  
優れたウェーブ形状。グリップと刃の位置が近く、さらに重心  
を中心より前(刃)側にすることで、ブレにくく、しっかり安定した  
無理のないカットが可能です。

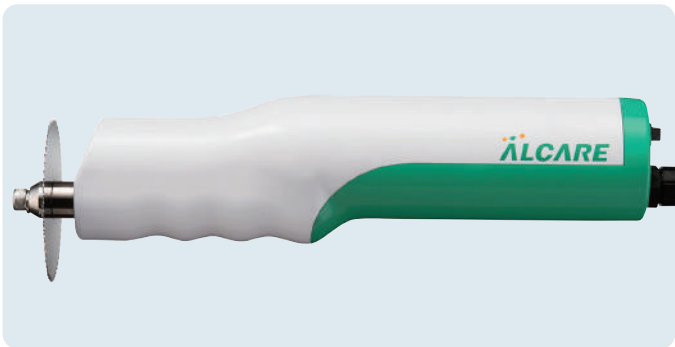

取り扱いのご注意 カット時における、刃とキャストの摩擦熱にご注意ください。

キャスト除去の際は、刃を一カ所にとどめずカットしてください。一カ所にとどめると、キャストとの摩擦で高温の熱が発生し、熱傷のおそれがあります。

### 替刃

カッターブレード 匠  
キャストカッター 匠・Ⅱ専用  
の交換用替刃を別売でご  
用意しております。

### 仕様一覧表

|               |                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 販売名           | キャストカッター 匠・Ⅱ                                                    |
| 製造販売届出番号      | 13B1X00306N10298                                                |
| 商品コード         | 17281                                                           |
| JANコード        | 4946329172812                                                   |
| 類別            | 機械器具 40 医療用のこぎり                                                 |
| 医療機器のクラス分類    | 一般医療機器                                                          |
| 一般的名称         | 電動式ギブスカッタ                                                       |
| JMDNコード       | 16340000                                                        |
| 作動環境          | 周囲温度：10～35℃、相対湿度：30～75%、<br>気圧：700～1060hPa                      |
| 輸送および<br>保管環境 | 周囲温度：0～50℃、相対湿度：10～85%（結露なきこと）、<br>気圧：700～1060hPa               |
| 電源            | AC100V 50-60Hz                                                  |
| 電源入力          | 130VA                                                           |
| 電撃に対する保護      | クラスⅠ B形装着部                                                      |
| 作動モード         | 非連続作動(最大作動時間8分、最小休止時間120分)                                      |
| 振動サイクル        | 14400サイクル/分±10%（無負荷時）                                           |
| 電源コード         | 着脱式 3m                                                          |
| 外形寸法          | 本体：46mm×288mm×55mm<br>ACアダプタⅡ：90mm×189mm×46mm                   |
| 質量            | 本体(コントロールケーブル含む)：約0.8kg、<br>ACアダプタⅡ：約0.7kg、着脱電源コード：約0.4kg       |
| 付属品           | ACアダプタⅡ：1台、カッターブレード 匠：1枚、六角レンチ(サイズ4)：1本、<br>着脱電源コード：1本、取扱説明書：1部 |

### 規格適合情報

#### 製品規格への適合

本製品は、JIS T 0601-1：2017 医用電気機器－第1部：基礎安全  
及び基本性能に関する一般要求事項に適合しております。

#### EMC規格への適合

本製品は、JIS T 0601-1-2：2018 医用電気機器－第1-2部：  
基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項－副通則：電磁妨害  
－要求事項及び試験に適合しております。