

《アンシルク・プロJ キープケア》は弾性ストッキングの適切なフィッティングをサポートします。



履かせ方ガイド

履かせ方&脱がせ方は、動画を参照ください。



<http://www.alcare.co.jp/s/apk>



ストッキングの中に手を入れ、内側からかかと部分をつまみます。



かかと部分を内側でつまんだまま、手を引き抜き、かかと部分まで裏返します。



履き込み口を広げ、つま先からかかとまでを履き込みます。



かかとの位置を合わせたら、裏返した部分を足首の位置で表向きになるように反転させます。



両手の親指をストッキングと足の間差し込み、半円を描くように動かしながら少しずつ均一に引き上げていきます。



上まで引き上げたら、かかとの位置が合っているか、モニターホールの位置が合っているか、シワやたるみがないか、ねじれていないかなどを確認してください。



●測定部位



アンシルク®・プロJ キープケア ハイソックス Ansilk-Pro J Keepcare Calf Stockings

種類	商品コードNo.	規格		サイズ表示カラー	1箱入数	メーカー希望小売価格(本体価格)
		足首周囲	ふくらはぎ周囲			
LL	20301	23~27cm	40~46cm	グリーン	1足	¥2,420 (¥2,200)
L	20302	21~25cm	36~42cm	ブルー		
M	20303	19~23cm	32~38cm	ピンク		
S	20304	17~21cm	28~34cm	イエロー		
SS	20305	15~19cm	24~30cm	オレンジ		


種類	商品コードNo.	規格		サイズ表示カラー	1箱入数	メーカー希望小売価格(本体価格)
		足首周囲	ふくらはぎ周囲			
LL	10足入り 20321	23~27cm	40~46cm	グリーン	10足	¥24,200 (¥22,000)
L	10足入り 20322	21~25cm	36~42cm	ブルー		
M	10足入り 20323	19~23cm	32~38cm	ピンク		
S	10足入り 20324	17~21cm	28~34cm	イエロー		
SS	10足入り 20325	15~19cm	24~30cm	オレンジ		

▶ 保険適用 一般医療機器 / 医療機器届出番号：13B1X00207000070

※2つのサイズに該当する場合は、足首周囲が適応範囲の中央に近いサイズをお選びください。



●測定部位

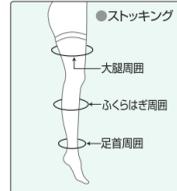

アンシルク®・プロJ キープケア ストッキング Ansilk-Pro J Keepcare Stockings

種類	商品コードNo.	規格			サイズ表示カラー	1箱入数	メーカー希望小売価格(本体価格)
		足首周囲	ふくらはぎ周囲	大腿周囲			
LL	20311	23~27cm	40~46cm	55~64cm	グリーン	1足	¥3,146 (¥2,860)
L	20312	21~25cm	36~42cm	50~59cm	ブルー		
M	20313	19~23cm	32~38cm	47~56cm	ピンク		
S	20314	17~21cm	28~34cm	44~53cm	イエロー		
SS	20315	15~19cm	24~30cm	40~49cm	オレンジ		

種類	商品コードNo.	規格			サイズ表示カラー	1箱入数	メーカー希望小売価格(本体価格)
		足首周囲	ふくらはぎ周囲	大腿周囲			
LL	10足入り 20331	23~27cm	40~46cm	55~64cm	グリーン	10足	¥31,460 (¥28,600)
L	10足入り 20332	21~25cm	36~42cm	50~59cm	ブルー		
M	10足入り 20333	19~23cm	32~38cm	47~56cm	ピンク		
S	10足入り 20334	17~21cm	28~34cm	44~53cm	イエロー		
SS	10足入り 20335	15~19cm	24~30cm	40~49cm	オレンジ		

▶ 保険適用 一般医療機器 / 医療機器届出番号：13B1X00207000070

※2つのサイズに該当する場合は、足首周囲が適応範囲の中央に近いサイズをお選びください。

●サイズ表示カラー



アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825
www.alcare.co.jp

●本カタログの内容は2023年4月現在のものです。
●商品の仕様、デザインおよび価格は、改良や経済状況の変動などにより予告なく変更することがあります。
●本カタログに掲載の写真は、実際の色とは多少異なる場合がありますので、ご了承ください。

お問い合わせ：コールセンター

フリーダイヤル **0120-770-863** 土・日・祝日を除く
午前9：00～午後5：00



この印刷物は、EPAのシグナチャー基準に適合した地球環境にやさしい印刷方法で作成されています。EPAの環境保護推進協議会 <http://www.epa.com>

アンシルク®・プロJ キープケア Ansilk-Pro J Keepcare



正しく履けること、
生地にこだわること、
それが適切なケアを
キープします。

弾性ストッキング
Elastic Stockings

《アンシルク®・プロJ キープケア》 適切なフィッティングをサポートする弾性ストッキング

高い視認性のポジションマーカで適切な装着がわかり、動きに追従する生地が局所への過度の圧迫リスクを低減します。

日本人体型データの分析と研究により開発されたアンシルク・プロJが、よりケアをキープするのに適したカタチに進化しました。




あるある 1 履かせる作業が難しい。

どこまで引き上げるのかしら？

見ればわかる
ポジションマーカで
わかりやすく適切な装着ができます。

高い視認性のポジションマーカ

つま先、かかと、ひざ、ロゴムに色や文字で明確なポジションマーカをつけることにより、適切な装着を誘導します。

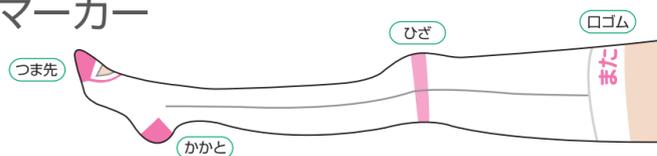

適切な装着を誘導します。

サイズごとの色がわかりやすい

SS、S、M、L、LLの5種類のサイズバリエーション。サイズごとの色が明確です。



裏返した状態でも色で位置がわかる

色がついているため、かかと部分の位置がすぐわかり、裏返しやすく、色を目印にかかとの位置を合わせることができます。



かかと部分をつまみやすい




かかと位置に合わせやすい

色が目印となるので部位合わせが簡単

つま先、かかところがすっぽり収まっていることが見てわかります。ひざの位置が合わせやすくなっています。



適切な位置がわかる

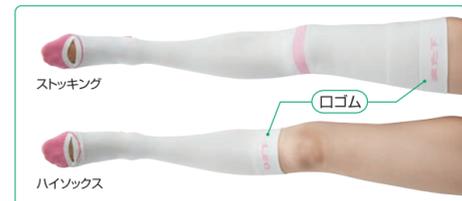

ハイソックス

文字が目印となりどこまで履くのがわかる

履いている人からも読める向きに「また下」「ひざ下」の文字が入っているので、適切な引き上げ位置がはっきりわかり、ひびきすぎません。


あるある 2 動いているうちにずれてしまう。

正しく履かせたのにずれている…

動きに追従する生地が
シワやずれを抑え
局所への過度の圧迫リスクを低減します。

弾性糸で縦横に高い伸縮性

ベース糸に弾性糸を用い伸縮性をもたせることで、縦横に伸び、しっかり戻るので、脚にフィットし動きに追従します。

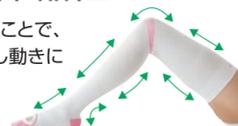

密に入れたインレイ糸で面で圧迫

圧迫を出すための横に編みこむインレイ糸を密に入れることにより、面で圧迫。局所に過度の圧迫がかかりにくい編み構造です。

動きに追従してぴったりフィットします。

シワができにくい

動きに追従するから、シワが発生しにくい。



立った状態

寝た状態

ロゴムで締めつけない

脚全体にぴったりフィットするから、ロゴムで締めつける必要がありません。



過度の圧迫がかからない


面で圧迫するから、骨突出部(足趾付け根、くるぶしなど)に過度の圧迫がかかりません。



あるある 3 正しい位置になっているか、すぐにわからない。

パッと見ただけではわからない…

可視化された
チェックポイントで
装着状態を確認できます。

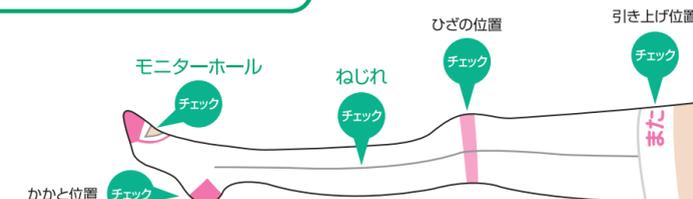

モニターホール

足背部のモニターホールにより装着したままで血流の状態を確認できます。つま先に色がついているので、つま先部が正しい位置にあるかが確認しやすくなっています。



正しい状態



ずれている

ねじれ確認ライン

左右側面にラインを入れることにより、ねじれていないか確認できます。



アンシルク®・プロJ

日本人体型データに基づくサイズ設計で、よりの確な圧迫圧を実現。周術期および長期臥床など、安静時の静脈還流をサポートする弾性ストッキングです。

日本人体型に基づく設計

日本人の体型データの分析と研究により開発されたアンシルク・プロJは日本人の脚の各部位を的確に圧迫し、下肢血流を確保します。

日本人と欧米人の脚部周径の比較

体型データによると、日本人の脚は長くなってきているが、欧米人に比較するとまだ腰と膝の位置は低く、ふくらはぎや大腿部も太めである。



安静時に適した圧迫設計

脚の形状に合わせた立体構造とSigel理論*による至適圧迫(安静時の血流が38%増大)に基づいた圧迫設計により、臥床期間中最適な圧迫が一定に保持されます。

