

パラストーマベルト Parastomal Belt

種類	商品 コードNo.	規格		1函 入数	メーカー希望 小売価格(税込)
		対応リングシール直径	適応範囲(胴回)		
穴径6cm S	20891	5~6cm	75~85cm	1枚	¥10,780
穴径6cm M	20892	5~6cm	85~95cm	1枚	¥10,780
穴径6cm L	20893	5~6cm	95~115cm	1枚	¥10,780
穴径7cm S	20901	6~7cm	75~85cm	1枚	¥10,780
穴径7cm M	20902	6~7cm	85~95cm	1枚	¥10,780
穴径7cm L	20903	6~7cm	95~115cm	1枚	¥10,780
穴径8cm S	20911	7~8cm	75~85cm	1枚	¥10,780
穴径8cm M	20912	7~8cm	85~95cm	1枚	¥10,780
穴径8cm L	20913	7~8cm	95~115cm	1枚	¥10,780

※左右兼用
 ※ストーマ周囲の隆起がおさまった状態で測定してください。
 ※リングシール直径のサイズが重複している場合(6cmであればパラストーマベルト穴径6cmと7cmに該当)、小さい方のサイズを選択すると、種類によっては、袋にしわが入る場合があります。

パラストーマベルト Parastomal Belt



操作性と装着感。
 継続使用を考慮した
 傍ストーマ固定ベルト。

傍ストーマ固定ベルト Parastomal Fixation Belt



アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
 TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825
www.alcare.co.jp

お問い合わせ：コールセンター
 フリーダイヤル **0120-770-863** 土・日・祝日を除く
 午前9:00~午後5:00

●本カタログの内容は2021年3月現在のものです。
 ●商品の仕様、デザインおよび価格は、改良や経済状況の変動などにより予告なく変更することがあります。
 ●本カタログに掲載の写真は、実際の色とは多少異なる場合がありますので、ご了承ください。



この印刷物は、EPAのシール基準に適合した地球環境にやさしい印刷方法で作成されています
 EPA:環境保護印刷推進協議会
<http://www.e3pa.com>

《パラストーマベルト》 ストーマ周囲の固定用ベルト

しっかり、簡単に、やさしくフィットする。
素材と形状にこだわった傍ストーマ固定ベルト。

ストーマ周囲の状態を整え、ストーマ装具（面板）の密着を高めるための製品です。
機能性と操作性、装着感を考慮し、オストメイトの継続使用をサポートします。



機能性

「しっかり固定」開口部

開口部にはハードメッシュと合皮を使用。
伸縮しない材質なので、しっかりと面板を押さえられます。



しっかり固定
できる開口部

伸縮しない素材（ハードメッシュと合皮）

機能性

「微調整可能」開口部面ファスナー

2つの面ファスナーを使って空き部分を微調整できるので、
様々なストーマ装具にフィットした装着が可能です。




着脱可能な面ファスナー

操作性

「寝ている状態で」着脱操作

面ファスナー式の開口部が前面にあるので、
寝ている状態でもラクに着脱操作をおこなえます。

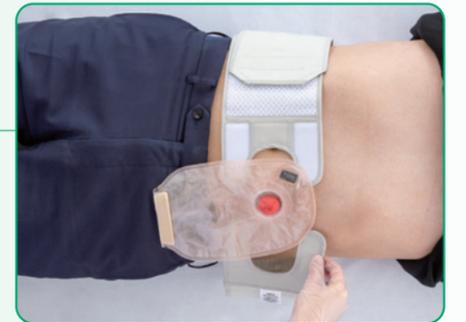

先にストーマ装具を通さず着脱できる

装着感

「やさしい」肌触り

ベルト部にはソフト綿を使用。
負担の少ない装着感が、継続使用を
サポートします。



アウターからの目立ちにくさ（グレーカラー）
など、「生活の中での使用感」も考慮しています。

