

フィットキュア[®]・ナックル

Fit Cure-Knuckle



簡単なギプス治療で、
ギプス生活に笑顔を。

カバー付きキャストリングシステム
Casting System with Cover

《フィットキュア[®]・ナックル》 カバー付きキャストシステム

従来のキャスト固定に代わる 手指固定の新しいカタチ。

手指の形状に合わせた **キャストステー** + **ステーカバー** だから、
その人にフィットしたギプス固定がすぐに行えます。



独自形状の
プレカットキャストステー + 専用のステーカバー



キャストステーをステーカバーに挿入。



ステーカバーを装着して
モールドイング。

独自形状のキャストステー
により患部にフィット



専用のステーカバーは
フロントオープンベルト構造



手指固定に必要な機能を搭載。

MP関節を目的の肢位に保持し、PIP関節の屈曲・伸展を阻害しないステーカバー形状



左右2本の甲ベルトにより、MP関節を屈曲方向へ保持する力を補助することができます。

小指、環指などの隙間を埋める
スペーサー



スペーサーを設置することで、ステーカバーと手指をフィットさせます。

治療経過に合わせて
交換ができるキャストステー



巻き直しできる別売りキャストステーを用意。交換することで、固定の緩みを低減します。

従来のキャスト固定に比べ、 処置の手間・労力を軽減。

従来のキャスト



フィットキュア・ナックル




プレカットしたキャストステータと専用ステータカバーだから、
【キャスト】、【トリミング】、【モールディング】の手間、労力が低減します。

フィットキュア・ナックルの装着方法について
動画で閲覧できます。 URL: <https://www.alcare.co.jp/fcn> ▶




「水濡れ」「蒸れ」のストレス低減に向けて、高速乾・高通気の生地を使用しています。


ステータカバーの肌側は吸水性が高く、
外側は水分を拡散しやすい、特殊構
造の吸水・速乾・通気性素材を採用。
患者さんの装着時の水濡れや蒸れの
ストレス低減に寄与します。

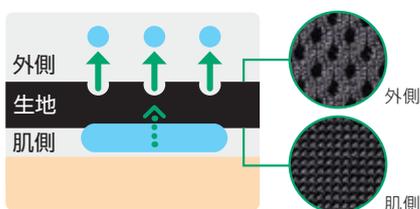

■フィットキュア・ナックル生地と弾力包帯(エラスコット)の性能比較

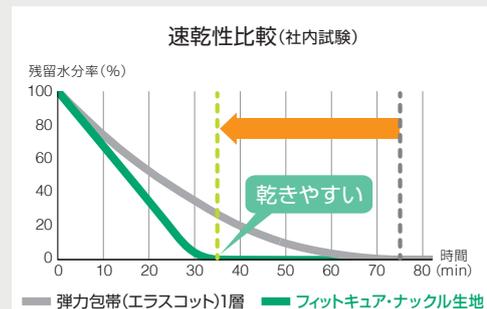

〈試験方法〉直径8cmサンプルを平行にシャーレに置いた状態で0.5mL量の水分を含ませ20℃ 20%の環境にて乾くまでの経過を残留水分率にて測定

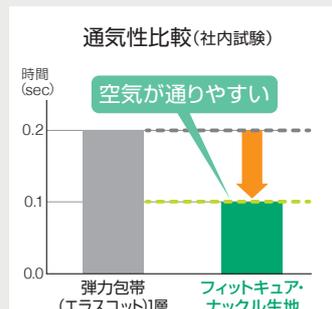

〈試験方法〉JIS L 1096に準拠 ガーレ形通気性試験機により300mLの空気が通過するのにかかる時間を測定

アルケアだから実現できた、 手指固定のための新しいスタイル。

独自形状のキャストステー + 専用のステーカバー

1955年、国産の石膏ギプス「スピードギプス」の開発、製造に成功して以来、
ギプス固定の製品開発と改良を重ねてきたアルケアの提案する、
新カテゴリーのカバー付きキャストシステム。

コンセプトは「ギプスをもっと快適に～簡単なギプス治療でギプス生活に笑顔を～」。
開発にあたりギプス使用者への調査を行い、ギプスへの不満や悩みを分析。
それらを解決するために、新たな視点でアルケアの持つ技術を融合し生まれました。



簡単なギプス治療でギプス生活に笑顔を


Fit Cure

 [フィットキュア]

カバー付きキャストシステム

Wearable Cast ～ ギプス固定のストレスフリーを目指して～

Fit: ぴったり合う、適合する + Cure: 治療する、硬化する

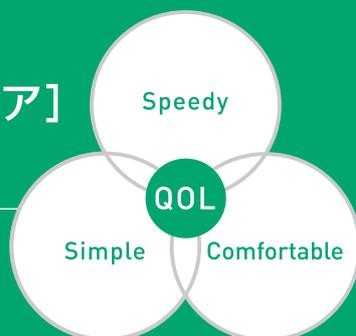

使用手順



1 キャストステートをアルミパックから取り出します。



2 キャストステートの通水口より水を入れ、キャストステート全体をよく濡らします。



3 キャストステートをステーカーに挿入します。



4 ステーカーを裏から手の甲に当て、手首ベルト、掌ベルト、周回ベルトの順にとめます。



5 掌ベルトを手のひらに通し、甲側へとめます。



6 周回ベルトをコカンに通し、甲側へとめます。



7 固定する肢位を保持し、甲ベルト(2カ所)をとめ、キャストステートが患部の形状に沿うようにモールドングします。



フィットキュア®ナックル Fit Cure-Knuckle

種類	商品コードNo.	適応範囲	1函入数	メーカー希望小売価格(本体価格)
右	20961	17~22cm	1セット/函	¥6,490(¥5,900)
左	20962	17~22cm	1セット/函	¥6,490(¥5,900)
キャストステート	20981	左右兼用	1枚/函	¥4,070(¥3,700)

一般医療機器/医療機器届出番号:13B1X00207000075

ALCARE

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825
www.alcare.co.jp

- 本カタログの内容は2021年2月現在のものです。
- 商品の仕様、デザインおよび価格は、改良や経済状況の変動などにより予告なく変更することがあります。
- 本カタログに掲載の写真は、実際の色とは多少異なる場合がありますので、ご了承ください。

お問い合わせ：コールセンター

フリーダイヤル **0120-770-863**

土・日・祝日を除く
午前9:00~午後5:00



この印刷物は、EPAのシルバー基準に適合した地球環境にやさしい印刷方法で作成されています
EPA:環境保護印刷推進協議会
<http://www.e3pa.com>