



サムフィット®・CM Thumb Fit-CM

種類	商品コード No.	規格	1箱入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
グレージュM	20991	手首周囲：15.5～17.0cm 母指周囲：6.0～7.0cm	1コ	¥2,475(¥2,250)
グレージュS	20992	手首周囲：14.0～15.5cm 母指周囲：5.5～6.5cm	1コ	¥2,475(¥2,250)
ブラックM	21001	手首周囲：15.5～17.0cm 母指周囲：6.0～7.0cm	1コ	¥2,475(¥2,250)
ブラックS	21002	手首周囲：14.0～15.5cm 母指周囲：5.5～6.5cm	1コ	¥2,475(¥2,250)



※図のように手首周囲を測ってください。母指周囲は目安としてください。
※規格が両方のサイズにまたがる場合は、大きいサイズをお選びください。

3ステップで行う、簡単装着操作

①本体に母指(親指)を通します。



②手首ベルトを手首に周回させてとめます。



③母指ストラップを手のひら側に回し、本体にとめます。



POINT 親指と人さし指の先端を付けて輪を作り、母指ストラップを手のひら側のパッドとピンクのステッチに向け、ステッチにかかるくらいの位置でとめてください。



使用手順は、動画もご参照ください。



サムフィット・CM 使用手順動画 右手用
<https://alcare.co.jp/TCMR>



サムフィット・CM 使用手順動画 左手用
<https://alcare.co.jp/TCML>



アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825
www.alcare.co.jp

お問い合わせ：コールセンター

フリーダイヤル **0120-770-863**

土・日・祝日を除く
午前9:00～午後5:00

●本カタログの内容は2021年8月現在のものです。
●商品の仕様、デザインおよび価格は、改良や経済状況の変動などにより予告なく変更することがあります。
●本カタログに掲載の写真は、実際の色とは多少異なる場合がありますので、ご了承ください。



サムフィット®・CM Thumb Fit-CM



「毎日着け続けたい」
装着満足度の向上を目指して

母指CM関節用サポーター
Thumb CM Joint Supporter

《サムフィット®・CM》 母指CM関節用サポーター


必要な保持と、手指動作の確保を両立。

母指を外転方向に開くことで、母指の対立動作・手関節動作を可能にします。母指の良肢位保持、生活動作を妨げにくい設計、簡単装着を実現することで、**装具の装着継続をサポート**します。

母指に必要な肢位保持を提供

良肢位を保持する構造

本体の立体縫製構造と、内蔵のパッド・ステーによる支持、母指ストラップの締結により良肢位の保持を実現します。

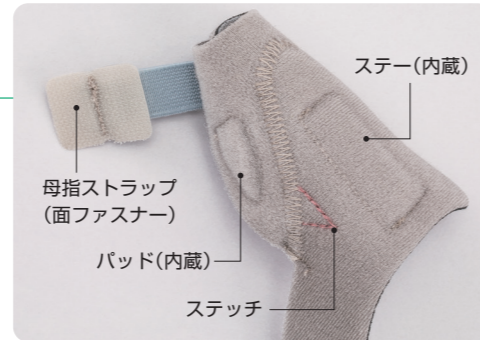

装着角度の試験結果

同一肢位において、装具の装着前と装着後の母指外転角度を計測し、装具装着により、以下のような結果となりました。掌側外転角度においては、有意な差が得られました。

	掌側外転角度			橈側外転角度		
	平均	装着前後差の平均	p	平均	装着前後差の平均	p
装着前	31.7 ± 6.6	—	—	23.5 ± 4.0	—	—
装着後	40.2 ± 4.7	8.4	<0.01**	25.1 ± 3.2	1.7	0.08

(健常女性: 22名、平均年齢72.3 ± 4.7歳)
 (統計的手法: wilcoxon符号付順位検定(p < 0.05))
 (試験期間: 2021年4月19日 ~ 5月19日 社内技術資料より)




サムフィット®・CM
Thumb Fit-CM

母指CM関節用サポーター
Thumb CM Joint Supporter

生活動作を妨げにくい装着を提供

動作評価試験結果

8種類の動作において、装具の装着前と装着後の動作に対する定性評価を実施した結果、以下のような結果となりました。

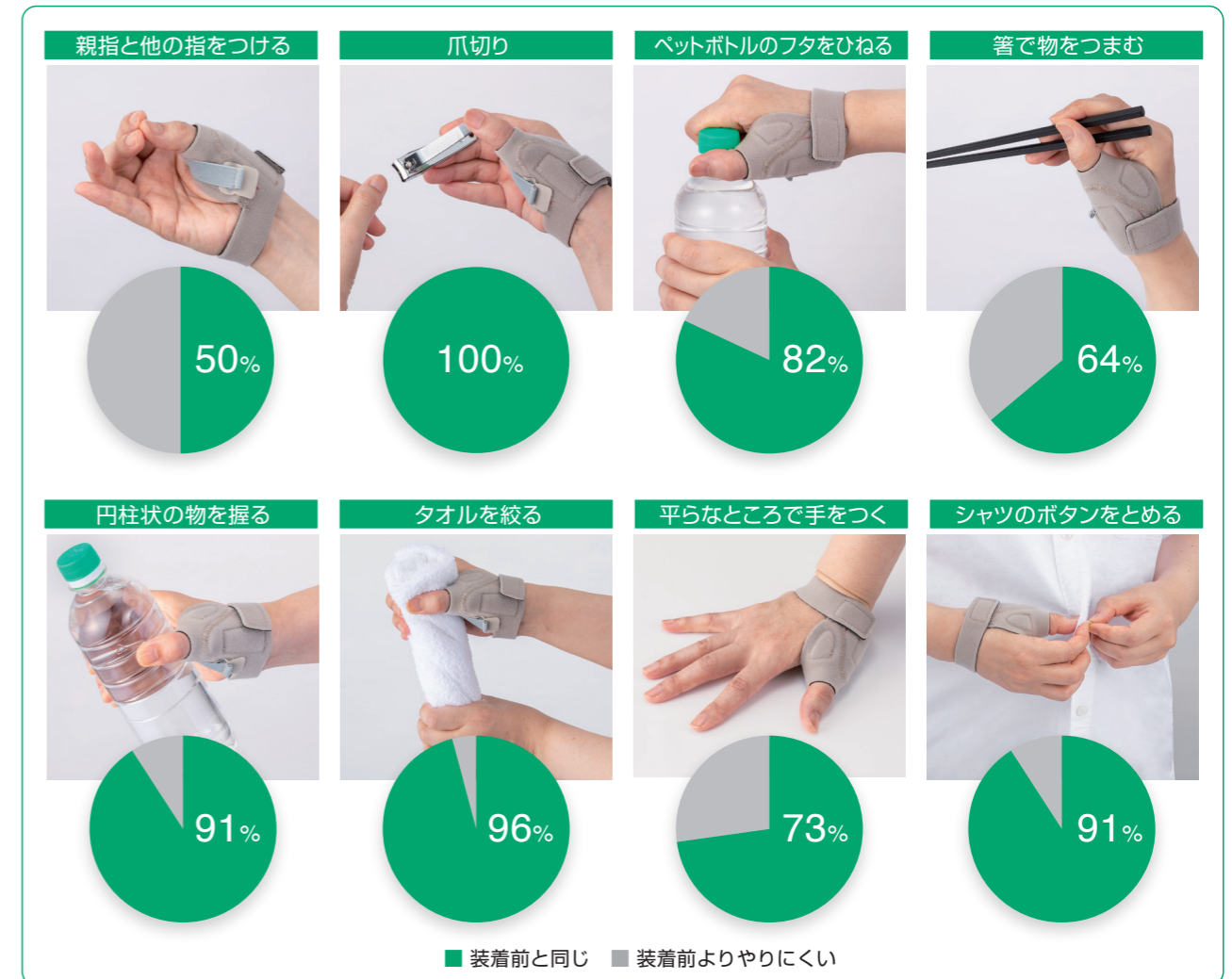

(健常女性: 22名、平均年齢72.3 ± 4.7歳)
 (試験期間: 2021年4月19日 ~ 5月19日 社内技術資料より)