

Mild Peel

皮膚への密着による固定と 低剥離刺激を両立 生体適合性の高いシリコーンを用い、皮膚 への密着による固定と低剥離刺激を両立

したアルケア独自の技術です。

種類	商品コード No.	規格	1函入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
_	21341	10cm×2m	1巻	¥4,070 (¥3,700)

■使用上の注意

⚠警告

- ・本品は医療機器ではありません、直接創部には貼らないでください。
- ・脆弱な状態の皮膚には貼付しないでください。

アドプロテープ®・クッション Adprotage Cushion


・口や鼻の周囲に使用する場合は、本品がしっかり貼り付けられ、剥がれないか頻繁に 確認してください。〔脱落によって本品の誤飲や窒息のおそれがある〕

使用方法

- ・本品は箱に入れてお使いください。
- ・貼付部位の水気、油分をよく取ってご使用ください。
- ・本品を剥がす際は、皮膚が変形しないように皮膚を押さえテープに対して180°の 方向にゆっくり剥がしてください。


■箱の使い方について



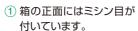



② ミシン目を内側へ折り ます。

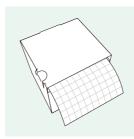

③ テープを引き出して ご使用ください。




アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013 TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825 www.alcare.co.jp

- ●本カタログの内容は2021年7月現在のものです。
- ●商品の仕様、デザインおよび価格は、改良や経済状況の変動などにより予告なく変更することがあります。

●本カタログに掲載の写真は、実際の色とは多少異なる場合がありますので、ご了承ください。

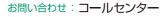

フリーダイヤル **0120-770-863** ±・日・祝日を除く 午前 9:00~午後 5:00









アドプロテープ®・クッション

Adprotape Cushion





守りたい皮膚に貼れる ハサミで加工しやすいテ 「思いどおりに使える。」

シリコーンゲルテープ Silicone Gel Tape

シリコーンゲルテープ Silicone Gel Tape

《アドプロテープ®・クッション》 シリコーンゲルテープ

皮膚にやさしく、思いどおりに使える。

皮膚にやさしいシリコーンゲルテープ アドプロテープ・クッションは、 除圧したい場所に合わせてカットして貼るだけのシンプルケアで看護業務を サポートします。

皮膚へのやさしさ


● 低剥離刺激なシリコーンゲル粘着剤

当社のシリコーンゲルドレッシング(エスアイエイドなど)と同じマイルドピール技術を採用。剥離時の皮膚刺激を軽減します。



●3mm厚のポリウレタンフォーム


柔軟性の高いポリウレタンフォームを採用し、外部からの圧迫低減だけではなく追従性の良さも両立。 また、粘着層に孔を空けた高通気設計で肌へのやさしさを追求しました

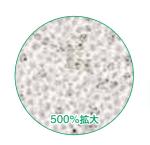

粘着剤層の拡大写真です。 薄く白濁している部分が 粘着層です。





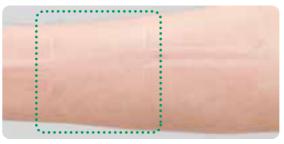

腕にカテーテルをサージカルテープで3時間固定し、アドプロ テープ・クッションの除圧性を簡易的に実験した結果です。

使いやすさ

●用途に応じた大きさ・形に自由に加工できる

テープを化粧箱から引き出して必要な分だけ ハサミで加工できます。剥離フィルムにメモリ が付いているのでサイズの目安が分かります。





使用例





