



メクレガード® テープ Mekure Guard Tape

種類	商品コードNo.	規格	1函入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
—	21011	3cm×13cm	15枚	¥1,650(¥1,500)

■ 貼り方



① 剥離シート①を剥がします。




② 面板背面に貼り付けます。



③ 剥離シート②を剥がし、なるべくシワが入らないように皮膚に貼ります。

【使用例】

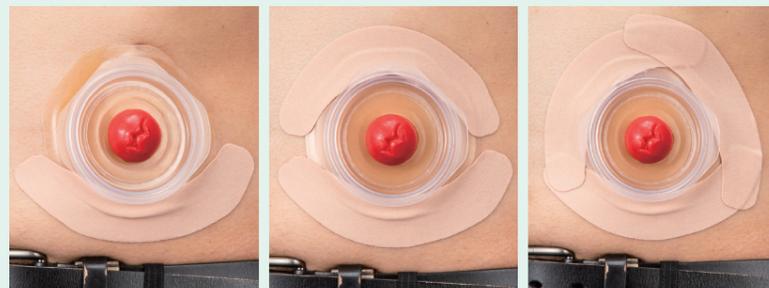

1枚

2枚

3枚

- * 皮膚障害の原因となる場合がありますので、本品を引き伸ばした状態で使用しないでください。
- * 固定したい部位が広範囲にわたる場合、複数枚ご使用ください。なお、本品は3枚で面板外周部を1周貼付することが可能です。

■ 剥がし方

使用后、テープ付近の皮膚を押さえながら、ゆっくり優しく剥がします。

面板を貼付したまま本品のみ剥がしたい場合は、面板およびテープ付近の皮膚を押さえながら、面板の内側から外側に向かってゆっくり剥がします。

※皮膚に密着して剥がれにくい場合は、剥離剤を使用してください。



アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825
www.alcare.co.jp

お問い合わせ：コールセンター

フリーダイヤル **0120-770-863**

土・日・祝日を除く
午前9:00～午後5:00

- 本カタログの内容は2023年8月現在のものです。
- 商品の仕様、デザインおよび価格は、改良や経済状況の変動などにより予告なく変更することがあります。
- 本カタログに掲載の写真は、実際の色とは多少異なる場合がありますので、ご了承ください。



メクレガード® テープ

Mekure Guard Tape



皮膚にやさしく、
しっかり貼れる、
セラミド配合
ハイドロコロイドテープ。

ストーマ用装具固定テープ
Skin Barrier Tape For Face Plate

《メクレガード®テープ》 ストーマ用装具固定テープ

面板外周部をやさしく、しっかり固定。 めくれ、浮き、剥がれを予防するストーマ用装具固定テープ。


伸長性・透湿性・操作性を併せ持つ、セラミド配合のハイドロコロイドテープです。



皮膚への配慮

セラミド配合ハイドロコロイド粘着剤を採用しています*。


*セラミドは皮膚に対する粘着力を向上させるために配合しています。

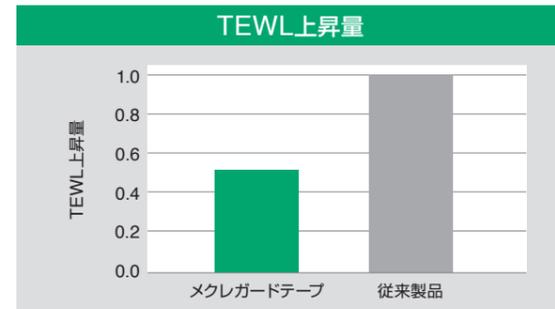

方法 毎日交換で5日分使用した後、Tewameter TM 300Tを用いて貼付部分と健常部のTEWLを測定し、テープ貼付によるTEWL上昇量の比を算出しました。
*従来製品のTEWL上昇量を1として算出

結果 メクレガードのTEWL上昇量は従来製品の約50%でした。


皮膚への違和感を低減する高伸長性基材を採用しており、皮膚を引っ張らないため刺激になりにくいです。

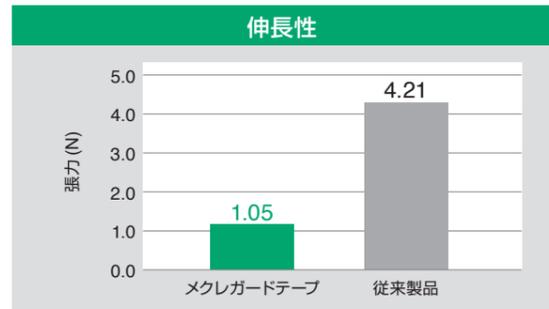

方法 幅3cmに裁断したテープを5cmの長さでつかみ、精密万能試験機(オートグラフ AGS-X)を用いて300mm/minの速度で引っ張り、テープの長さが6cmになった時点での張力を測定しました。


結果 メクレガードの張力は従来製品の1/4でした。

粘着層に薄型ハイドロコロイドを使用することで吸水と透湿を両立、貼付中蒸れにくく、発汗にも対応可能です。

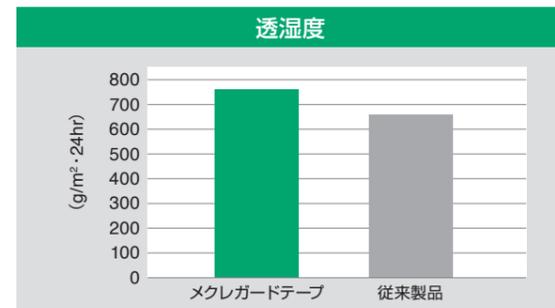

方法 ①Φ60mm、深さ15mmの透湿カップに約40℃の水を42mL入れ、Φ70mmに裁断したテープをカップ上面に貼り付け、パッキン・リング・蝶ナットで固定しました。
②重量を測定後、40℃、50%RHの恒温槽に24時間静置しました。
③24時間後に重量を測定し、重量変化から透湿度を算出しました。(JIS L 1099 ウォーター法に準ずる試験)


結果 メクレガードの水蒸気透過性は従来製品の同等以上の水蒸気透過性でした。

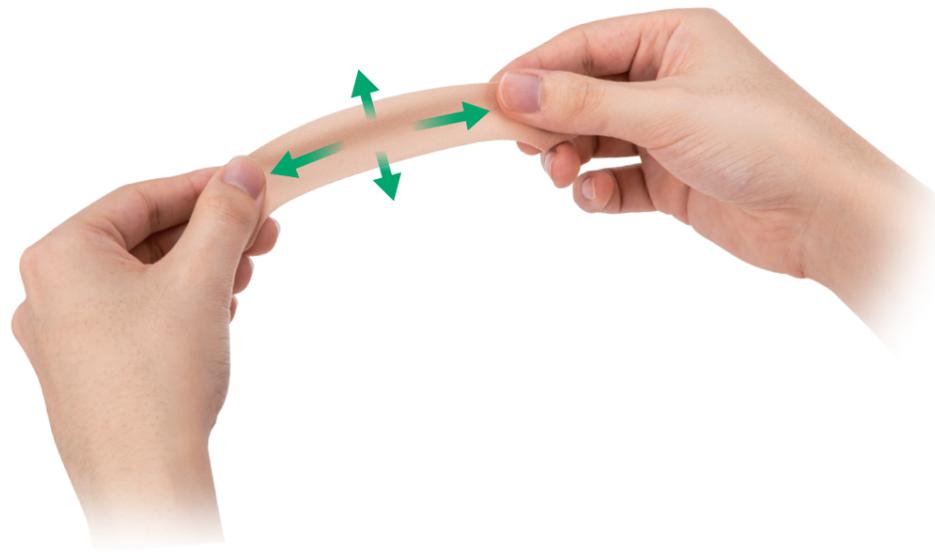

しっかり固定

薄型ハイドロコロイド材の使用により、ストーマ装具面板辺縁部のめくれ上がりを防止します。

基材に伸長性の高いストレッチ基材を採用しており、腹壁が動きテープが伸びても張力が発生しにくく、面板の固定を維持できます。

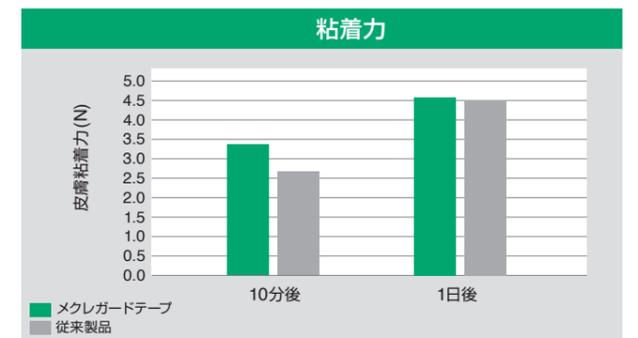

方法 テープを腹部に貼付し、10分後・1日後に精密万能試験機(オートグラフ AGS-X)を用いて1000mm/minの速度で引っ張り、皮膚に対する粘着力を測定しました。

結果 メクレガードの10分後粘着力は従来製品より25%高い値となりました。1日後粘着力は従来製品とほぼ同等でした。

使いやすさ

剥離紙を剥がす際、粘着面に触れにくい構造になっているため、装具を押さえながら貼付することが可能です。

目立ちにくい薄手のベージュ色です。

すぐに使えるプレカットタイプになります。

メクレガードテープは日本で販売しているストーマ装具の97%に適用可能です*。
(自社調べ)

*ストーマ装具832製品を対象に調査。3枚で装具面板1周を覆うことができるか検証した結果になります。
調査期間:2018年12月~2023年5月



実物大