



消臭試験結果

硫化水素(卵の腐った臭い／糞尿、生ごみ等)

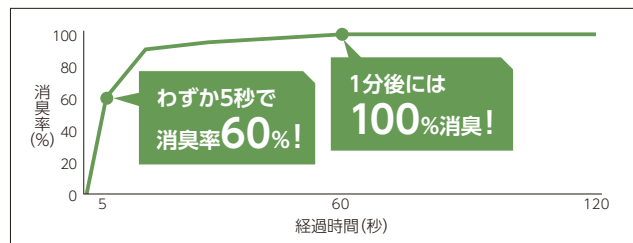

アンモニア(し尿臭／糞尿、生ごみ等)

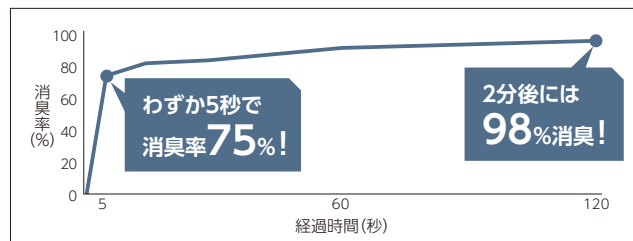


試験方法: 悪臭物質(硫化水素:初期濃度45ppm/アンモニア:初期濃度40ppm)を封入した3Lの袋に消臭剤を3プッシュ(0.9ml)スプレーし、袋を軽く振とうさせた後、5秒後、15秒後、30秒後、60秒後、120秒後のガス濃度を検知管法にて測定
※本試験結果は、試験値であり、保証値ではありません。 ※製造元調べ(2024年6月)

Deo Quick の消臭メカニズム

アミノ酸型消臭成分が、4大悪臭(アンモニア・硫化水素・トリメチルアミン・メチルメルカプタン)に対し、**酸化・還元・中和**などの化学反応で消臭します。

便臭成分(**酸性悪臭**)には**アルカリ性成分**、尿臭成分(**アルカリ性悪臭**)には**酸性成分**が、それぞれ反応し、不快な臭気を低減します。

■アミノ酸型消臭成分の構造(イメージ図)

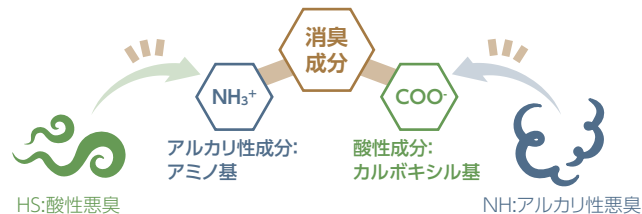

香りでごまかさず化学的に臭気を低減!



■デオクイックスプレー

種類	商品コードNo.	規格	メーカー希望 小売価格(本体価格)
ボトル	21751	300ml	¥2,090(¥1,900)
携帯タイプ	21752	9ml×3本	¥1,980(¥1,800)

販売元

アルケア株式会社

商品に関するお問い合わせ

お客様相談室 フリーダイヤル **0120(770)175**

受付時間 午前9:00～午後5:30(土・日・祝日を除く)

製造元

株式会社八木熊

いつもご購入の販売店へご注文をお願いいたします。

●商品の仕様、デザイン及び価格は、改良や経済状況の変動などにより予告なく変更することがあります。

531-0725

オストメイト用消臭剤

Deo Quick

デオクイックスプレー

気になるニオイを シユツと消臭



ニオイを気にせず快活な毎日を、
この1本とともに。

〈デオクウィックスプレー〉

便臭・尿臭を徹底消臭

アミノ酸型消臭成分が、便臭・尿臭など生活の中で気になる臭気に化学反応し、ニオイを元から低減します。

すばやく消臭

スプレー噴霧により悪臭との接触効率を上げ、消臭成分がすばやく反応することで即効性を発揮します。

無香料タイプ

香りでつつみ隠すことなくニオイの元を消臭するため、香り残りを気にせずご使用いただけます。

用途に合わせて選べる2サイズ

自宅用でたっぷり使える
大容量の「ボトル」と、
コンパクトで持ち運びし
やすい「携帯タイプ」を
ラインアップしています。

自宅トイレ
の壁や床にも
広範囲に
使える!

ボトル

手のひらや
ポケットにも
スッと収まる!

携帯タイプ

使用用途

ストーマ装具の中に直接スプレーしたり、室内空間や衣服などにスプレーしてご使用ください。

トイレの
前後に



外出先など、入ったトイレの
ニオイが気になる時、ニオイ
を残したくない時に。

部屋・
空間に



壁やカーテン、クッションにも
ご使用になれます。日常生活で
ニオイが気になる時に。

ストーマ
装具・
衣服に



ストーマ装具の中や表面、
衣服などニオイの付着が気にな
る時に。

仕事先・
旅行先に



ポーチに入れてストーマ装具と
一緒にコンパクトに持ち運び
たい時に。災害時の備えにも。

※すべての生活臭に効果があるわけではありません。

使用方法 ※ボトルの場合




①トリガーノズルにあるストッパー
をOPENに合わせてください。



②気になる臭いの元、空間、
壁、カーテンに数回スプ
レーして下さい。空間へ
のスプレーはまんべん
なく行ってください。

※壁、カーテンへスプレーする場
合には、20cm以上離れてスプ
レーしてください。

※携帯タイプは噴霧口の向きを
ご確認ください。

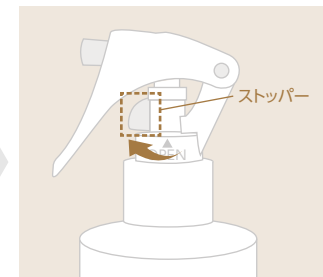

③使用後は、ストッパーをロック
してください。