

# アンシルク®・きらり Ansilk-KIRARI



快適な使い心地と  
サイズ設計にこだわった  
高齢者向け段階圧ソックス

パイル地やわらか段階圧ソックス  
Soft Pile Gentle Compression Socks

## アンシルク®・きらり Ansilk-KIRARI

種類	商品コードNo.	規格(中央値) [単位:cm]			1函入数	メーカー希望 小売価格 (本体価格)
		(周囲径)	(長さ)	(足長(参考))		
藍 L	21641	19~28 (23.5)	29~43 (36.0)	23~27 (25.0)	1足	¥2,915 (¥2,650)
藍M	21642	17~26 (21.5)	25~39 (32.0)	21~25 (23.0)		
藍 S	21643	15~24 (19.5)	21~35 (28.0)	19~23 (21.0)		
茜 L	21644	19~28 (23.5)	29~43 (36.0)	23~27 (25.0)		
茜M	21645	17~26 (21.5)	25~39 (32.0)	21~25 (23.0)		
茜 S	21646	15~24 (19.5)	21~35 (28.0)	19~23 (21.0)		

一般医療機器/弾性ストッキング/医療機器届出番号:13B1X00207000086

### 【警告】

#### 1. 適用対象(次の患者へ適用する際には、特に注意すること)

- 急性期の深部静脈血栓症患者。[肺血栓症を発症するおそれがあるため。]
- 動脈血行障害、うっ血性心不全及び装着部位に炎症や化膿、疼痛を伴う皮膚疾患、創傷のある患者。[圧迫により症状が悪化するおそれがあるため。]
- 装着部位に知覚障害のある患者。[痛み等の異常を認識できないおそれがあるため。]
- 糖尿病患者。[無症状の知覚障害や血行障害を併発している場合、痛み等の異常を認識できず、又、症状を悪化させるおそれがあるため。]
- 装着部位に極度の変形を有する患者。[適切な圧迫圧が得られないおそれがあるため。]
- 繊維に対して過敏症のある患者。[接触性皮膚炎を起こすおそれがあるため。]

#### 2. 使用方法

医師が必要と認める場合を除き就寝時は着用しないこと。[臥位になることで静脈還流等に変化が起こり、患者によっては必要以上の圧迫圧がかかるおそれがあるため。]

### 【禁忌・禁止】(次の患者には使用しないこと)

- 重度の動脈血行障害、うっ血性心不全及び有痛性青股腫の患者。[圧迫により症状を悪化させる危険性が高いため。]
- 化膿性静脈炎の患者。[閉血症や敗血症を発症、増悪させるおそれがあるため。]

### 【使用目的又は効果】

末梢から中枢に向かい漸減的に圧迫を加えることにより、下肢の静脈血、リンパ液のう滞を軽減又は予防し、静脈還流を促進する。

### 【使用上の注意】

#### 1. 使用注意(次の患者には慎重に適用すること)

- 本品の使用により、脚に疼痛、しびれ、皮膚や爪の変色、皮膚温の低下、かゆみ、発疹、かぶれ等の異常及びその他装着前に感じなかった不快感、違和感が生じた場合は、直ちに使用を中止してください。[動脈及び静脈の血行障害又は神経障害等を発症するおそれがあるため。]
- ギプス、外傷等により装着部位が長時間不動状態にあった患者は潜在的に深部静脈血栓症を発症している可能性があるため注意してください。

#### 2. 重要な基本的注意

- 正しい圧迫圧を得るため、装着部位の規定箇所を必ず計測し、正しいサイズの本品を選択してください。又、サイズ適応外の場合には使用しないでください。
- 本品を折り返して使用しないでください。[血行障害や神経障害等を引き起こすおそれがあるため。]
- 圧迫圧の過不足を防ぐため、たるみやしわのないように装着してください。本品が、装着中にたるんだり、しわが寄ったり、ずり落ちたり、誤った位置に装着されている場合には正しく装着し直してください。[適正な圧迫圧が得られず、又、血行障害や神経障害及び圧迫性潰瘍を引き起こすおそれがあるため。]
- 腫脹の軽減等により装着中に各部位の周径が変わった場合は、適切なサイズに変更してください。
- 本品に、破損(伝線、ほつれ、破れ等)がないことを確認してから装着してください。破損がある場合は適正な圧迫圧が得られないため使用しないでください。
- 本品は繊維製品のため、次のような場合には破損(伝線、ほつれ、破れ等)する場合がありますので注意してください。
  - 少しずつ引き上げず、強く引っ張り上げての装着
  - 爪が伸びていたり、反っていたりする足への装着
  - 肌荒れした手や伸びた指の爪での取り扱い
  - 鋭利なものへの接触
- 本品をはさみで切る等加工、修理を行わないでください。
- 本品は弾性ストッキングに精通した者が、必ず装着者に使用方法を説明し、正しい装着手順で使用を開始してください。又、在宅で使用する場合には同封の取扱説明書をお渡しください。
- 1日数回、皮膚や爪の色に変化がないか確認してください。又、1日1回は必ず、足全体の観察を実施するために履き直しを行ってください。
- 軟膏等の薬品や油脂、溶剤等が付着すると繊維が劣化しますので付着しないよう注意してください。
- 本品は個人用の製品であり、他人への使いまわしはしないでください。
- 本品の他に圧迫圧のある弾性ストッキング等を重ねて装着させる場合には、弾性ストッキングに精通した者が判断し、患者への指導を行ってください。

※その他の注意事項等情報については電子化された添付文書をご確認ください。

### Webサイトのご紹介

適正使用のための商品情報はこちら



## アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013  
www.alcare.co.jp

●本カタログの内容は2026年2月現在のものです。  
●商品の仕様、デザインおよび価格は、改良や経済状況の変動などにより予告なく変更することがあります。  
●本カタログに掲載の写真は、実際の色とは多少異なる場合がありますので、ご了承ください。



この印刷物は、EPAのシルバー基準に適合した地球環境にやさしい印刷方法で作成されています  
EPA:環境保護印刷推進協議会  
http://www.e3pa.com


## 《アンシルク®・きらり》 パイル地やわらか段階圧ソックス

# 効果と実用性を追求した、 高齢者のためのアンシルク。

《アンシルク®・きらり》は、高齢者向けのサイズ設計、段階的な軽度圧迫圧、快適な使い心地を備えた医療用弾性ストッキングです。座位時間が長くなりがちな高齢者の下肢の静脈還流を促進します。

### 高齢者向けのサイズ設計

- 高齢者特有の下肢形状(膝下丈が短い・足首とふくらはぎの周径バランスが異なる)に配慮した設計で、的確に下肢を圧迫します。
- 装着中に下肢の周径が変化しても圧迫圧が維持されるよう、サイズの適応範囲を広く設計することで、1足を長く履き続けることができます。

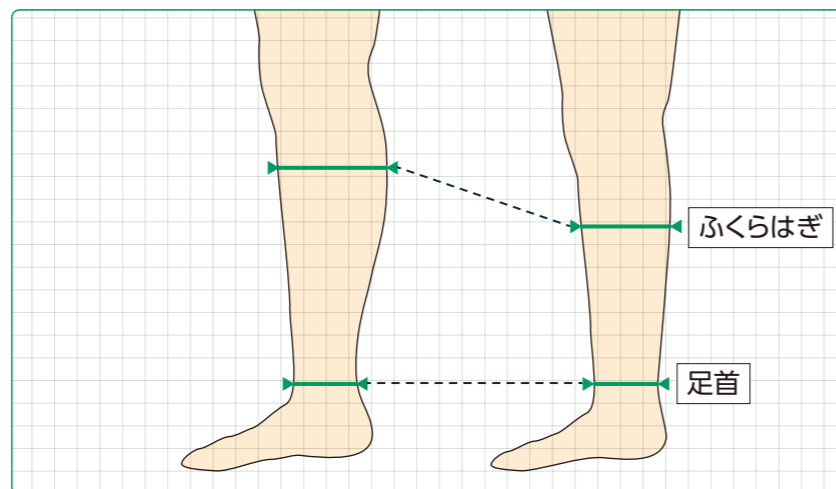


サイズ設計 アンシルクシリーズ  
(対象) (青壮年全体)

アンシルク®・きらり  
(高齢者)

### 段階的な軽度圧迫圧

- 足首からふくらはぎに向け段階的に圧迫圧を減少させるC&G (Compression & Gradation) 構造で、静脈還流を促進し、静脈血のうっ滞を軽減、予防します。
- 最も強い足首の圧迫圧も13hPa (10mmHg)と軽度のため、着圧に慣れていなくても不快感少なく着用できます。また、少ない力がかかと部分を通すことができるので、履きやすく、補助する際も履かせやすくなっています。

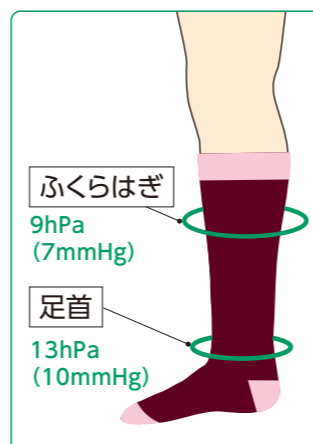

ふくらはぎ  
9hPa  
(7mmHg)

足首  
13hPa  
(10mmHg)

### 快適な使い心地

座位姿勢を想定した設計と実用的なデザインで、毎日快適に着用できます。

#### 幅広の口ゴム

座位姿勢が長くても膝裏へ食い込まない、柔らかく低圧の口ゴム。

#### 厚手の綿パイル生地

傷つきやすい皮膚をやさしく保護する、不快感の少ない肌触り。



#### シームレスなつま先

着脱時の引っかかりや当たりの不快感を軽減。クローズトゥで外的刺激から足先を保護。

アンシルク®・きらり  
Ansilk-KIRARI

パイル地やわらか段階圧ソックス  
Soft Pile Gentle Compression Socks



色は藍と茜の2色からお選びいただけます。



#### バイカラー

視力が低下していても、つま先・かかと・口ゴムを識別しやすく、スムーズな装着をサポート。つま先が淡色のため、足先のトラブルにも気付きやすく、明るい色で気分も晴れやかに。