

創傷衛生/ウインド・ハイジーンの実践

プロントザン 創傷用ゲル

プロントザン 創傷洗浄用ソリューション



プロントザン 創傷用ゲル 30g
プロントザン 創傷洗浄用ソリューション 350mL
プロントザン 創傷洗浄用ソリューション 1000mL

プロントザンは、プロントザン ゲルと、オプション品としてプロントザン ソリューションからなる

製品名	種類	容量	入数/箱	商品コードNo.
プロントザン 創傷用ゲル [プロントザン ゲル]	—	30g/本	20本	21831
プロントザン 創傷洗浄用ソリューション [プロントザン ソリューション] (創傷用ゲルと合わせて使用するオプション品となります。)	350mL	350mL/本	10本	21832
プロントザン 創傷洗浄用ソリューション [プロントザン ソリューション] (創傷用ゲルと合わせて使用するオプション品となります。)	1000mL	1000mL/本	10本	21833

高度管理医療機器 / 抗菌性創傷被覆・保護材 / 医療機器承認番号: 23000BZ100005000

【禁忌・禁止】

<適用対象 (患者)>

以下に対して本品を使用しないこと。

- ・ 本品の成分に対してアレルギーのある患者あるいはアレルギーの疑われる患者
- ・ 中枢神経系あるいは髄膜 [神経障害を引き起こす恐れがある]
- ・ 中耳あるいは内耳 [耳軟骨を損傷する恐れがある]
- ・ 眼の中 [眼の障害、損傷を引き起こす恐れがある]
- ・ 硝子軟骨および無菌関節手術 (無菌軟骨に接触した場合には、リング液あるいは生理食塩水で速やかに洗い流すこと) [軟骨を損傷する恐れがある]
- ・ 腹腔の洗浄 [過敏症を引き起こす恐れがある]

使用目的又は効果

皮下脂肪組織までの創傷 (Ⅲ度熱傷を除く。) に対する「創の保護」、「湿潤環境の維持」、「治癒の促進」、「疼痛の軽減」を目的とする。

保険適用

プロントザン ゲル
保険適用 (抗菌性創傷被覆・保護材 高度管理医療機器)

製品名: プロントザン ゲル (30g)

機能区分: 在宅処置用 008 皮膚欠損創傷被覆材 (2) 皮下組織に至る創傷用 ②異形型
病院処置用 101 皮膚欠損創傷被覆材 (2) 皮下組織に至る創傷用 ②異形型
処方用 012 皮膚欠損創傷被覆材 (2) 皮下組織に至る創傷用 ②異形型

保険償還価格: 1g当たり35円 (2026年4月現在)

※プロントザン ソリューションは保険償還の対象外となります。

販売元

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
www.alcare.co.jp

お問い合わせ: コールセンター

フリーダイヤル **0120-770-863** 土・日・祝日を除く
午前9:00~午後5:00

製造販売元 ビー・ブラウンエースクラップ株式会社

www.bb Braun.jp

製品のご使用にあたっては、最新の電子化された添付文書を必ずお読みください。
本カタログ掲載品の仕様・形状は、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。

販売名: プロントザン 承認番号: 23000BZ100005000



545-0426



プロントザン

創傷衛生/ウインド・ハイジーンの実践



プロントザン 創傷用ゲル 30g
プロントザン 創傷洗浄用ソリューション 350mL
プロントザン 創傷洗浄用ソリューション 1000mL

販売名: プロントザン

抗菌性創傷被覆・保護材

プロントザンは、プロントザン ゲルと、オプション品としてプロントザン ソリューションからなる。

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

機能及び動作原理等

本品は、オプション品のプロントザン ソリューションなどにより創部を洗浄後、プロントザン ゲルを塗布し、その上から市販の二次ドレッシングで覆い固定することで、微生物に対するバリア効果により創部を保護し、湿潤状態の維持を通じて、創傷の治癒を促進し、疼痛を軽減する。

本品は、創傷における菌感染および拡散を防止する作用を期待して、ポリヘキサニド (PHMB) を含有する。

含有成分等


プロントザン ゲル、プロントザン ソリューションは、2つの重要な成分であるベタイン、およびポリヘキサニド (PHMB) を含有しています。

界面活性剤 ベタイン (ウンデシルアミドプロピルベタイン)


創傷残屑に対して、浸透、阻害、洗浄、除去作用を有する界面活性剤です。

※本図はイメージです。


ベタイン分子

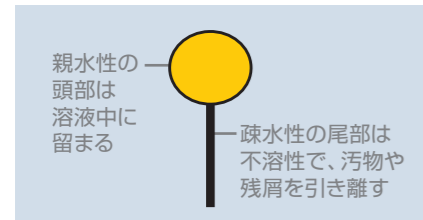

表面張力を低下させ分離を促進

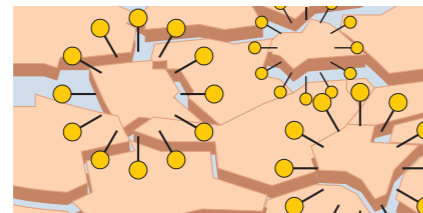


除去して溶液中で保持

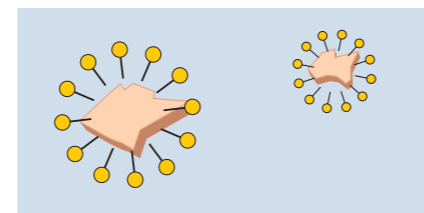

抗菌成分 ポリヘキサニド (PHMB)

ポリヘキサニドは、創部に存在し得るグラム陰性細菌、グラム陽性細菌および酵母などによる創傷における菌感染および拡散を防止する作用を期待して、含有した成分です¹⁾。

※本図はイメージです。

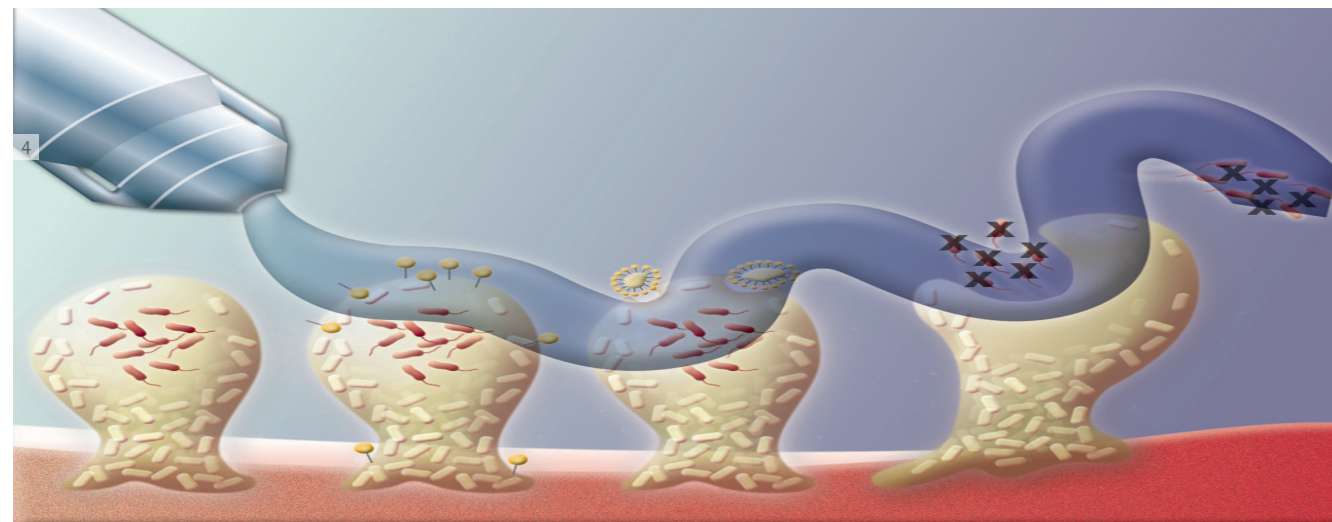

汚物、残屑の存在

プロントザン創傷洗浄用ソリューションで洗浄

汚物、残屑の除去

創面の洗浄、スラフの除去

1) Kaehn, K Polihexanide: A Safe and Highly Effective Biocide, Skin Pharmacol Physiol 2010;23(suppl1);7-16


使用方法等

※プロントザン ソリューションはプロントザン ゲルと組み合わせて使用するオプション品となります。
単品では使用せず、必ずプロントザン ゲルと合わせてご使用ください。

※本図はイメージです。

1 創部洗浄の準備

プロントザン ゲルを塗布前に創部を洗浄するため、ガーゼ、パッド等をプロントザン ソリューションで十分に浸します。

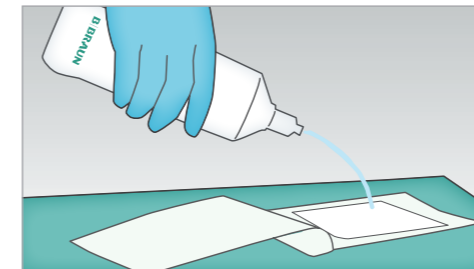


2 創部洗浄

浸したガーゼを創面全体および創周辺皮膚に密着するようにのせます。15分以上浸し、洗浄を行います。創部洗浄のため、必要に応じ、すでに創部に被覆され、固くなって、固着している被覆材の除去を容易にするため、被覆材をプロントザン ソリューションで湿らせ、除去しやすくします。




3 創部へ塗布

約3-5mmの厚さで創傷用ゲルを塗布します。感染防止のためノズルが傷に直接触れないようにしてください。状況に応じて舌圧子等をご使用ください。

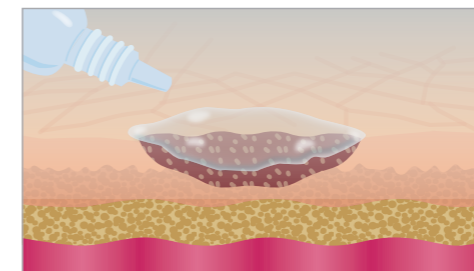

4 二次ドレッシングで被覆

ゲル塗布後に市販の二次ドレッシングで被覆します。

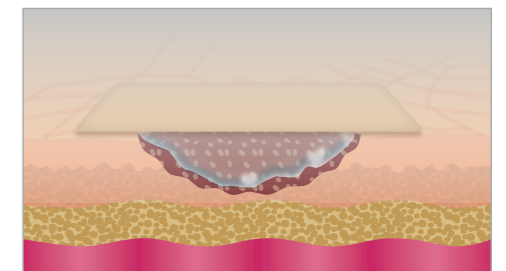

保管方法及び使用期間等

1. 保管方法：直射日光を避け、室温で保管。
2. 有効期限（自己認証[製造元データ]による）
開封前：直接容器外側に記載。
開封後：開封後8週間。

使用上の注意

1. 重要な基本的注意
 - 1) 本品を使用中にアレルギー反応や皮膚障害と思われる症状が現れた場合には、使用を中止し、適切な治療を行うこと。
 - 2) 連続使用期間は30日を超えないこと。
 - 3) 陰イオン界面活性剤、石鹸、軟膏、オイル、酵素と本品を併用しないこと。本品を使用する場合には、これらを十分に創部から除去してから使用すること（本品の有効性が損なわれる可能性があるため）
 - 4) 開封後8週間までは、繰り返し使用可能であるが、繰り返し使用するために本品の汚染を防ぐため、容器が創傷に直接触れないように気をつけること。容器が創傷に触れるなどして汚染された場合、本品は廃棄し、使用しないこと。
 - 5) 滲出液の貯留による浸軟を起こすことがある。本品の使用時には十分な観察を行い、本品の関与が否定できない異常が見られた場合には、直ちに使用を中止し、適切な治療を行うこと【本品は吸水性能を意図して設計されたものではない】。
 - 6) 滲出液の漏れが起こる前に、交換（再塗布）する【本品は吸水性能を意図して設計されたものではない】。
2. 不具合・有害事象
 - (1) 重大な不具合・有害事象
海外販売国において、非常に稀（1:10,000未満）であるが、アナフィラキシーショックあるいはアレルギー反応が報告されている。
 - (2) その他の不具合・有害事象
海外販売国において、スラフ形成、蕁麻疹、水疱、紅斑、発赤、発疹、灼熱感、疼痛が報告されている。
3. 妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用
 - 1) 妊娠中及び授乳中の女性に対しては、十分な検討を行った上で、使用すること（十分な臨床データがないため）。
4. その他の注意
 - 1) 本品は無菌充填されており、包装の破損等がない限り無菌性は保証されているが、使用時に包装・容器が破損又は汚損している場合には使用しないこと。
 - 2) 本品を再滅菌しないこと。