

《クイックカバー》は、シャワー時に末梢カテーテル刺入部およびルート接続部へ直接水がかからないようにカバーする商品です。安全にお使いいただくため用途以外の使用はせず、この取扱説明書に従いご使用ください。商品についてご不明な点は当社お客様相談室までご連絡ください。

使用上のご注意

*[使用上のご注意]では、その危険度に応じて区分をしております。

⚠ 警告 人身事故につながるおそれのある注意事項


- この製品は口ゴムの部分に天然ゴムを使用しています。天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがあります。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、適切な措置を施してください。
- 装着する部位に、傷、発疹等の皮膚疾患のある方はご使用にならないでください。また、血行障害を起こしたことのある方、皮膚の弱い方は使用前に医師にご相談ください。
- 使用中、または使用後に発疹、かゆみ、痛み、うっ血などの異常を感じたときは、速やかに使用を中止し、医師にご相談ください。
- シャワー時以外はカバーを外し、長時間に渡る使用は避けてください。(20分以内が目安)長時間の使用は、うっ血を招くおそれがあります。
- 使用中にカテーテル刺入部やルート接続部が濡れてしまう場合は直ちに使用を中止してください。
- 小児の手の届かない場所に保管してください。
- 高齢者など介助が必要な方は、必ず付き添いの方のもとでご使用ください。

注意 物損事故につながるおそれのある注意事項

- カバー内に水が入るおそれがありますので、浴槽につかたり、カバー口周辺にシャワーを直接かけないようにしてください。
- 上腕部側のカバー口が肘関節よりも10cm以上の位置にくるように装着してください。
- カバーの内側に汗や結露、カバー口からの伝い水等の水滴が溜まる場合があります。使用の際にはフェイスタオル等の吸水体を腕に巻き、刺入部に水が直接かからないようにご使用ください。
- 万一破損してしまった場合には直ちに使用を中止してください。

使用手順

- ① 輸液セットを外し、ヘパリンや生理食塩水によるカテーテルロックの後、テープでカテーテルを腕に固定します。
- ② 固定したカテーテルの上からタオルを巻きます。
- ③ ゴム2本の側を手首側にして、タオルがカバーの内側に収まるようにタオルの上からカバーをかぶせます。

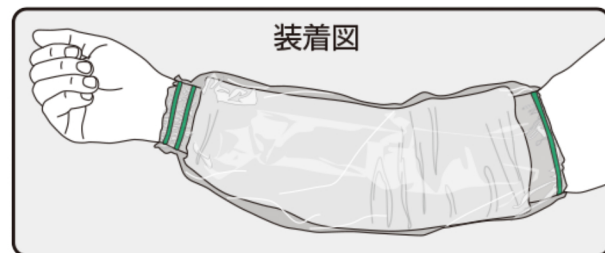

取扱上のご注意

組成・成分表示

- 本体カバー：エチレン-メチルアクリレート共重合体
- 口ゴム：天然ゴム

廃棄方法

- 上記組成・成分に関する各自自治体の廃棄区分に従ってください。

取扱方法

- 繰り返し使用する場合はカバーについた汚れや石けん、水、汗等をよく拭き取り、乾燥させてからご使用ください。
- 乾燥は、屋内で陰干しにしてください。
- 高温によりカバーが劣化するおそれがあります。暖房器具やアイロン、ドライヤーなど高温になるものの近くに置かないでください。

保管方法

- 水濡れに注意し、直射日光および高温多湿を避けて、室温保管してください。