

コロクリン[®]PC

Coloclean PC

人工肛門洗腸セット

Colostomy Irrigation Set

特長

- 洗腸時、および洗腸後に必要な器具がセットされています。
- 付属のバッグにコンパクトに収納でき、外出先などへの携帯も可能です。



種類	商品コードNo.	規格 (セット内容)	1函入数	メーカー希望小売価格(本体価格)
セット	13401	洗浄液バッグ : 1コ 2段式ストッパー : 1コ コロクリンPC用フェースプレート : 1コ コロクリンPC用ドレーンチューブ : 5枚 携帯用バッグ : 1コ ミニパウチ・Kスーパー : 2枚 ユーケアーC : 2枚	1セット	¥15,532 (¥14,120)

一般医療機器/ストーマ用洗浄キット/医療機器届出番号:13B1X00207000017

【使用目的又は効果】

結腸造瘻部位経由で結腸を洗浄するために用いる液体用容器、先端がコーン型のチューブ、又は留置シールドの付いた軟質で柔軟なカテーテルを含む用具を集めたパッケージをいう。

【警告】

- 適用対象
 - 1) 患者の状態を十分観察し、使用に適するか確認すること。
 - 2) 心臓病、糖尿病、高血圧、腎不全の患者には慎重に使用すること。
- 使用方法
 - 1) 洗腸前には必ずその日の体調を確認し、体調が悪い場合は使用しないよう患者に指導すること。又、洗腸中に気分が悪くなった場合は、直ちに微温湯の注入を中止するよう患者に指導すること。
 - 2) ストッパー使用前には毎回、ストッパーに傷や異物が無いことを確認すること。又、装着する際は、むりやりに押し込まないこと。
 - 3) 洗腸には、清潔な38～40℃の微温湯を使用すること。

【禁忌・禁止】

- 適用対象
- 1) 風邪、腹痛、下痢等の症状がある体調の悪い患者。
 - 2) 上行・横行結腸人工肛門または回腸人工肛門を有する患者。
 - 3) 全身衰弱の患者。
 - 4) 腸管内出血、腹腔内炎症、腸管に穿孔又はそのおそれのある患者。放射線治療を行っている患者。
 - 5) 下部消化管術直後の患者。
 - 6) 妊婦。

詳細は電子化された添付文書をご覧ください

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
www.alcare.co.jp

お問い合わせ：コールセンター

フリーダイヤル **0120-770-863** 土・日・祝日を除く
 午前9:00～午後5:00