

コロクリン[®]PC 細型ストッパー

1-Step Cone

人工肛門洗腸用ストッパー

特長

- 標準の2段式ストッパーでは大きくて、うまくフィットしない方に適しています。
- 先端が細いため、径が小さいストーマにも対応できます。
- 柔軟で、ストーマへのフィット性が高いシリコンゴム製です。



種類	商品コードNo.	規格(セット内容)	1函入数	メーカー希望小売価格(本体価格)
—	13415	シリコンゴム製(コネクター付)	1コ	¥3,630 (¥3,300)

一般医療機器/ストーマ用洗浄キット/医療機器届出番号:13B1X00207000017

【使用目的又は効果】

結腸造瘻部位経由で結腸を洗浄するために用いる液体用容器、先端がコーン型のチューブ、又は留置シールドの付いた軟質で柔軟なカテーテルを含む用具を集めたパッケージをいう。

【警告】

1. 適用対象
 - 1) 患者の状態を十分観察し、使用に適するか確認すること。
 - 2) 心臓病、糖尿病、高血圧、腎不全の患者には慎重に使用すること。
2. 使用方法
 - 1) 洗腸前には必ずその日の体調を確認し、体調が悪い場合は使用しないよう患者に指導すること。又、洗腸中に気分が悪くなった場合は、直ちに微温湯の注入を中止するよう患者に指導すること。
 - 2) ストッパー使用前には毎回、ストッパーに傷や異物が無いことを確認すること。又、装着する際は、むりやりに押し込まないこと。
 - 3) 洗腸には、清潔な38～40℃の微温湯を使用すること。

【禁忌・禁止】

- 適用対象
- 1) 風邪、腹痛、下痢等の症状がある体調の悪い患者。
 - 2) 上行・横行結腸人工肛門または回腸人工肛門を有する患者。
 - 3) 全身衰弱の患者。
 - 4) 腸管内出血、腹腔内炎症、腸管に穿孔又はそのおそれのある患者。放射線治療を行っている患者。
 - 5) 下部消化管術直後の患者。
 - 6) 妊婦。

詳細は電子化された添付文書をご覧ください

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013

www.alcare.co.jp

お問い合わせ：コールセンター

フリーダイヤル **0120-770-863**

土・日・祝日を除く
午前9：00～午後5：00