


アングルクロスは足関節の不安定性を軽減することを目的としたサポーターです。安全にお使いいただくため用途以外の使用はせず、この取扱説明書に従いご使用ください。商品についてご不明な点は下記宛までご連絡ください。

使用方法

- ①両端をもって、ベルトの中央ぐらいに足の土踏まずを置きます。この時、面ファスナーの付いている端が足の外側にくるようにしてください。
- ②面ファスナーの付いていない端を、足の甲の上に斜めに渡して、外くるぶしの上におきます。
- ③面ファスナーの付いている端を少し引っ張り上げるようにして、足の甲の上に斜めに渡して、内くるぶしの上まで通します。
- ④内くるぶしからアキレス腱の後ろを通して、外くるぶしの付近で面ファスナーを留めてください。面ファスナーを留める時、必ずベルトからはみ出さないよう注意してください。

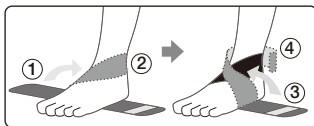

組成・成分表示

- ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル

廃棄方法

- 上記組成・成分に関する各自治体の判別方法に従ってください。

保管上のご注意

- 水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて、室温保管してください。

洗濯方法

- 30℃以下の水で中性洗剤を使用し、面ファスナーを閉じて手洗い(押し洗い)をしてください。
- 漂白剤、アイロン、洗濯機の使用や、ドライクリーニングは避けてください。
- 洗濯後の乾燥は、陰干しにしてください。

使用上のご注意



警告

- 本品の使用に際しては、必ず医師の指導に従ってください。
- 本品は化繊の素材を使用しております。使用により肌に異常が現れた時は、使用を中止し、医師にご相談ください。
- 本品の締め付けすぎにご注意ください。またしびれ等の異常を感じた時は速やかに使用を中止し、医師にご相談ください。
- 装着が正しく行われない場合、面ファスナー等で足がこすれてしまう場合があります。素足の場合は特にご注意ください。

注意

- 長期間の使用及び使用状況によっては破損する場合がございます。破損した場合は直ちに使用を中止してください。
- ストッキングや靴下を履いたうえで本品を装着する場合は、面ファスナーでストッキング等を引っかけないように、ご注意ください。

ALCARE

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013

www.alcare.co.jp

お客様相談室 ☎ 0120-770-175

ALCARE Co., Ltd.

19F, Arcacentral Bldg., 1-2-1 Kinshi, Sumida-ku, Tokyo, 130-0013, Japan

MADE IN JAPAN

種類	商品コード No.	適応範囲(足長)	幅×長さ
ブラック	16961	21~30cm	8cm×55cm
ベージュ	16971		



袋:PP