

# アングルフィット

## Anklefit

足関節動揺制限付サポーター  
Ankle Supporter for Ligament

### 取扱説明書

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、商品の特性を十分に理解してからご使用ください。
- 常に、この取扱説明書はお手元に置き、必要に応じてお読みください。

**ÄLCARE**



お客様相談室 ☎ **0120-770-175**  
(土・日・祝日を除く 午前9:00~午後5:30)  
[www.alcare.co.jp](http://www.alcare.co.jp)

**アルケア株式会社**

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013  
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825  
[www.alcare.co.jp](http://www.alcare.co.jp)

## 使用方法

- ① 面ファスナーはあらかじめ外しておきます。
- ② 本体に足を入れステーの中心線が踝の所までくるようにします。
- ③ 2分割された下の方から外踝下方に斜めにつけます。
- ④ 次に2分割された上の方を水平に引っ張りながら止めます。
- ⑤ クロスベルトを図のように8の字に止めます。(後を回り外側から足の甲を越えて内側に回って足底を通り外側に出し、再び足の甲でクロスさせて内側のステーカバーに止めます。)
- ⑥ 最後にステーの浮きを防止するストラップを止めます。

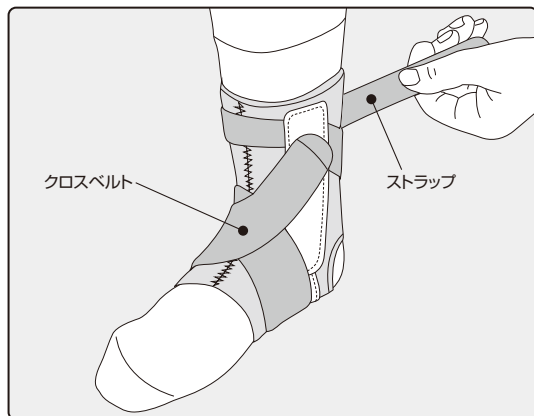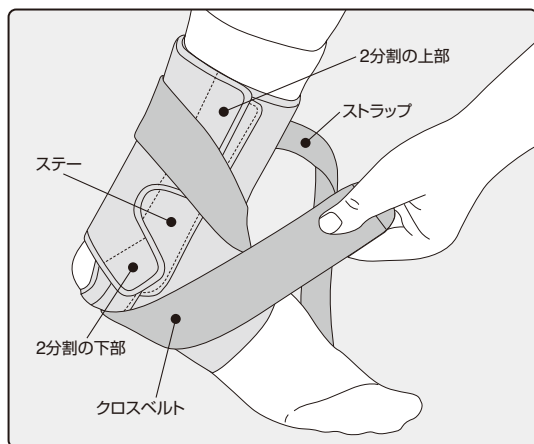

## 使用上のご注意

- 装着に際しては必ず医師の指導を受けてください。
- 使用方法に記された装着方法以外では、ベルト外れや循環障害の原因となりますので止めてください。
- ステーをカットして使う場合は、生地の破損を防ぐようエッジを滑らかにする等の処理をしてください。

## 取扱方法

- 洗濯は手洗いとし、30°C以下の水を使用してください。その際必ず両側のステーカバーからステーを外してください。
- 洗濯には中性洗剤を使用し漂白剤、アイロン、ドライクリーニングは避けてください。
- 洗濯後は陰干してください。

## 種類と規格

種類	商品コードNo.	規格	
		足長	1函入数
右	LL 13764	28.5~30.5cm	1コ
	L 13761	26.5~28.5cm	1コ
	M 13762	24.5~26.5cm	1コ
	S 13763	22.5~24.5cm	1コ
左	LL 13774	28.5~30.5cm	1コ
	L 13771	26.5~28.5cm	1コ
	M 13772	24.5~26.5cm	1コ
	S 13773	22.5~24.5cm	1コ