

バイオクローズ®・A

Bioclose-A

バイオクローズ®・Aフィルター

Bioclose-A Filter


コロストミー用クローズドパウチ
Colostomy Closed Pouch

取扱説明書

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、商品の特性を十分に理解してからご使用ください。
- 常に、この取扱説明書をお手元に置き、必要に応じてお読みください。

お客様相談室 ☎0120-770-175
(土・日・祝日を除く 午前9:00～午後5:30)
www.alcare.co.jp


使用手順(貼り方)

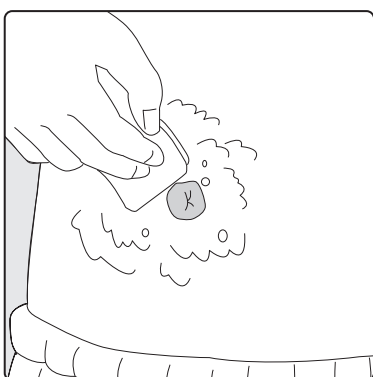

① ストーマ周囲を清拭します

装具を装着する前に、ストーマとストーマ周囲に付着した便をティッシュで拭き取ります。石鹸とぬるま湯をしみ込ませたガーゼでストーマ周囲を洗い、よく乾かしてください。

※ストーマ周囲皮膚を乾かす時、ドライヤーの熱風はストーマに刺激を与えますので、使用しないでください。

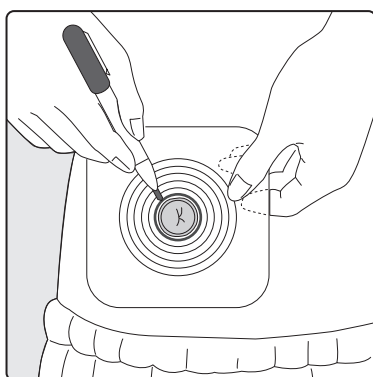

② ストーマの大きさを測ります

添付のCutting Gaugeに、油性ペンでストーマの大きさを書き写し、その大きさに合わせてハサミで穴を開けます。このCutting Gaugeは型紙として保管しておきましょう。

※ストーマの大きさは変動することがあります。1ヶ月に1回は大きさを測り、常に正しいストーマのサイズを知っておきましょう。


はじめに

《バイオクローズ》は閉鎖型の単品系(ワンピース)ストーマ装具です。安全にお使いいただくために、用途以外の使用はせず、この取扱説明書に従いご使用ください。

使用上のご注意


- ストーマ周囲には軟膏等、粘着力の低下の原因となるものは何も塗らないでください。粘着力低下によるモレの原因につながります。
- 剥離紙を剥がした面板の表面には、指などが触れないようにご注意ください。粘着力低下によるモレの原因につながります。
- 一度剥がした装具をもう一度貼ることはお止めください。粘着力低下によるモレの原因につながります。
- 面板に開ける穴は、最大直径50mmまでとしてください。有効径を超えて切ると袋の穴あきによるモレの原因につながります。
- 万一、お肌に合わない時には直ちに使用を中止し、医師または看護師にご相談ください。

使用する前に用意するもの

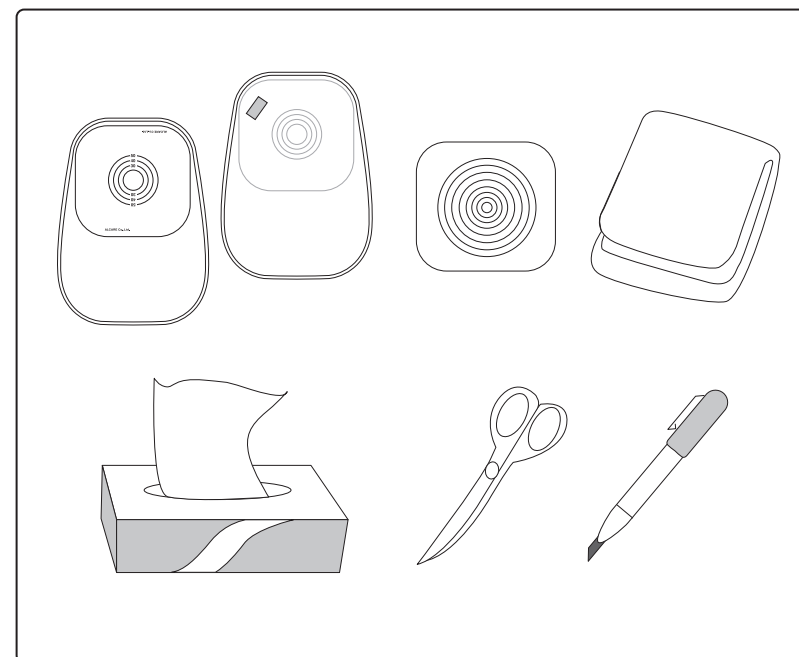

- ご使用の装具(バイオクローズ)
- Cutting Gauge
- ガーゼ
- ティッシュ
- ハサミ
- 細い油性ペンを用意してください。


使用手順(貼り方)

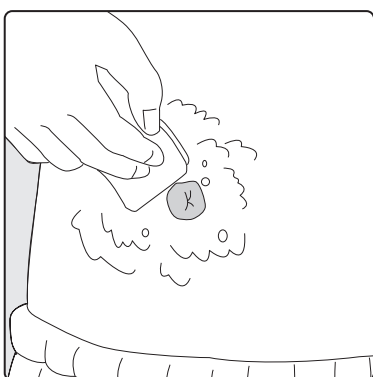

③ 面板に穴を開けます

穴を開けたCutting Gaugeを面板に重ね合わせ、面板にストーマの大きさを書き写します。書き写した線よりも1~2mm程度大きめに面板を切ります。


※面板に穴を開ける時、ハサミの先端でストーマ袋を傷つけないようにご注意ください。穴あきによるモレの原因となります。

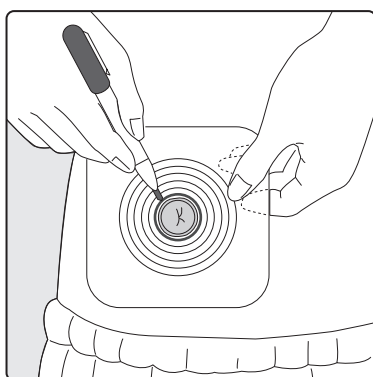

④ 剥離紙を剥がします

剥離紙には背割れが入っています。周囲の剥離紙は残して、中央の丸い剥離紙から剥がします。

※剥離紙を剥がした粘着面には、触れないようにしましょう。

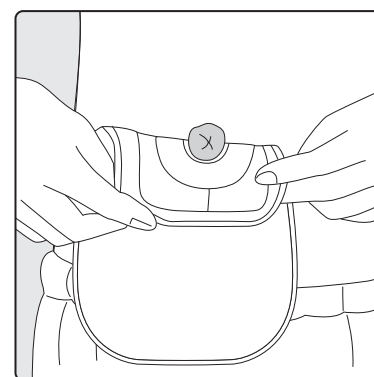


⑤ ストーマ装具を貼付します

面板に開けた穴にストーマを合わせて貼付し、周囲の剥離紙を剥がして面板全体を貼ります。この時、十分肌になじむようにストーマ周囲の粘着部全体を手で押さえてください。

※万一、粘着面にシワができるとうモレの原因につながりますのでご注意ください。

※面板が冷えていると貼り付きがわるくなる場合があります。この場合は剥離紙を剥がす前に、手で暖めることをおすすめします。

使用方法(剥がし方)

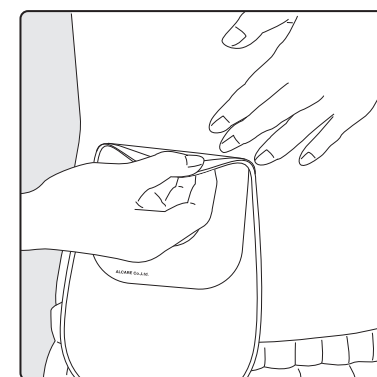

ストーマ装具を剥がします

ストーマ装具を剥がす時は、皮膚を傷つけないように片手で腹の皮膚を押さえながら、上から下へゆっくり、やさしく剥がします。

※面板が剥がしにくい場合は、剥離剤(プロケアーリムーバーなど)で、皮膚と面板の間を濡らしながら剥がすことをおすすめします。


※入浴直後は面板の温度が上がっているために粘着強度が高まり、剥がしにくいことがあります。入浴後に装具交換をする場合は、30分以上たって面板の温度が下がったのを確認した上で行ってください。

使用手順(ガス抜き脱臭フィルターの使い方(バイオクローズ・Aフィルターの場合))

フィルターは、ストーマ袋内に溜まったガスが徐々に抜けるようになっています。


※なお、フィルターはストーマ袋内の排泄物がフィルターを通して外に染み出すことがない構造になっていますので、安心してご使用いただけます。

重要 ただし、以下のような場合は、付属のフィルターカバーシールを貼って、通気孔をふさいでください。

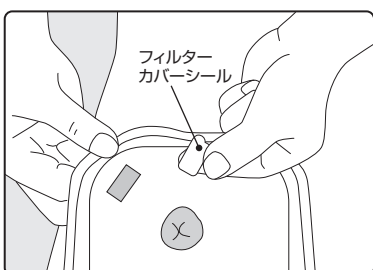

① ガスが抜けすぎるとき

ガスが抜けすぎると、真空状態のようになり、ストーマから排出された便が袋の中に落ちず、ストーマ周囲に貯留してしまうことがあります。このような場合は、付属のフィルターカバーシールを貼って、通気孔をふさぎ、ストーマ袋内にガスが溜まるようにしてください。ストーマ袋内にガスが溜まったら、シールを剥がして軽く手でストーマ袋を押してガスを出してください。

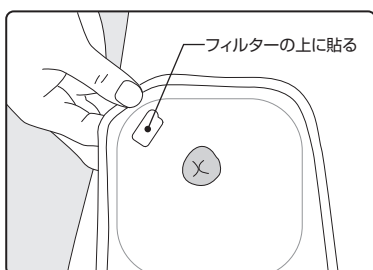

② 入浴の時

入浴時などフィルターが濡れる場合は、フィルターの上から付属のフィルターカバーシールを貼ってください。入浴時に外側からの水がフィルターに触れると活性炭が水を吸収してしまい、入浴後に活性炭を含んだ水が染み出すことがあります。衣服を汚してしまう原因につながりますので、ご注意ください。

廃棄上のご注意

使用済みの装具は、排泄物をトイレに流した後、新聞紙などに包み、ゴミ袋に入れてお捨てください。装具は通常「燃えないゴミ」ですが、地域により異なる場合があります。詳しくは各自自治体へご確認ください。

保管上のご注意

- 高温(40°C以上)・多湿の場所での保管
- 温度の低い場所(冷蔵庫など)での保管
- 直射日光が当たる場所での保管
- 圧迫がかかる場所での保管
- 大量購入による長期保管

※箱に記載されている使用期限を必ずご確認ください。

種類と規格

バイオクローズ・A

種類	商品コードNo.	規格		1函入数
		ストーマ有効径	袋サイズ(縦×横)	
M	18101	14~49mm(フリーカット)	210mm×150mm	20枚

バイオクローズ・Aフィルター

種類	商品コードNo.	規格		1函入数
		ストーマ有効径	袋サイズ(縦×横)	
M	18111	14~49mm(フリーカット)	210mm×150mm	20枚

ALCARE

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825
www.alcare.co.jp