

バストバンド・デラックス Bustband-DX

胸部固定帯
Rib Fixer Band

取扱説明書

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、商品の特性を十分理解してからご使用ください。
- 常に、この取扱説明書をお手元に置き、必要に応じてお読みください。

お客様相談室 ☎ 0120-770-175

www.alcare.co.jp

使用上のご注意

*[使用上のご注意]では、その危険度に応じて次の区分をしております。

警告 人身事故につながるおそれのある注意事項




- 使用中にずれやゆるみが生じた場合は、正しく装着し直してください。
- 本品の使用中に下記のような現象が発生した場合は、必ず医療従事者の指導に従ってください。
・痛み、しびれ、かぶれ、ムシなどの異常や違和感が発生した場合
・ゆるみもしくは過度の圧迫感がある場合(装着をやり直しても解決しない場合)
- 本品は化繊素材を使用しています。アレルギー体質の方や、皮膚に傷、腫れ、湿疹、炎症のある方は使用しないでください。
- 面ファスナーは表面が鋭利なため、手や指、衣服など柔らかいものが傷つくおそれがあります。
- 衣服の上から装着する際は、衣服の部材やシワによって過度の圧迫が生じないようにご注意ください。

注意 物損事故につながるおそれのある注意事項

- 面ファスナーを着衣に引っかけないようご注意ください。

使用方法

- ① 伸びない部分を患部にあて、息を吐いた状態で伸びる部分を適度な強さで引っ張り固定してください。
- ② 男性用は伸縮部が二分割にセパレートされておりますので、上・下の圧迫強度を自由に調節することができます。
- ③ 女性用は右・左用がございます。右の肋骨を固定する場合は右用、左の肋骨を固定する場合は左用をお使いください。

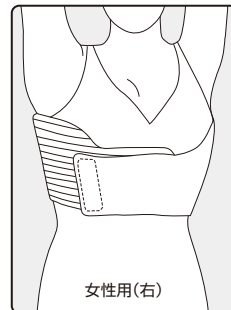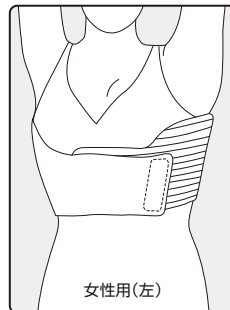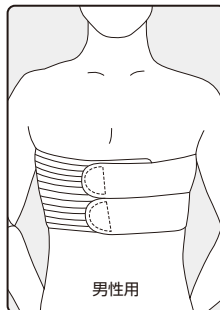

取扱方法

- 洗濯は中性洗剤を使用し、軽く押し洗いしてください。
- アイロン、漂白剤、ドライクリーニングは避けてください。

組成・成分表示

- ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル、綿

種類と規格

種類	商品コードNo.	規格			1箱入数
		胸囲	長さ×幅(背部)×幅(前部)		
男性用	10541	65~100cm	100cm×17cm×17cm		1コ
女性用(左)	10551	65~100cm	100cm×17cm×11cm		1コ
女性用(右)	10561	65~100cm	100cm×17cm×11cm		1コ

ALCARE

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825
www.alcare.co.jp