

# バストバンド・アッパー

## Bustband-Upper

胸部固定帯  
Rib Fixer Band

### 取扱説明書

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、商品の特性を十分に理解してからご使用ください。
- 常にこの取扱説明書をお手元に置き、必要に応じてお読みください。

お客様相談室 ☎ 0120-770-175  
www.alcare.co.jp

### 使用上のご注意

\*【使用上のご注意】では、その危険度に応じて次の区分をしております。

△警告……人身事故につながるおそれのある注意事項  
注 意……物損事故につながるおそれのある注意事項

#### 警告

- 本品は化学繊維の素材を使用しています。
- ご使用によりカブレ、発赤等、何らかの不具合が発生した場合には直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。

#### 注意


- 装着に際しては必ず医師の指導に従ってください。
- 面ファスナーを着衣に引っ掛けないようご注意ください。

### 洗濯方法

- 30℃以下の水で中性洗剤を使用し、手洗いしてください。
- 漂白剤、アイロン、乾燥機の使用やドライクリーニングは避けてください。
- 洗濯後の乾燥は陰干しにしてください。

### 使用方法

- 製品の上下を確かめてください。(面ファスナーとサイズ札が右側に来るようにします)
- 伸縮部を背中にあて、息を吐いた状態で、両端を適度な強さで引っ張り固定してください。

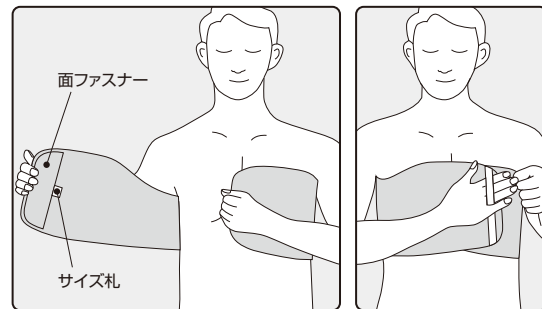

### 種類と規格

種類	商品コードNo.	規格		1箱入数
		胸囲	長さ×幅(前部)×幅(腋下)	
3L	16851	131~151cm	154cm×20cm×15cm	1コ
LL	16852	113~133cm	133cm×20cm×15cm	1コ
L	16853	95~115cm	116cm×20cm×15cm	1コ
M	16854	77~97cm	98cm×20cm×15cm	1コ
S	16855	59~79cm	82cm×20cm×15cm	1コ

# ALCARE

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013  
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825  
www.alcare.co.jp