


さゆうけんよう みぎ そうちゃく す
※左右兼用です。イラストは「右ひざ」への装着の図です。

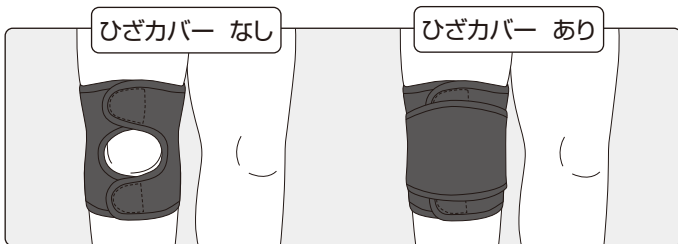


取扱上のご注意

- 廃棄方法** ●本品を廃棄する場合は、各自自治体の廃棄区分に従ってください。
- 保管方法** ●本品を保管する際は、車中など高温になる場所や低温になる場所、暖房器具の熱などが直接当たる場所などには置かないでください。
●水濡れに注意し、直射日光を避けて、室温保管してください。
- 洗濯方法** ●洗濯する前に、パッドを本体から取り外します。
●30℃以下の水で中性洗剤を使用し、手洗いしてください。
●他のものと一緒に洗濯することは避けてください。
●漂白剤、柔軟剤、洗濯機、乾燥機の使用、アイロン、ドライクリーニングは避けてください。
●洗濯後は陰干ししてください。
●洗濯後は取り外したパッドを正しく戻してください。
●本品が完全に乾いてから装着してください。面ファスナーは濡れた状態でとめると、外れるおそれがあります。

- 品質表示** ●本 体：ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル
●ひざカバー：ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル
●パ ッ ド：ポリエチレン、ナイロン

種類と規格

種類	商品コードNo.	規格	1袋入数
		(ひざ上10cm周囲)	
—	20621	27~35cm	1コ

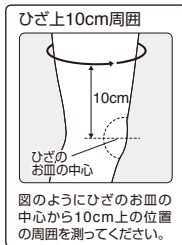

ケアプラス・ジュニアひざ Care Plus-Junior Knee

子ども向け膝サポーター
Knee Support for Children

取扱説明書

- 保護者の方は、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、商品の特性を十分に理解してからお子様へ説明してください。
- 常に、この取扱説明書はお手元に置き、必要に応じてお読みください。

お客様相談室 ☎ 0120-770-175
(土・日・祝日を除く 午前9:00~午後5:30)

www.alcare.co.jp

はじめに

《ケアプラス・ジュニアひざ》は、小学校高学年以上を対象に、ひざへ使用する商品です。安全にお使いいただくため、用途以外の使用はせず、この取扱説明書に従いご使用ください。商品についてご不明な点は当社お客様相談室までご連絡ください。

使用上のご注意

*[使用上のご注意]では、その危険度に応じて次の区分しております。


⚠ 警告 人身事故につながるおそれのある注意事項

- 本品の使用に際しては、取扱説明書をよくお読みになったうえ、必ず医師などの医療従事者は使用される方へ適正使用のための説明、指導をしてください。また使用される方は、医療従事者の指示、指導に従って本品を使用してください。
- 本品に使用している素材に対してアレルギー体質や過敏な方、皮膚に傷、腫れ、湿疹、炎症のある方は使用しないでください。
- 本品を使用中に、痛み、しびれ、皮膚障害などの異常が生じた場合、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。
- 本品に破損や縫製のほつれなどの不具合がある場合は使用しないでください。
- 本品の使用中にスレやゆがみが生じた場合、正しく装着し直してください。スレやゆがみがあると本品の正しい機能が得られない可能性があります。
- パッドの位置が適切な位置で装着されているか確認してください。パッドの位置が適切でないと本品の正しい機能が得られない可能性があります。
- 面ファスナーが汗や水で濡れた状態で使用しないでください。面ファスナーは濡れた状態だとめると外れるおそれがあります。
- 本体やひざカバーなどを過度に締めつけて使用しないようご注意ください。
- パッドや面ファスナーにより過度の圧迫やあたりがないことを確認してください。
- 入浴時や就寝時には装着しないでください。
- 本品を本人以外の方へ使用することはおやめください。
- 使用期限(パッケージに表示)を過ぎた商品は使用しないでください。

注意 物損事故につながるおそれのある注意事項

- 本品を修正・加工して使用しないでください。
- 面ファスナーのフックで傷つけるおそれがありますので衣服などにつかないように本品を装着してください。
- 本品は汗などの水濡れや摩擦により色落ちが生じるおそれがあります。衣料品などと一緒を使用する場合は、色移りにご注意ください。


各部の名称

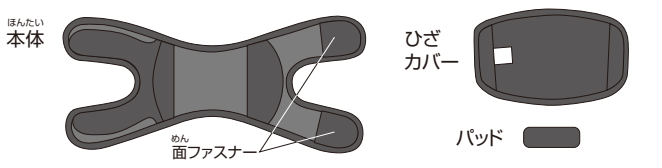


使用手順

※左右兼用です。イラストは「右ひざ」への装着の図です。

- ① 本体からひざカバー、パッドを取り、面ファスナーを外します。面ファスナーが内側にくるように、本体を適度に引っ張りながら、本体中央をひざ裏へ合わせます。

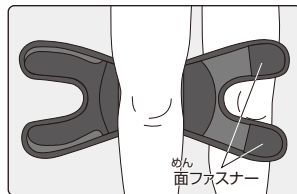


- ② パッドをひざのお皿の下の位置にくるように、本体に取り付けます。

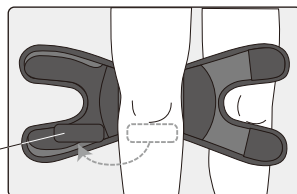


パッドをひざ下の位置に合わせます。

- ③ 本体を引っ張り、内側が上に重なるように面ファスナーをとめます。

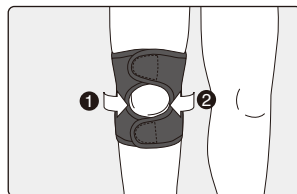

- ④ ひざカバーはひざのお皿を覆う際に使用します。使用する場合には内側から外側へとめるように本体に取り付けます。

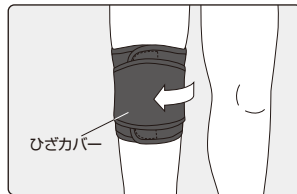

※装着できましたら、装着位置を確認してください。正しく装着されていなければ、装着し直してください。
※締めつけすぎで痛みなどがある場合は、本品をスレ落ちない程度にゆるめてください。