



キャストヒール Castheel

キャスト用補助踵
Polyurethane Walking Heel

取扱説明書

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、商品の特性を十分に理解してからご使用ください。
- 常に、この取扱説明書をお手元に置き、必要に応じてお読みください。

各部の名称と付属品

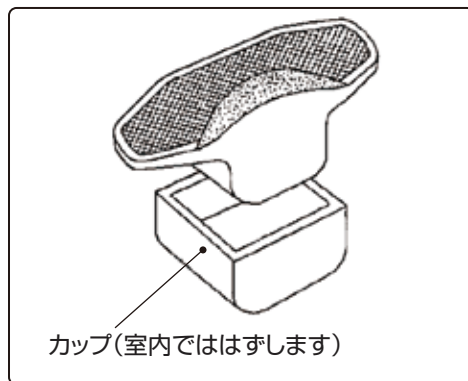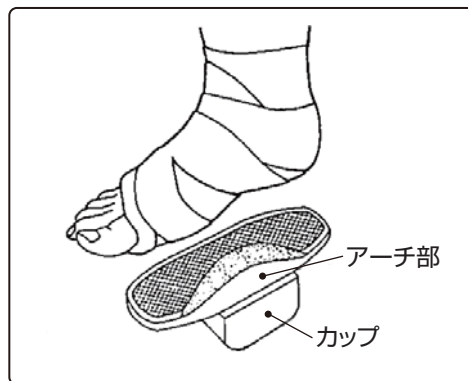

お客様相談室 ☎ 0120-770-175
www.alcare.co.jp

使用方法

- ヒールは左右兼用タイプです。アーチ部が土踏まず側になるように取付けてください。
- キャストへ取付けの際は、カップを付けたまま行ってください。カップをはずして巻き込むと、後でカップが正確に入らなくなることがあります。
- カップを付けた状態を室外用とし、室内でははずしてご使用ください。室内・外を逆に使うと、摩耗によりカップが正確に入らなかったり、歩行中に抜けることがあります。

使用上のご注意

- 本品を改造したりしないでください。
- 本品は、ディスプレイ製品なので、破損およびヒール、カップ底面の摩耗等が認められる場合には、新しい本品と交換してください。

組成・成分表示

- ポリウレタン

廃棄方法

- 上記組成・成分に関する各自治体の判別方法に従ってください。

保管上のご注意

- 水ぬれに注意し、直射日光および高温多湿を避けて、室温保管してください。

種類と規格

種類	商品コードNo.	規格	
		幅×長さ×カップ付高さ	1函入数
L	18051	5.8cm×18.0cm×4.1cm	6コ
M	18052	5.5cm×15.0cm×3.5cm	6コ
S	18053	4.6cm×15.0cm×3.5cm	6コ

ALCARE

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825
www.alcare.co.jp