

《キャストサスペンダー》は上肢ギブス固定後の腕つりを目的として開発されています。ご使用にあたっては、必ず医師にご相談のうえ正しくお使いください。また安全にお使いいただくため用途以外の使用はせず、この取扱説明書に従いご使用ください。なお、商品についてご不明な点は下記宛までご連絡ください。

取扱上のご注意


<ご使用前に>

●本品の適応範囲は、右記の表の通りになっています。装着者本人のサイズをご確認のうえ、ご使用ください。サイズは桁(隆椎～尺骨頭)を基準として選択し、身長は目安としてください。

<ご使用中に>

- 何らかの原因により、本体および各部品が破損した場合は直ちに使用を中止してください。そのまま使用すると上肢全体の確実な保持性が得られず、姿勢を悪化させる危険性がありますので十分ご注意ください。
- 使用中、スレやゆるみが発生したら直ちに正しく装着し直してください。スレやゆるみがあると確実な保持性が得られず、症状を悪化させる危険性がありますので十分ご注意ください。

適応範囲	
桁(隆椎～尺骨頭)	身長
65～90cm	145～185cm

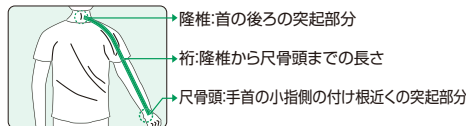


使用手順



患側の腕を本体袋に入れ、袋の端に肘を合わせます。ベルトを患側の上肢から肩にはわせ、首の後ろに回します。
※ベルトがねじれないようにご注意ください。
※イラストでは右腕に使用していますが、左腕に装着する場合はベルトのバックルの向きを反対にするのとねじれがなくなります。



ベルトのバックルを本体袋のバックルにカチッと音がするまで差し込みます。バックル同士が完全にはめ合わせてあるか確認してください。
※バックルからでたベルトの先端が正面にくるように差し込んでください。

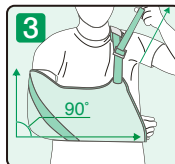

頭部でベルトの当たりが気になる部分にパッドの位置を調整します。患側の手首の位置を上げる場合は、ベルトの先端を引き上げてください。患側の手首の位置を下げる場合は、バックルのベルト通し部分をゆるめ、長さを調整してください。肘の角度は、90°を目安としてください。

組成・成分表示

ポリエステル・ナイロン・ポリプロピレン・ポリアセタール

廃棄方法

- 上記組成・成分に関する各自自治体の判別方法に従ってください。

保管上のご注意

- 水濡れに注意し、直射日光および高温多湿を避けて、室温保管してください。

取扱方法

- 30℃以下の水で中性洗剤を使用し、手洗いしてください。
- 漂白剤、乾燥機の使用、アイロン、ドライクリーニングは避けてください。
- 洗濯後は陰干してください。

ALCARE

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1
アルカセントラル19階 〒130-0013
www.alcare.co.jp

お客様相談室 ☎ 0120-770-175



ALCARE Co., Ltd.

19F, Arcacentral Bldg., 1-2-1 Kinshi,
Sumida-ku, Tokyo, 130-0013, Japan
MADE IN JAPAN

使用上のご注意

- ⚠ 警告……人身事故につながるおそれのある注意事項
- 注 意……物損事故につながるおそれのある注意事項

警告

- 本品の使用に際しては、必ず上記使用手順および医師の指示に従ってください。
- 本品は単回使用製品です。1名に使用した本品は、再使用しないでください。
- 上記使用手順を参考に、必ず正しい肢位で装着してください(手首が本体袋の中に収まる位置を目安に調整してください)。
- 本品の使用により、しびれ、痛みなどの異常を感じたときは、速やかに使用を中止し、医師にご相談のうえ指示に従ってください。
- 本体袋とベルトのバックルはしっかりとめ合わせてください。はめ合わせが甘いと、使用中に本体の袋部分がスリ落ちるおそれがあります。
- ベルトは必ず適切な長さに調整し、装着してください。ゆるみがあると上肢全体の確実な保持性が得られず、姿勢を悪化させる危険性がありますので十分ご注意ください。
- ベルトの先端からバックルまでが長すぎる場合には、切らずにベルトに巻きつけてください(先端部分を切るとベルトがバックルから抜けるおそれがあります)。
- 本品は化繊を使用しておりますので、アレルギー体質などの方は、ご使用前に医師にご相談ください。また、ご使用により肌に異常が生じた場合は、直ちに使用を中止し、医師にご相談のうえ指示に従ってください。
- 使用時は、決してバックルに触れないでください。バックルが外れるおそれがあります。
- 就寝時にはご使用にならないでください。
- 適応範囲外のサイズの方は、ご使用にならないでください。

注意

- 本品は左右兼用です。それぞれ使用手順にもつき正しく装着してください。
- 使用後は、風通しのよい場所に保管してください。