

クリアヘッシブ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】


1. 種類

種類	規格
2号	5.0cm×5.0cm
3号	7.5cm×5.0cm
6号	15.0cm×5.0cm
9号	22.5cm×5.0cm
12号	30.0cm×5.0cm

2. 形状・構造

本品は、①フィルム②ハイドロコロイドからなる粘着層③剥離紙及び剥離フィルムの三層構造です。

<構造図>

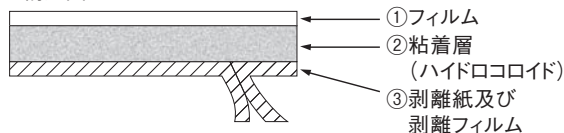

3. 原理

本品の粘着層は吸水性があり、体液を吸収する。フィルムには防水性があり、適応部位を被覆することで外部汚染から皮膚を保護する。

【使用目的又は効果】

術創等の創の被覆・保護

【使用方法等】

1. 貼付前

- 1) 創及び創周囲の皮膚を洗浄し、必要に応じて消毒を行います。
- 2) 創周囲の皮膚を十分に乾燥させます。

2. 貼付

- 1) 本品の粘着層の皮膚貼付面に手指などが直接触れないように注意しながら剥離紙及び剥離フィルムを除去し、創が中央にくるように、創にしっかりと貼付します。
- 2) 必要に応じて粘着テープなどの適当な手段で本品を固定します。


—注意—

屈曲部などの可動部への貼付や体位変換により、本品のずれが予測される場合には予め本品の周囲を固定してください。

3. 交換

- 1) 本品は、1週間に1～3回を目安に交換してください。又、貼付している本品が次のようになったら交換してください。
 - ①本品が吸水し、白く不透明な状態で創の観察が十分に行えなくなった場合。
 - ②貼付状況を観察し、滲出液の漏れ、周囲の剥がれなどが起きたとき又は起きそうな場合。

- 2) 本品の除去に際しては、周囲の皮膚を軽く押さえながら本品の四隅から、ゆっくりと注意深く剥がします。

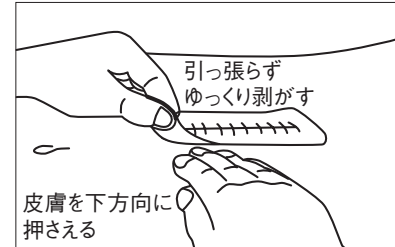

- 3) 周囲皮膚及び縫合糸などに本品の粘着層が固着した場合は無理に剥がさず、ガーゼ等を生理食塩水などでしめらせたものをあて、柔らかくした後に剥がしてください。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 本品は、必ず医師の指示・指導のもと使用すること。
- 2) 本品使用中に発赤、びらん、そう痒等の皮膚障害と思われる症状が現れた場合は、本品の使用を中止し、適切な処置を行うこと。
- 3) 創面に臨床的感染、又はそのおそれがある場合は、使用を中止し、適切な処置を行うこと。

2. その他の注意

- 1) 滅菌包装が汚損、又は破損している場合及びそのおそれがある場合には使用しないこと。
- 2) 滅菌包装を開封したら直ちに使用すること。
- 3) 一度貼付した本品を再使用しないこと。
- 4) 軟膏・クリーム等の薬剤と本品を併用しないこと。
- 5) 本品を再滅菌しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- 1) 小児の手の届かないところに保管してください。
- 2) 水濡れ、直射日光及び高温・多湿を避け、室温で保管してください。
- 3) 品質を保持するために、他の容器に入れ替えないでください。
- 4) 有効期間を過ぎた本品は使用しないでください。

2. 有効期間

パッケージに表示（自己認証データによる）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

1. 製造販売業者

アルケア株式会社

2. 連絡先

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階
お客様相談室：☎ 0120-770-175