

# デオファイン<sup>®</sup>潤滑消臭剤

## Deofine Lubricating Deodorant

ストーマ装具用潤滑消臭剤  
Lubricating Deodorant for Ostomates

### 取扱説明書

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、商品の特性を十分理解してからご使用ください。
- 常に、この取扱説明書はお手元に置き、必要に応じてお読みください。

お客様相談室 ☎0120-770-175  
(土・日・祝日を除く 午前9:00～午後5:30)  
www.alcare.co.jp

**ALCARE****アルケア株式会社**

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013  
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825  
www.alcare.co.jp

1907-1

## はじめに

《デオファイン潤滑消臭剤》は排泄物を排出しやすくする潤滑性のあるストーマ装具用消臭剤です。

本品にはボトル、ハンディーおよび詰め替えタイプがあります。

安全にお使いいただくため、用途以外の使用はせず、この取扱説明書に従いご使用ください。

なお、商品についてご不明な点は、お客様相談室までお問い合わせください。

## 使用上のご注意

\*[使用上のご注意]では、その危険度に応じて次の区分をしております。

⚠ 警告……誤った取り扱いをすると、中等度以上の人身事故が想定される内容を示します。

注 意……誤った取り扱いをすると、人が軽度の傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

ご使用前には、医師または看護師の指導を受けたうえ、注意事項を熟読し、本品の特性を十分理解してください。

### ⚠ 警 告

- 本品は食べ物ではありません。誤飲しないように高齢の方、認知症の方、乳幼児および小児の手が届かない場所に保管するなど適切に管理をしてください。
- 使用中に発赤、かゆみ、刺激など異常が発生した場合には、直ちに使用を中止し、異常がある部位を水でよく洗い流し、医師に相談してください。
- 皮膚・目・粘膜や傷、腫れ物、湿疹などの異常がある部位へ接触させないでください。万一、接触した場合には、直ちに水でよく洗い流し、医師に相談してください。

### 注 意

- ボトルの先に潤滑消臭剤が付着した場合は、拭き取ってください。
- ボトルの先に便が付着した場合は、拭き取る、または新しいものに交換してください。
- ボトルのキャップが破損した場合は、新しいボトルに交換してください。
- ハンディーは1回使い切りタイプです。開封後に残った場合は、捨ててください。
- ストーマ袋内に充填して使用する他の製品との併用は避けてください。
- 配合成分に過敏な方は慎重にお使いください。

## 使用方法


### ● ストーマ袋交換時

- ① 下部開放型ストーマ袋の場合、面板の剥離フィルムを剥がす前に、必ず排出口を閉じます。


- ② ボトルの場合は約10mL(小さじ2杯)、ハンディーの場合は袋の中身を全て入れてください。

#### ご注意

面板の粘着面、ストーマ袋の嵌合や閉鎖具に潤滑消臭剤が付着しないようご注意ください。

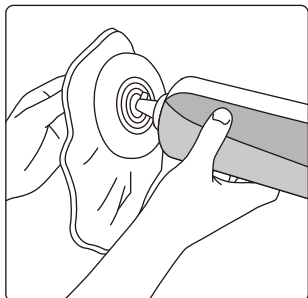

- ③ 潤滑消臭剤がストーマ袋全体に広がるようにストーマ袋を軽くもんでなじませてから装着します。

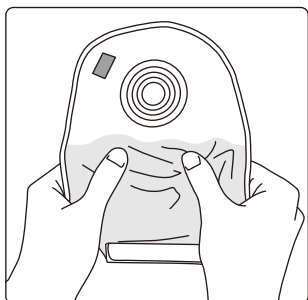

### ● 外出時にご使用の場合


外出時には、ハンディーが便利です。

### ● ストーマ袋装着中


- ① 排泄物を排出したあとにストーマ袋の排出口から潤滑消臭剤を入れます。

#### ご注意

投入する際には、ボトルの先がストーマ袋に触れないようにしてください。

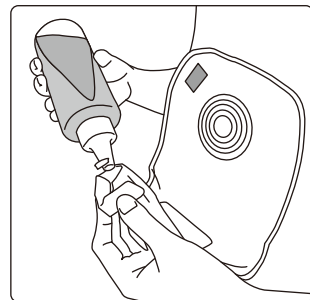

- ② 潤滑消臭剤がストーマ袋全体に広がるようにストーマ袋を軽くもんでなじませます。

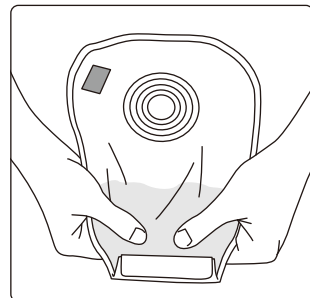

### ● ボトルへの詰め替え方


- ① ボトルと詰め替えパウチのキャップを開けます。



- ② 注ぎ口部分を空のボトルの口元に近づけて、ゆっくりと中身を移しかえてください。

#### ご注意

\*キャップが開いているときに袋を強く持つと液が飛び出る場合がありますので、ご注意ください。  
\*詰め替えの際には、必ずデオファイン潤滑消臭剤のボトルに詰め替えてください。  
\*ボトルを洗浄した場合は、十分に乾燥してから詰め替えてください。

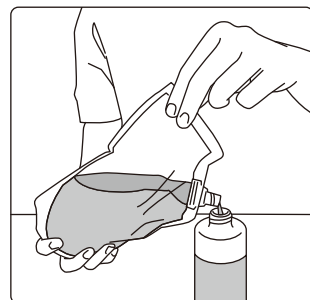

## 取扱上のご注意

### 保管方法

- 直射日光、高温多湿を避け、箱に入れた状態で室温保管してください。
- ボトル、詰め替えタイプは使用后、必ずしっかりキャップを閉めて、立てて保管してください。

### 全成分

- 精製水、柿抽出物、プロピレングリコール、カルボキシメチルセルロース、さとうきび抽出物、ミント香料、青色1号、エチルパラベン、ブチルパラベン、フェノキシエタノール