

つながりあて、ひらくケア。

デオギプスカバー


Deo Gyps Cover

ギプス用消臭カバー
Deodorant Gyps Cover



適応範囲(ギプス手首付近周囲): **22～27cm**

商品コードNo.: **21631**

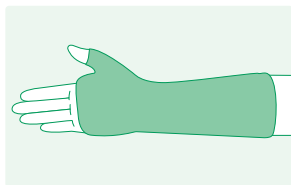


使用上のご注意

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、商品の特性を十分理解してからご使用ください。
- 常に、この取扱説明書はお手元に置き、必要に応じてお読みください。

各部の名称


※本品は左右兼用です。

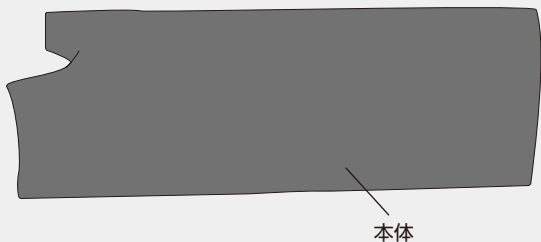

製品仕様およびデザインは、品質改良にともない変更する場合がございます。それにより、イラストと実際の製品とで若干の違いが生じる場合がございますことをご了承ください。

装着図


※本品は左右兼用です。イラストは「右手」装着の図です。

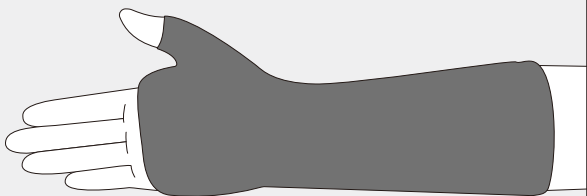

使用手順


※本品は左右兼用です。イラストは「右手」装着の図です。

- 手指を通してギプスの上に装着します。

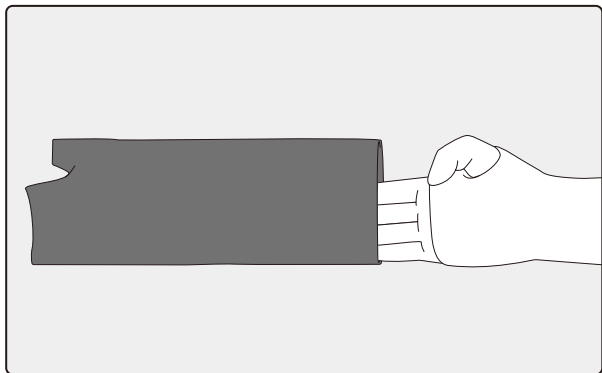

種類と規格

種類	商品コードNo.	規格 (ギプス手首付近周囲)	1袋入数
L	21631	22~27cm	1枚
M	21632	17~22cm	1枚

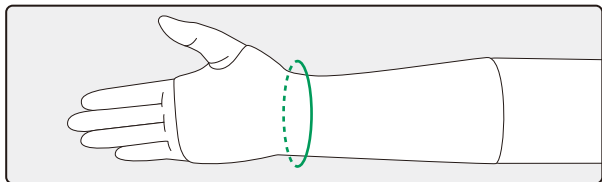

※図のようにギプス手首付近の周囲を測ってください。

※規格が両方のサイズにまたがる場合は、大きいサイズを選択してください。

取扱説明書

はじめに

《デオギプスカバー》は、ギプス特有のにおいの消臭と汚れなどによる見た目の不快感の軽減を目的に開発された商品です。安全にお使いいただくため、用途以外の使用はせず、この取扱説明書に従いご使用ください。商品についてご不明な点は当社お客様相談室までご連絡ください。

使用上のご注意

*[使用上のご注意]では、その危険度に応じて次の区分をしております。

⚠ 警告……人身事故につながるおそれのある注意事項 注意……物損事故につながるおそれのある注意事項

⚠ 警 告

- 本品の使用に際しては、必ず医師にご相談のうえ正しくお使いください。
- 本品は単回使用製品です。1名に使用した本品は、再使用しないでください。
- 本品の使用前に、パッケージに表示された使用期限を確認してください。使用期限を過ぎた本品は使用しないでください。
- 本品の装着状況に応じた装着管理(就寝時、本品の取り外しの可否、装着位置、装着時間、装着期間など)については、必ず医療従事者の指示に従ってください。
- 本品の使用前に、本品の破損、変形や縫製のほつれなどの不具合がないことを確認してください。不具合がある場合は使用しないでください。
- 本品の使用前に、「品質表示」を参照し、使用している素材に対するアレルギー体質がある方や過敏な方は使用しないでください。
- 本品の装着中、品質表示で使用している素材に対するアレルギーの発現や過敏な状態になってしまった方は、医療従事者に相談してください。
- 本品の装着中、過度の圧迫や偏ったあたり、締め付けすぎなどに注意してください。装着時に痛み、しびれ(神経障害)、血行障害、皮膚障害などの異常が生じた場合は直ちに使用を中止し、医療従事者に連絡してください。
- 本品の装着中、汗が気になる場合や水に濡れてしまった場合は、タオルなどで拭き取り、よく乾かしてください。水分を含む湿った状態で使用すると皮膚かぶれなどのおそれがあります。

注 意

- においの強さや使用状況により消臭効果は変わります。また、においの感じ方には個人差があります。
- ギプスの表面や先端に、引っ掛からないようご注意ください。
- 洗濯機や乾燥機などの使用は、本品が破損するおそれがあるため、使用を避けてください。「洗濯方法」を参照してください。
- 汗などの水濡れや摩擦により色落ちが生じるおそれがあります。衣料品などと一緒に使用する場合は、色移りにご注意ください。

取扱上のご注意

保管方法

- 本品を保管する際は、車中など高温になる場所や低温になる場所、暖房器具の熱などが直接あたる場所などには置かないでください。
- 水濡れに注意し、直射日光を避けて、室温で保管してください。

洗濯方法

- 本品の汚れやにおいが気になる場合は、手洗いによる洗濯が行えます。手順に従って洗濯を行ってください。
- 他のものと一緒に洗濯しないでください。
- 30℃以下の水で中性洗剤を使用し、手洗いしてください。
- 柔軟剤、塩素系漂白剤、洗濯機、乾燥機の使用、アイロン、ドライクリーニングは避けてください。
- 洗濯後は陰干しし、十分に乾燥させてからご使用ください。

廃棄方法

- 本品を廃棄する場合は、各自治体の廃棄区分に従ってください。

品質表示

綿、ナイロン、ポリウレタン

つなぐ手あて、ひらくケア。

デオギプスカバー


Deo Gyps Cover

ギプス用消臭カバー
Deodorant Gyps Cover



適応範囲(ギプス手首付近周囲): **17 ~ 22cm**

商品コードNo.: **21632**

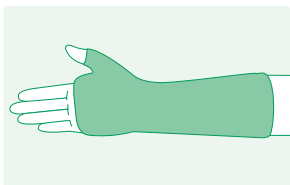


使用上のご注意

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、商品の特性を十分理解してからご使用ください。
- 常に、この取扱説明書はお手元に置き、必要に応じてお読みください。

各部の名称


※本品は左右兼用です。

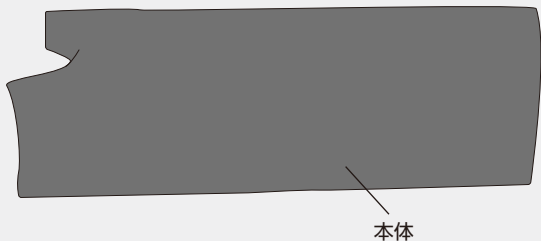

製品仕様およびデザインは、品質改良にともない変更する場合がございます。それにより、イラストと実際の製品とで若干の違いが生じる場合がございますことをご了承ください。


装着図

※本品は左右兼用です。イラストは「右手」装着の図です。

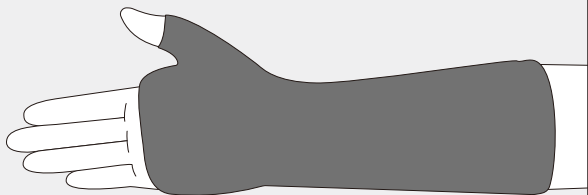


使用手順 ※本品は左右兼用です。イラストは「右手」装着の図です。

- 手指を通してギプスの上に装着します。

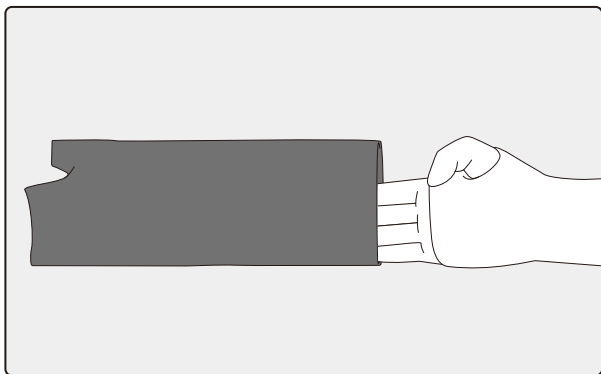

種類と規格

種類	商品コードNo.	規格 (ギプス手首付近周囲)	1袋入数
L	21631	22~27cm	1枚
M	21632	17~22cm	1枚

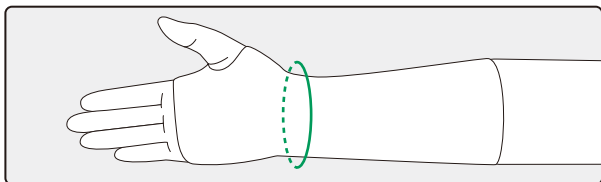

※図のようにギプス手首付近の周囲を測ってください。

※規格が両方のサイズにまたがる場合は、大きいサイズを選択してください。

取扱説明書

はじめに

《デオギプスカバー》は、ギプス特有のにおいの消臭と汚れなどによる見た目の不快感の軽減を目的に開発された商品です。安全にお使いいただくため、用途以外の使用はせず、この取扱説明書に従いご使用ください。商品についてご不明な点は当社お客様相談室までご連絡ください。

使用上のご注意

*[使用上のご注意]では、その危険度に応じて次の区分をしております。

⚠ 警告……人身事故につながるおそれのある注意事項 注意……物損事故につながるおそれのある注意事項

⚠ 警 告

- 本品の使用に際しては、必ず医師にご相談のうえ正しくお使いください。
- 本品は単回使用製品です。1名に使用した本品は、再使用しないでください。
- 本品の使用前に、パッケージに表示された使用期限を確認してください。使用期限を過ぎた本品は使用しないでください。
- 本品の装着状況に応じた装着管理(就寝時、本品の取り外しの可否、装着位置、装着時間、装着期間など)については、必ず医療従事者の指示に従ってください。
- 本品の使用前に、本品の破損、変形や縫製のほつれなどの不具合がないことを確認してください。不具合がある場合は使用しないでください。
- 本品の使用前に、「品質表示」を参照し、使用している素材に対するアレルギー体質がある方や過敏な方は使用しないでください。
- 本品の装着中、品質表示で使用している素材に対するアレルギーの発現や過敏な状態になってしまった方は、医療従事者に相談してください。
- 本品の装着中、過度の圧迫や偏ったあたり、締め付けすぎなどに注意してください。装着時に痛み、しびれ(神経障害)、血行障害、皮膚障害などの異常が生じた場合は直ちに使用を中止し、医療従事者に連絡してください。
- 本品の装着中、汗が気になる場合や水に濡れてしまった場合は、タオルなどで拭き取り、よく乾かしてください。水分を含む湿った状態で使用すると皮膚かぶれなどのおそれがあります。

注 意

- においの強さや使用状況により消臭効果は変わります。また、においの感じ方には個人差があります。
- ギプスの表面や先端に、引っ掛からないようご注意ください。
- 洗濯機や乾燥機などの使用は、本品が破損するおそれがあるため、使用を避けてください。「洗濯方法」を参照してください。
- 汗などの水濡れや摩擦により色落ちが生じるおそれがあります。衣料品などと一緒に使用する場合は、色移りにご注意ください。

取扱上のご注意

保管方法

- 本品を保管する際は、車中など高温になる場所や低温になる場所、暖房器具の熱などが直接あたる場所などには置かないでください。
- 水濡れに注意し、直射日光を避けて、室温で保管してください。

洗濯方法

- 本品の汚れやにおいが気になる場合は、手洗いによる洗濯が行えます。手順に従って洗濯を行ってください。
- 他のものと一緒に洗濯しないでください。
- 30℃以下の水で中性洗剤を使用し、手洗いしてください。
- 柔軟剤、塩素系漂白剤、洗濯機、乾燥機の使用、アイロン、ドライクリーニングは避けてください。
- 洗濯後は陰干しし、十分に乾燥させてからご使用ください。

廃棄方法

- 本品を廃棄する場合は、各自治体の廃棄区分に従ってください。

品質表示

綿、ナイロン、ポリウレタン



アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1
アルカセントラル19階 〒130-0013
www.alcare.co.jp

お客様相談室 ☎ **0120-770-175**
(土・日・祝日を除く 午前9:00～午後5:30)

ALCARE Co., Ltd.

19F, Arcacentral Bldg., 1-2-1 Kinshi,
Sumida-ku, Tokyo, 130-0013, Japan
MADE IN JAPAN

商品情報はこちら
「快適ギプス生活」



取説兼用
包装台紙



袋:PP