

# フィックスキット®・PV 小児 使用ガイド

使用手順の動画はこちら



フィックスキット®・PV 小児は、0歳以上の患者の末梢留置カテーテルの固定、刺入部位の被覆・保護、ライン等の固定補助に使用するカテーテル固定専用キットです。安全にお使いいただくために、電子化された添付文書及び本ガイドをよく読んで正しくご使用ください。



貼付前には、カテーテル刺入部周囲を清拭、洗浄し、必要に応じて消毒を行います。清潔にした後、水分をよく取り除きます。

## ベーステープ



裏面中央の剥離紙を剥がし、イラストの位置を参考にカテーテルの下に配置します。



皮膚側の剥離紙を片方ずつ矢印方向に引くようにして剥がし、テープを皮膚に貼付します。




カテーテル側に残った剥離紙を点線までめくり、中央の切れ目から左右に剥がします。



上からカテーテルを押さえてクッション材に密着させます。

## フィルムドレッシング

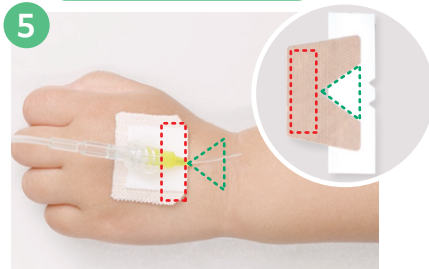

切り込みが一つ付いている方の剥離紙を剥がし、四角形と三角形がそれぞれ合うようにカテーテルハブに貼付します。



カテーテル角度を変えないように注意しながら、カテーテルハブとフィルムドレッシングをよく密着させます。



残った剥離紙を剥がし、カテーテル刺入部から外側に向かって、フィルムドレッシングの浮きがでないよう貼付します。

## 付属テープ



ライン固定テープ小(切り欠きあり)の剥離紙を剥がし、カテーテル接続部を覆うように貼付します。この時、カテーテル角度を変えないように貼付してください。



ライン固定テープ大の中央の粘着面を露出させ、カテーテル下面にテープ中央の粘着面を合わせます。



剥離紙を片方ずつ剥がしながら、カテーテルに巻きつけるようにテープを貼付します。この時、フィルムドレッシングに沿うようにし、カテーテル角度を変えないように貼付してください。

※必要に応じて、フィルムドレッシング端部に補強テープ(切り欠きなし)を貼付します。刺入部の観察性が確保されることを確認し、貼付してください。

## 剥がし方



アルコール綿等を各部材に浸潤させながら、①補強テープ、②ライン固定テープ大、③ライン固定テープ小の順にゆっくり剥がします。



フィルムドレッシングを、カテーテル接続部分から刺入部被覆部分に向かってゆっくり剥がします。



ベーステープを矢印の方向にゆっくり剥がします。最後に、ベーステープのクッション材からカテーテルを剥がします。