

フランジカッター

Flange Cutter

フランジ専用カッター

取扱説明書

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、商品の特性を十分理解してからご使用ください。
- 常に、この取扱説明書はお手元に置き、必要に応じてお読みください。

お客様相談室 ☎ **0120-770-175**

(土・日・祝日を除く 午前9:00～午後5:30)


www.alcare.co.jp

使用上のご注意

- 《フレンジカッター》は先端が鋭利なため、指先を傷つけないように注意してください。
- 単品系装具に使用する場合、袋を傷つけないようにご注意ください。

使用方法

- ①《フレンジカッター》の刃先を面板に刺し、先端の丸い部分が面板に描いた線上に来るようにゆっくりと動かし、カットします。
- ②切り終わったら、ストーマを傷つけないように、切り口を指でこすって、なめらかにします。

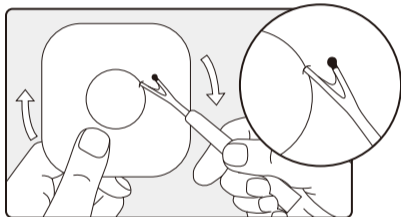

保管上のご注意

- けがや誤飲のおそれがありますので、使用後はキャップをつけ、幼児の手の届かない所に保管してください。
- 品質劣化の原因となりますので、高温多湿の場所、直射日光が当たる場所での保管は避けてください。

廃棄上のご注意

- キャップをつけた上で、キャップが外れないように固定して廃棄してください。詳しくは各自治体へご確認ください。