

## 廃棄上のご注意

使用後はストーマ袋と一緒に廃棄してください。

## 規格

種類	商品コードNo.	外径	規格 内径	厚さ	1函入数
—	12681	30mmφ	8mmφ	3mm	120コ

**ALCARE**

### アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸 1-2-1 アルカセントラル 19階 〒130-0013  
TEL.03-5611-7800 (代表) FAX.03-5611-7825  
www.alcare.co.jp

1711-2

for Best Care **ALCARE**

# ガスクリン Gasclean

脱臭ガス抜きフィルター  
Deodorize Gas Free Filter

## 取扱説明書

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、商品の特性を十分理解してからご使用ください。
- 常に、この取扱説明書はお手元に置き、必要に応じてお読みください。

お客様相談室 ☎ **0120-770-175**  
(土・日・祝日を除く 午前9:00~午後5:30)  
www.alcare.co.jp

## はじめに

《ガスクリン》は、ガス抜きと脱臭を同時に行うことができるフィルターです。ストーマ袋が膨らむことなく、自然にガス抜きができます。

## 保管上のご注意

脱臭力不足や粘着力不足など品質劣化の原因となりますので、保管の際は次のことを避けてください。

● 幼児の手の届く場所での保管（誤飲のおそれがあります）

● 高温・多湿の場所での保管

● 温度の低い場所（冷蔵庫など）での保管

● 直射日光が当たる場所での保管

● 圧迫がかかる場所での保管

● 長期保管

\*箱に記載されている使用期限を必ずご確認ください。

● 台紙から剥した状態での保管

● チャック付き袋から取り出した状態での保管


\*チャック付きに入れて封をした状態で保管してください。長時間、空気に触れていると、他の臭いを吸着して脱臭力が低下するおそれがあります。

## 使用手順


① ストーマ袋に穴を開けます。ストーマ袋の上の方に、針などで穴を開けます。

※ストーマ袋に開ける穴は、排泄物が染み出すことがないように、できるだけストーマ袋の上の端に開けてください。

※ストーマ袋に穴を開ける時は、指や反対側の袋フィルムを傷つけないようにご注意ください。

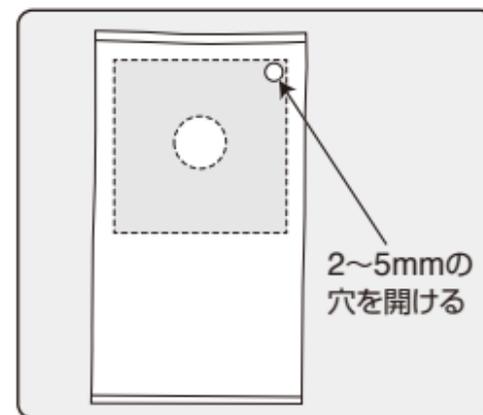

② ガスクリンを剥離紙から剥がします。

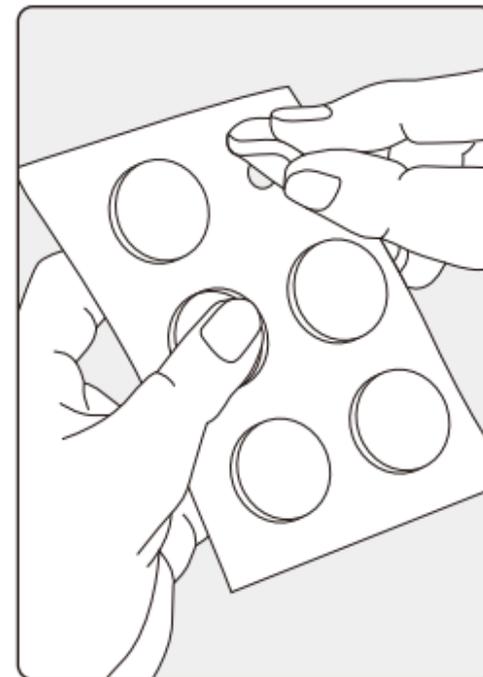

③ ガスクリンを貼り付けます。ストーマ袋に開けた穴の上にガスクリンの穴を合わせて貼り付けます。

※できるだけガスクリンの粘着面には触れないようにご注意ください。

※ガスクリンを貼る位置のフィルムに水分や油分が付いている場合、拭き取ってからガスクリンを貼ってください。

