

保管上のご注意

高温・多湿を避けて保管してください。

廃棄上のご注意

使用後の本品は、水洗トイレなどに流さないでください。ストーマ装具と一緒に新聞紙などに包み、ゴミ袋に入れてお捨てください。装具は通常「燃えないゴミ」の扱いですが、ゴミの分別は地域により異なります。詳しくは各自治体へご確認ください。

種類と規格

カラヤリング

種類	形状	商品コードNo.	サイズ	1函入数
5号		12551	外径55mmφ	24コ

カラヤディスク

種類	形状	商品コードNo.	サイズ	1函入数
7号		12561	外径70mmφ	20枚
8号		12562	外径80mmφ	20枚
9号		12563	外径90mmφ	20枚

カラヤシート

種類	形状	商品コードNo.	サイズ	1函入数
10号		12571	100mm×100mm	20枚
20号		12572	200mm×200mm	5枚

ALCARE

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825
www.alcare.co.jp

1711-2

for Best Care **ALCARE**

カラヤリング® Karaya Ring

カラヤ系リング状皮膚保護剤
Karaya Gum Ring

カラヤディスク® Karaya Disk

カラヤ系ディスク状皮膚保護剤
Karaya Gum Disk

カラヤシート® Karaya Sheet

カラヤ系ウエハー状皮膚保護剤
Karaya Gum Wafer

取扱説明書

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、商品の特性を十分に理解してからご使用ください。
- 常に、この取扱説明書はお手元に置き、必要に応じてお読みください。

お客様相談室 ☎ 0120-770-175

(土・日・祝日を除く 午前9:00～午後5:30)

www.alcare.co.jp

はじめに

《カラヤリング》、《カラヤディスク》、《カラヤシート》は、カラヤガムをゲル状にしたストーマ周囲の皮膚保護剤です。

カラヤリング :柔軟性が高く、双孔式ストーマにも対応できます。ストーマ周囲の皮膚保護に適しています。


カラヤディスク :表面が不織布でコーティングされているため型崩れが少なく、ストーマ周囲の皮膚保護に適しています。

カラヤシート :用途に合わせてカットでき、術直後などにストーマ装具と組み合わせて使用できます。


使用方法

■カラヤリング


- ①カラヤリングの穴をストーマに合わせて指で広げます。

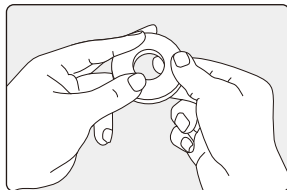

- ②ストーマ周囲にすき間ができないように貼り、30秒くらい圧迫してよく密着させます。

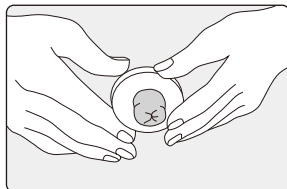


- ③ストーマ袋の粘着面にシワができないように貼ります。

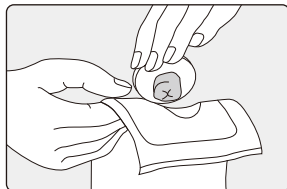


■カラヤディスク

- ①カラヤディスクの穴をストーマサイズより少し大きめに指で広げます。

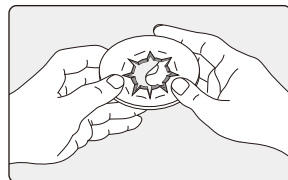


- ②穴を広げたディスクをストーマに合わせて貼り付け、ディスクがよく密着するまで圧迫して、その上に装具を固定します。

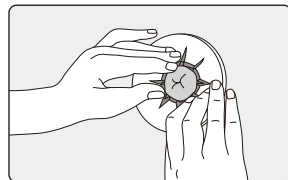


■カラヤシート

- ①ストーマサイズにピッタリの穴をハサミなどで中央に開けます。

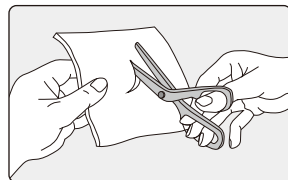

- ②ストーマ周囲の皮膚とストーマ粘膜部との間にすき間ができないようによく密着させます。

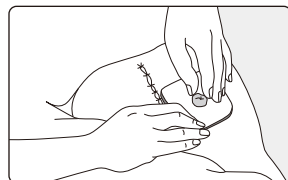

- ③粘着面がカラヤシートより大きなストーマ袋を使用します。粘着力が少ない場合はサージカルテープで図のように補強します。

