

はじめに…

ニーケア・OA 2は、変形性膝関節症などを有している患者様の、
膝関節のサポートや支持、動揺制限などを目的として開発された商品です。
安全にお使いいただくため、上記用途以外の使用はせず、
この取扱説明書に従いご使用ください。
商品についてご不明な点は当社お客様相談室までご連絡ください。

使用上のご注意

*[使用上のご注意]では、その危険度に応じて次の区分をしております。

△ 警告…人身事故につながるおそれのある注意事項

注 意…物損事故につながるおそれのある注意事項

警告

- 本品の使用に際しては、取扱説明書を良くお読みになったうえ、必ず医師、看護師、義肢装具士等、医療従事者の指示に従ってください。
- 本品を使用中に、痛み、しびれ、皮膚障害などの症状がありましたら、使用を中止し、直ちに医師に相談してください。
- 本品に破れや縫製のほつれなどの不具合がある場合は使用しないでください。
- 面ファスナー等との接触により、怪我をするおそれがありますので、ご使用中は十分ご注意ください。
- 本体生地が折れ曲がった状態で本品を使用しないでください。
- 使用中にズレやゆるみが生じた場合は、正しく装着し直してください。ズレやゆるみがあると確実な支持性が得られません。
- 本品を装着した状態で、激しい運動を行わないでください。面ファスナーがはずれるおそれがあります。
- 他の装具の併用(重ね着等)はおやめください。タイツやスリーブと併用する場合、または就寝時に着用する場合などは膝周辺部に過度の圧迫がかからぬよう、ご注意ください。
- 本品は1症例1使用となります。本人以外の方へ使用することはおやめください。

注意

- 本品装着時に違和感を覚えた場合、決してご自分では本品の修正をせず、医師、看護師、義肢装具士等、医療従事者の指示に従ってください。
- 面ファスナーが衣服につかないように本品を装着してください。

洗濯・保管・廃棄方法

- 30℃以下の水で中性洗剤を使用し、手洗いしてください。
- 漂白剤、洗濯機、乾燥機の使用、アイロン、ドライクリーニングは避けてください。
- 洗濯後は陰干ししてください。面ファスナーは濡れた状態でとめると、はずれるおそれがあります。
- 他のものといっしょに洗濯することは避けてください。
- 保管に際しては、車中など高温になる場所には置かないでください。水濡れに注意し、直射日光を避けて、常温保管してください。
- 本品を廃棄するときは、各自自治体の廃棄区分に従ってください。


品質表示

- 本体生地 : ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル、クロロプレンゴム
- ステッカー : ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン
- クロスベルト : ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン
- スパイラルステー : ポリエチレン、ポリエステル

採寸位置と適応範囲

本品の適応範囲は表の通りです。

	適応範囲	
	大腿周囲	膝周囲
LL	46~50cm	35~41cm
L	42~46cm	34~39cm
M	38~42cm	32~37cm
S	35~38cm	31~35cm
SS	32~35cm	29~33cm

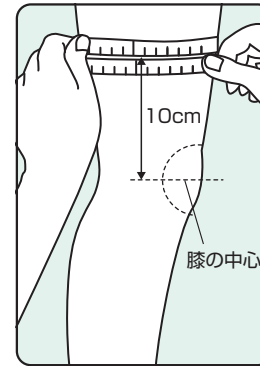

*大腿周囲を基準としてサイズをお選びください。膝周囲は目安としてください。

*適応範囲が両方のサイズにまたがる場合は、小さいサイズをお選びください。

*大腿周囲はまっすぐ立った状態で、膝蓋骨(膝のお皿)中心から上に10cm上がった位置の大腿周径を測ってください。

ALCARE

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825
www.alcare.co.jp

for Best Care **ALCARE**

ニーケア・OA 2

Kneecare-OA 2

クロスベルト・側方支持付膝サポーター
Knee Supporter With Crossbelt

取扱説明書



- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、商品の特性を十分に理解してからご使用ください。
- 常にこの取扱説明書はお手元に置き、必要に応じてお読みください。

お客様相談室 ☎ 0120-770175

www.alcare.co.jp


各部の名称

※イラスト上の商品は左脚用です。

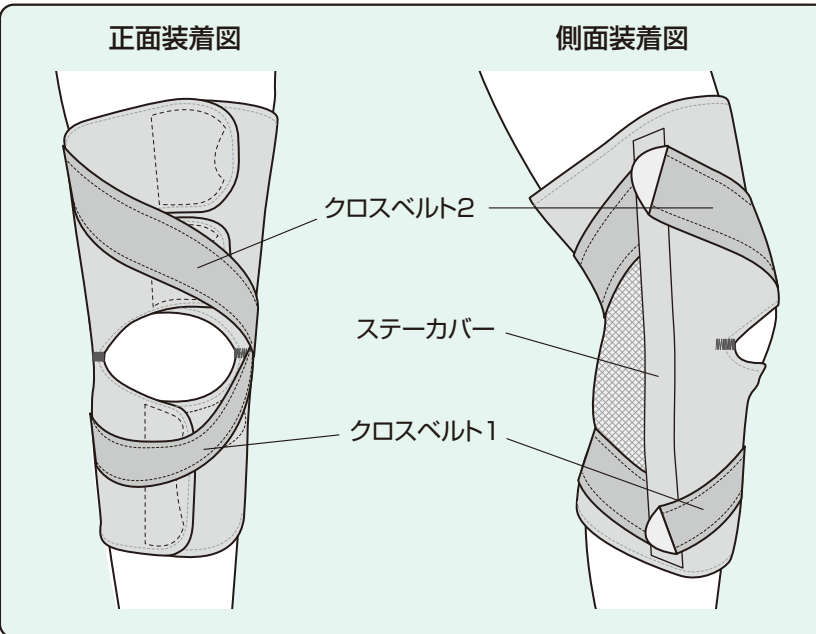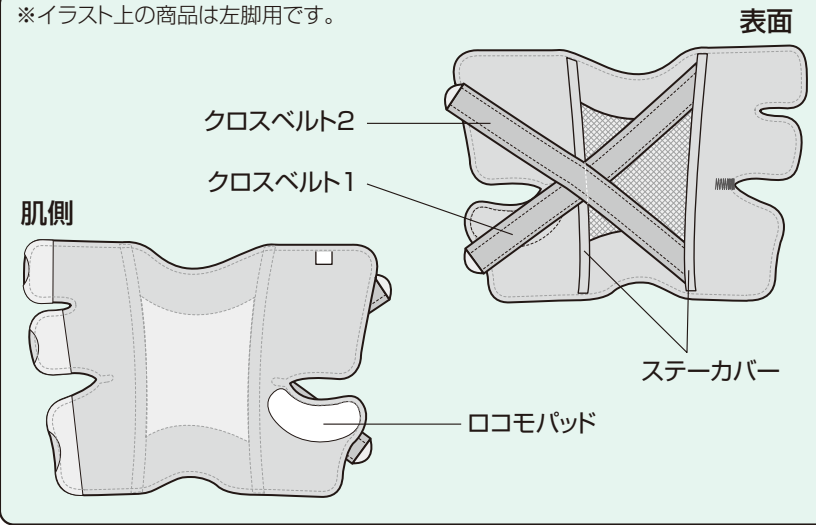


※この取扱説明書上のイラストは、左脚装着の例です。

- ①装着に際して全ての面ファスナーをはずしておきます。
- ②膝を軽く曲げた(20~30度)楽な状態で装着します。
- ③サイズ表示の付いている方が肌側の上部になるように、本体中央の生地を膝の裏からあてて、前で合わせていきます。
- ④本体生地を前方に引っ張りながら、最初に膝下の面ファスナーをとめます。その時、ロコモパッドの付いている方の生地を膝蓋骨(膝のお皿)のすぐ下に沿わせるようにし、ロコモパッドの中心を膝蓋骨の中心の下に合わせるようにして面ファスナーをとめてください。その後、膝蓋骨の下端で止まるまで、本体全体を上へ引き上げます。

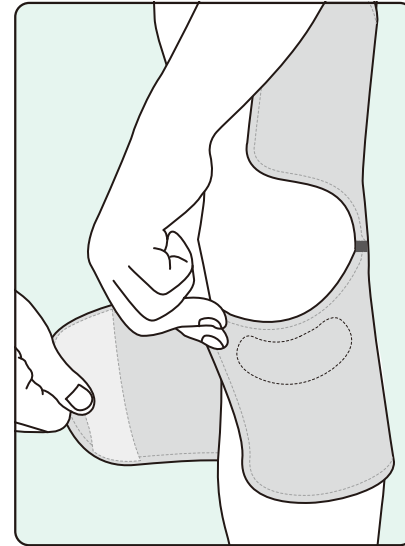


- ⑤本体生地の面ファスナーを1, 2, 3の順でとめていきます。
- ⑥膝をまっすぐにして、ゆるみ、隙間があれば各部を締め直しフィットさせます。
- ⑦外側のクロスベルトが縫われている部分が膝蓋骨の中心と同じ高さになっていることを確認してください。ずれている場合は装着をやり直してください。

本体生地 面ファスナーの固定順

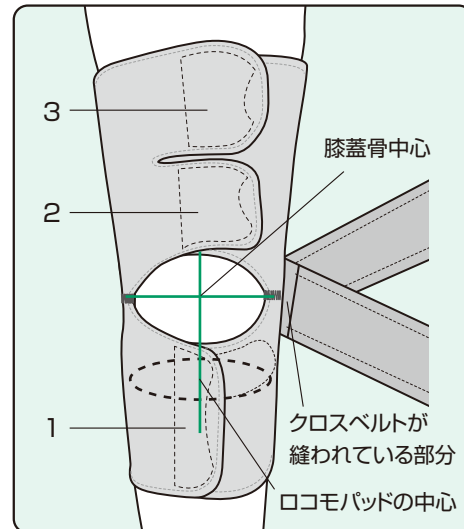

使用手順

- ⑧膝を軽く曲げた状態に戻し、クロスベルト1を下腿部の前面を通して反対(内)側のスパイラルステーの上でとめます。

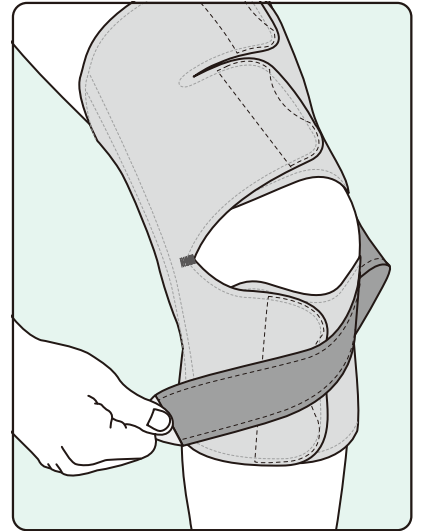

- ⑨クロスベルト2を大腿部の前面を通して反対(内)側のスパイラルステーの上でとめます。
- ⑩装着が終わりましたら、膝を2~3回屈伸させて次の点を確認してください。
 - 装着位置、ストラップ等の締め忘れを確認してください。正しく装着されていなければ、装着し直してください。
 - 締め付けすぎで痛みがある場合は、本体をズレ落ちない程度にゆるめてください。

